


VELA Tango 100-serien

Ta stolen ut av pappemballasjen



FJERNING AV BESKYTTELSESNETT

Fjern det røde plastbeskyttelsesnettet fra hjulene

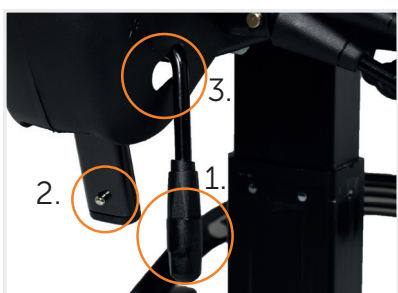

PÅSETTING AV RYGGSTØTTE

Håndtak (1) til innstilling av rygg settes i åpen posisjon. Låsetapp på ryggbøyle trykkes inn, ryggen sættes ned igjennom beskyttelseskappen (2) og ned i plasthylsen, stram håndtak igjen. Beskyttelseskappen monteres, håndtak føres igjennom kappen (3) som vist på bildet.

Merk: Sjekk at låsetappen er ute, og ryggen ikke kan trekkes opp uten å trykke inn låsetappen.

Stolen er nå klar til å tas i bruk