



## Udskiftning af hjul/ Hjulskifte/ Byte av hjul/ Replacing the wheels - VELA Samba

Udskiftning af dobbelt hjul på VELA Samba stel

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)012204 Blød bane 75 mm

(A)012402 Frivægtsbremse 50 mm

(A)012502 Trægtkørende 50 mm

(A)012602 Antistatisk 50 mm

(A)012804 Blød bane og klikbremse 75 mm

(A)016491 Trompetglidesko

(A)012102 Hård bane 50 mm

(A)012202 Blød bane 50 mm

### DANSK

1. Vend stolen på hovedet og træk hjulene (A) af. Rengør evt. montagehullerne.
2. Tryk de nye hjul ned i hullerne til der lyder et lille klik.
3. Tjek at alle hjulene kan dreje ubesværet rundt.

### NORSK

1. Snu stolen opp-ned og trekk av hjulene (A). Rengjør eventuelt monteringshullene.
2. Trykk de nye hjulene ned i hullene til et lite klikk høres.
3. Kontroller at alle hjulene kan dreies uhindret.

### SVENSKA

1. Vänd stolen upp och ned och dra av hjulen (A). Rengör eventuellt montagehålen.
2. Tryck ned de nya hjulen i hålen tills ett klickljud hörs.
3. Kontrollera att alla hjulen kan snurra obehindrat.

### ENGLISH

1. Turn the chair on its head the pull the wheels (A) off. Clean the assembly holes if necessary.
2. Press the new wheels down into the holes until you hear a click.
3. Test all wheels to ensure they rotate freely.

