



# Benglidestyr / Glidskenor / Leg guides - VELA Meywalk 4

Montering af benglidestyr i sort plast på/ Guide to mount plastic leg guides on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

014703 VELA Meywalk 4 Micro

013703 VELA Meywalk 4 Small

104303\* VELA Meywalk 4 Medium/Large

\*OBS! Beslag monteres forskelligt på Medium og Large/  
Brackets are mounted differently on Medium and Large



Videoinstruktion:  
vl1935.dk/mey5



VELA Meywalk 4  
Medium



VELA Meywalk 4  
Large



**A**



**B**



**C**



**D**

## DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Monter benglidestyr i sort plast på indersiden af stellet i begge sider, så de dækker for hjulet (A).
3. Det gøres ved at klikke de grå bøjler på bagsiden af benglidestyret ind over stellet (B).
4. De grå bøjler på benglidestyret låses om stellet ved at klikke de medfølgende spænder ind over de grå bøjler (C) og (D).



## Benglidestyr / Glidskenor / Leg guides - VELA Meywalk 4

### Montering af benglidestyr i sort plast på/Guide to mount plastic leg guides on VELA Meywalk 4

#### NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Monter benglideren i sort plast på innsiden av rammen på begge sider slik at de dekker over hjulet (A).
3. Det gjør man ved å klikke de grå bøylene på baksiden av benglidestyret innpå rammen (B).
4. De grå bøylene på benglidestyret låses på rammen ved å klikke de medfølgende spennene innpå de grå bøylene (C) og (D).

#### SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Montera fast glidskenorna i svart plast på insidan av ramens båda sidor så att de täcker hjulet helt (A).
3. Montera glidskenorna genom att klicka fast de grå fästena på baksidan av glidskenorna över ramen (B).
4. Sätt fast de grå fästena med hjälp av medföljande spännen (C) och (D).

#### ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Mount the plastic leg guides on the inside of the frame on both sides, so they cover the rear wheels (A).
3. The leg guides are mounted by clicking the grey brackets over the frame of the gait trainer on both sides (B).
4. The gray brackets are locked onto the frame with the supplied buckles (C) and (D).