

www.vermundlarsen.no

VELA arbeidsstoler og ståstoler

Ergonomiske stoler og tilbehør
for junior, voksne og høy vekt

Komfort, sikkerhet og ergonomi i fokus

VELA stoler er utviklet for mennesker med behov for stabile og trygge sittestillinger, så aktivitetsnivå og selvhjulpenhet kan bevares. Brukere av stolene kan ha funksjonsnedsettelse og begrenset mobilitet. VELA stoler bidrar til å gjøre en aktiv hverdag lettere.





Stoler på avtale

VELA Tango 700ELF Aktiv
Delkontrakt 3



Side 10

VELA Tango 700EL Aktiv
Delkontrakt 3



Side 13

VELA Tango 700EL Contour/Support
Delkontrakt 4



Side 14

VELA Tango 700F Aktiv
Delkontrakt 1



Side 16

VELA Tango 700 Aktiv
Delkontrakt 1



Side 19

VELA Tango 700 Contour/Support
Delkontrakt 2



Side 20

VELA Tango 300/310ELF Aktiv Ekstra Stor
Delkontrakt 5



Side 22

VELA Salsa Ståstoler
Delkontrakt 7



Side 25

VELA Tango 600EL Aktiv Junior
Delkontrakt 10



Side 26

Les mer om:

Slik fungerer en
VELA-stol

Side 4

Nye VELA-stoler
på avtale

Side 6

Nye seter & rygger

Side 8

Tilbehørslister


Side 28



Slik fungerer en VELA-stol

VELA Tango 700EL

Arbeidsstol - Voksen

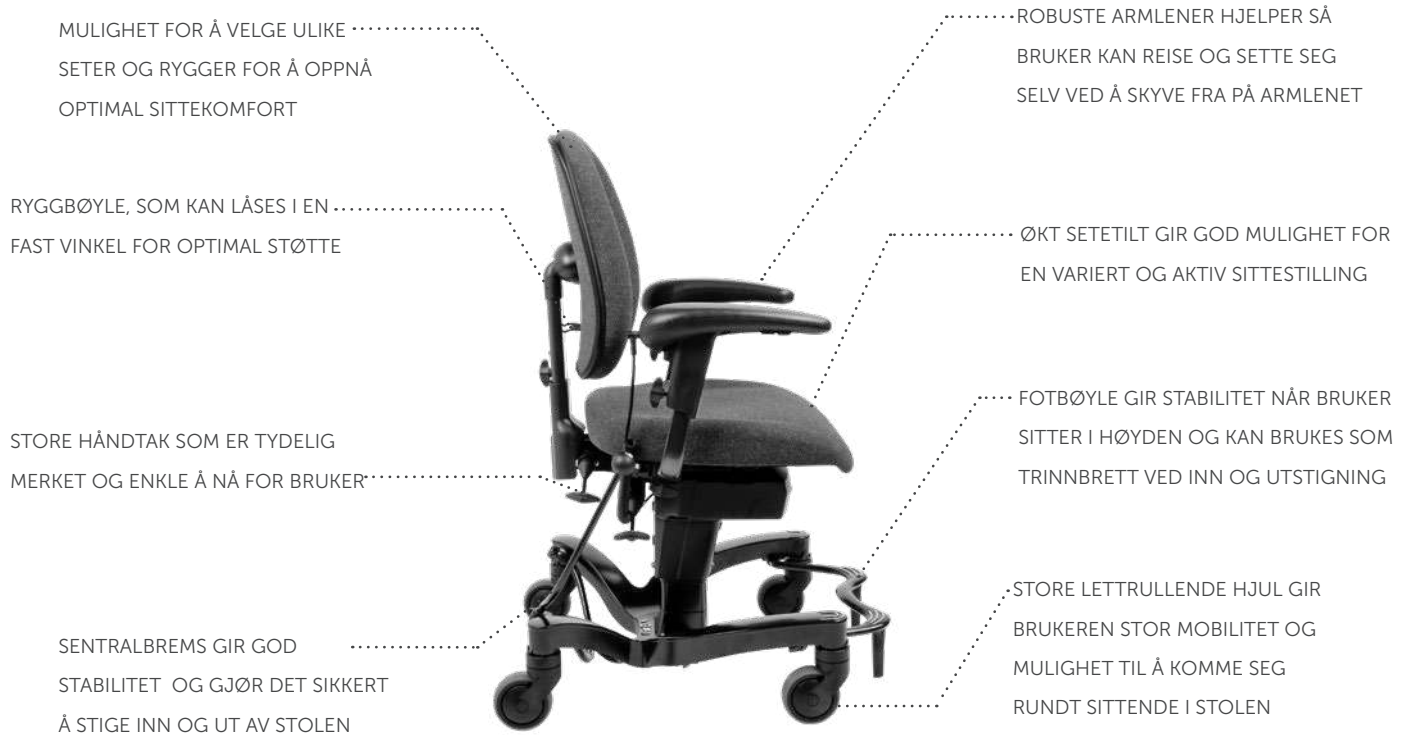

Se produktark [Side 10-21](#)

VELA Salsa 120

Ståstol - Voksen



Se produktark [Side 25](#)



Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i



VL1935.dk/finnstol



Nye VELA-stoler på avtale

Opp till 300 kg

NY
PÅ AVTALE

VELA Tango 300ELF

Arbeidsstol - opptil 200kg

VELA Tango 310ELF

Arbeidsstol - opptil 300kg

FORSTERKET RYGGBØYLE, SOM
KAN LÅSES I EN FAST VINKEL FOR
OPTIMAL STØTTE

STABIL STØTTE FRA SETE
OG RYGG FOR EN GOD
SITTEKOMFORT

STABILE OG ROBUSTE ARMLENER ER
TIL HJELP NÅR BRUKER REISER SEG
OG SETTER SEG NED BRUKER KAN
SKYVE FRA PÅ ARMLENET MED FULL
VEKT

STORE KNAPPER FOR ELEKTRISK
HØYDEJUSTERING, SOM ER
TYDELIG MERKET OG ENKLE Å NÅ
FOR BRUKER

ROBUST OG SIKKER STOL UTVIKLET
TIL VELDIG HØY BRUKERVEKT

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR BRUKER STOR MOBILITET
OG MULIGHET TIL Å KOMME SEG
RUNDT SITTENDE I STOLEN



Se produktark

Side 22





Nye VELA-stoler på avtale

Arbeidsstol
for junior
NY
PÅ AVTALE

VELA Tango 600EL

Arbeidsstol - Junior

MULIGHET FOR Å VELGE ULIKE SETER
OG RYGGER FOR Å OPPNÅ OPTIMAL
SITTEKOMFORT FOR BRUKEREN

SETETILT OG RYGGVINKEL GIR GOD
MULIGHET FOR EN VARIERT OG AKTIV
SITTESTILLING

RYGGBØYLE, SOM KAN LÅSES I EN
FAST VINKEL FOR OPTIMAL STØTTE

ARMLENER GIR GOD STØTTE NÅR
BRUKER SITTER I STOLEN, ELLER
NÅR BRUKER SKAL REISE SEG OG
SETTE SEG MED MINIMUM AV HJELP

STORE HÅNDTAK SOM ER TYDELIG
MERKET OG ENKLE Å NÅ FOR BRUKER
OG HJELPER

JUSTERBAR FOTPLATE GIR
MULIGHETER FOR HENSIKTMESSIG
OG TRYGG PLASSERING AV FØTTENE

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR MOBILITET OG MULIGHET
TIL Å FLYTTE PÅ STOLEN MED
BRUKEREN SITTEDE



Se produktark [Side 26](#)





Nye seter & rygger

VELA Tango 700-serien tar ergonomisk sittekomfort i aktive arbeidsstoler til et nytt nivå.

Velg mellom to serier av seter og ryggstøtter: "Aktiv" og "Contour". Begge seriene fås i størrelsene liten, medium og stor; hvor setets oppbygning og støtte er tilpasset brukers høyde og vekt. Begge setetyper har avrundet forkant slik at man kan bevege seg rundt ved å "gå" stolen frem.

Aktiv-serien:

Standard sete for den aktive personen med normalt sittebehov:

-  **Aktivitet og økt behov for å sitte**
Rettes mot den aktive brukeren som ønsker en balanse mellom komfort og lett støtte.
-  **Laget for mennesker i bevegelse**
Med sine runde former og omfavnende fasong utgjør Aktiv-setet en solid base for både kortvarig og langvarig stabil sittestilling for mennesker i bevegelse.
-  **Neste stilling er den beste**
Setet og ryggstøtten gir lett og fleksibel støtte, noe som er ideelt for brukere som beveger seg fritt og kan endre sin sittestilling selv.
-  **Stabil støtte med fri bevegelse**
Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både under hvile og aktivitet, samtidig som den gir bevegelsesfrihet for skuldre og armer.

Contour-serien:

Avansert sete med ekstra støtte og avlastning:


-  **Økt støtte og komfort**
Dette gir økt støtte og komfort til brukere som trenger støtte, avlastning og mykere sittestøtte.
-  **Fantastisk trykkfordeling**
Setet er sammensatt av ulike skumtyper som støtter og fordeler vekten, slik at risikoen for uheldig trykk i seteregionen nær sitteknokler og haleben reduseres.
-  **Lindrer trykk, smerter og ubehag**
De skrånende kantene og fordypningene i setet hjelper med å lindre trykk, smerter og ubehag. Dette er en fordel hvis man tilbringer mye tid i sittende stilling.
-  **Ekstra støtte i rygg**
Ryggstøtten gir ekstra støtte og stabilitet gjennom store sideputer, som gir optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og midjen.





Hvilken størrelse bør jeg velge?

Vi har utarbeidet denne enkle størrelsesguiden, som kan hjelpe når du skal velge setestørrelse for den enkelte bruker.

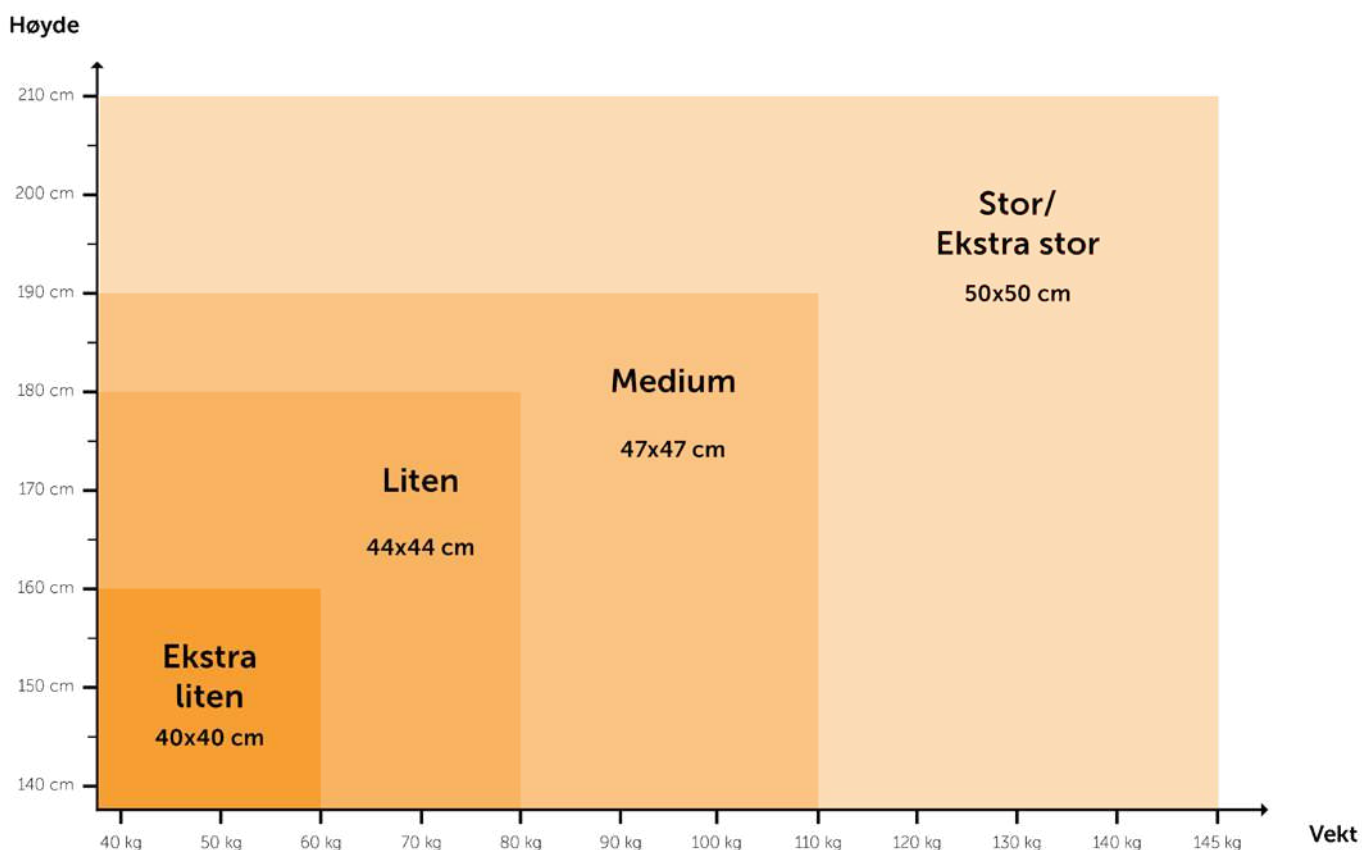

Merk: Hvis bruker er betydelig bredere enn sin høyde, kan det være nødvendig å velge en større størrelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du er usikker på hva du skal velge.

Se alle våre seter og rygger med HMS art.nr og mål i tilbehørskataloget fra side 28.



Visste du at: VELA Tango 700-serien er designet slik at setene kan byttes uten bruk av verktøy.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700ELF Aktiv Liten

VELA Tango 700ELF Aktiv Medium

VELA Tango 700ELF Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3
VELA Art. nr.	J71011-10	J71011-11	J71011-12
HMS Art. nr.	323913	323914	323915
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. Merk: laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37


**4-hjuls brems**


Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36

NYHET: Fremdriftshjelp

Fremdriftshjelpen er en assistansemotor som hjelper brukeren med å opprettholde sin mobilitet på en trygg måte når kreftene begynner å avta.

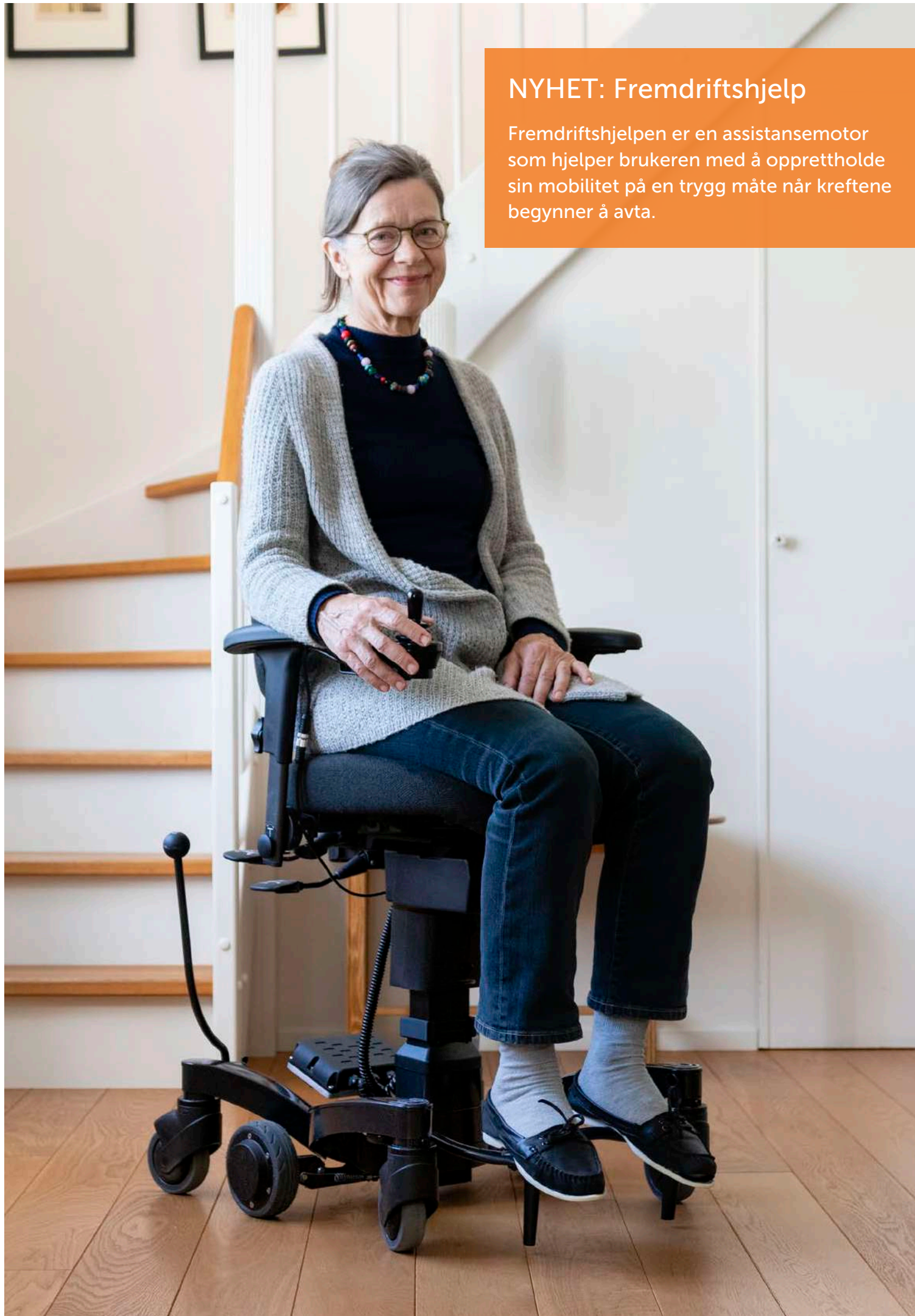

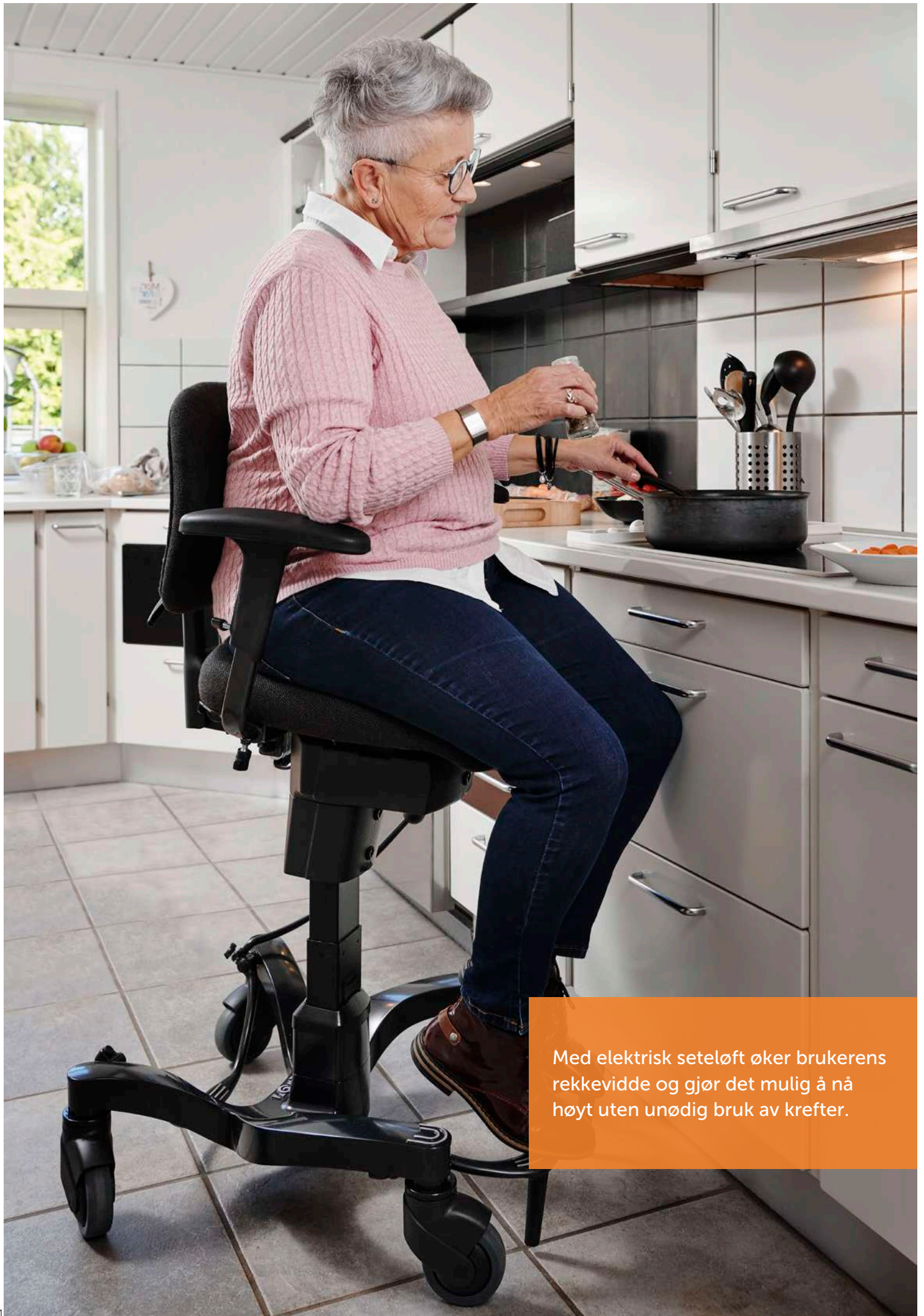

Med elektrisk seteløft øker brukerens rekkevidde og gjør det mulig å nå høyt uten unødig bruk av krefter.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700EL Aktiv Liten

VELA Tango 700EL Aktiv Medium

VELA Tango 700EL Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3	Delkontrakt 3
VELA Art. nr.	J71011-13	J71011-14	J71011-15
HMS Art. nr.	323906	323907	323908
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i beina til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

**Aktiv rygg - ALB**

Optimal støtte til korsrygg og bekken, som støtter korsryggens naturlige krumning og fremmer en god holdning.

Side 31



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700EL Contour Medium



VELA Tango 700EL Contour Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 4	Delkontrakt 4
VELA Art. nr.	J71011-16	J71011-17
HMS Art. nr.	323909	323910
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	42x44cm (Contour Medium)	44x51cm (Contour Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. Merk: laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700EL Support Medium



VELA Tango 700EL Support Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 4	Delkontrakt 4
VELA Art. nr.	J71011-18	J71011-19
HMS Art. nr.	323911	323912
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	41-61cm	41-61cm
Intervalregulering (5 trin)	41-68cm	41-68cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	44x44cm (Support)	44x44cm (Support)
Indre mål (bredde)	opp til 28cm	opp til 28cm
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i bena til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

**Kjørebøyle**

Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 36



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700F Aktiv Liten

VELA Tango 700F Aktiv Medium

VELA Tango 700F Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1
VELA Art. nr.	J71001-10	J71001-11	J71001-12
HMS Art. nr.	323916	323917	323918
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påkledning.

Side 33

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36




Få støtte ved utstigning med elektrisk seteløft

Det kan være både utrygt og utmattende å reise seg opp...
- men da kan elektrisk seteløft være til hjelp.

- ✓ Brukeren kan føle seg trygg, da seteløftet går langsomt og trinnløst uten støt eller raske bevegelser.
- ✓ Ingen unødig bruk av krefter for å reise seg opp (energibesparende).
- ✓ God sikkerhet med sentralbrems og støtte fra armlener.



v1935.dk/reise

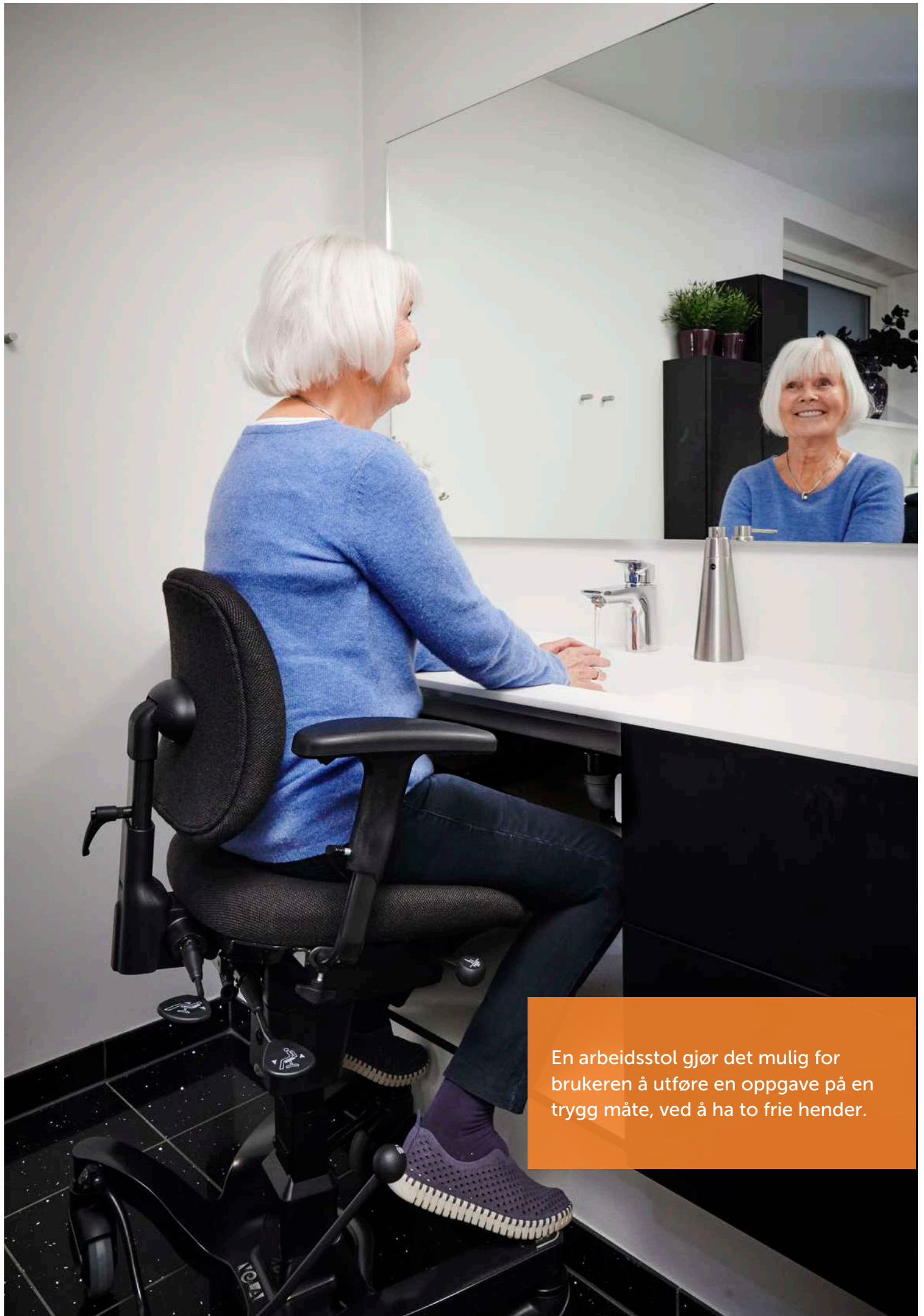

En arbeidsstol gjør det mulig for brukeren å utføre en oppgave på en trygg måte, ved å ha to frie hender.



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
Seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700 Aktiv Liten

VELA Tango 700 Aktiv Medium

VELA Tango 700 Aktiv Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1	Delkontrakt 1
VELA Art. nr.	J71001-13	J71001-14	J71001-15
HMS Art. nr.	323899	323900	323901
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	44x44cm (Aktiv Liten)	47x47cm (Aktiv Medium)	50x50cm (Aktiv Stor)
Setedybde (min-max)	31-46cm	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x32cm (Aktiv Liten)	43x42cm (Aktiv Medium)	43x50cm (Aktiv Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg	160kg

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



VL1935.dk/finnstol



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Contour Medium



VELA Tango 700 Contour Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 2	Delkontrakt 2
VELA Art. nr.	J71001-16	J71001-17
HMS Art. nr.	323902	323903
Seteløft	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	42x44cm (Contour Medium)	44x51cm (Contour Stor)
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



[VL1935.dk/finnstol](https://www.vela.com/finnstol)



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Support Medium



VELA Tango 700 Support Stor

Spesifikasjoner for:

Delkontraktnr.	Delkontrakt 2	Delkontrakt 2
VELA Art. nr.	J71001-18	J71001-19
HMS Art. nr.	323904	323905
Seteløft	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	43-58cm	43-58cm
Intervalregulering (4 trin)	43-63cm	43-63cm
Setepute (bredde x dybde)	47x47cm (Contour Medium)	50x50cm (Contour Stor)
Setedybde (min-max)	36-51cm	39-54cm
Ryggpute (bredde x høyde)	44x44cm (Support)	44x44cm (Support)
Indre mål (bredde)	opp til 28cm	opp til 28cm
Tilt sitteenhet	10° forover, 15° bakover	10° forover, 15° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	9x30cm	9x30cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	14-25cm	14-25cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	160kg	160kg

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påkledning.

Side 33

**Setetrekk**

God beskyttelse mod slitasje, fuktighet og smuss. Overtrekket kan tas av og vaskes i vaskemaskin.

Side 29



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 300ELF Aktiv Ekstra Stor

VELA Tango 310ELF Aktiv Ekstra Stor HD

Delkontraktnr.	Delkontrakt 5	Delkontrakt 5
VELA Art. nr.	J5105-10	J5106-10
HMS Art. nr.	323894	323895
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (15cm)	44-59cm	44-59cm
Setepute (bredde x dybde)	61x52cm (XXX-sete)	73x51cm (4XL-sete)
Setedybde (min-max)	46-56cm	46-56cm
Ryggpute (bredde x høyde)	41x43cm (CX-rygg)	41x43cm (CX-rygg)
Tilt sitteenhet	Nei	Nei
Seterotasjon	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	7x35cm	7x35cm
Armlenehøyde fra sittepute, justerbar	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm
Største utvendige bredde	68cm	84cm
Maks belastning	200kg	300kg

**Bremsepedal**


Bremsepedalen kan brukes som alternativ for bremsepedalen. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

Side 38

**Kjørebøyle**

Kjørebøyle gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen.

Side 38

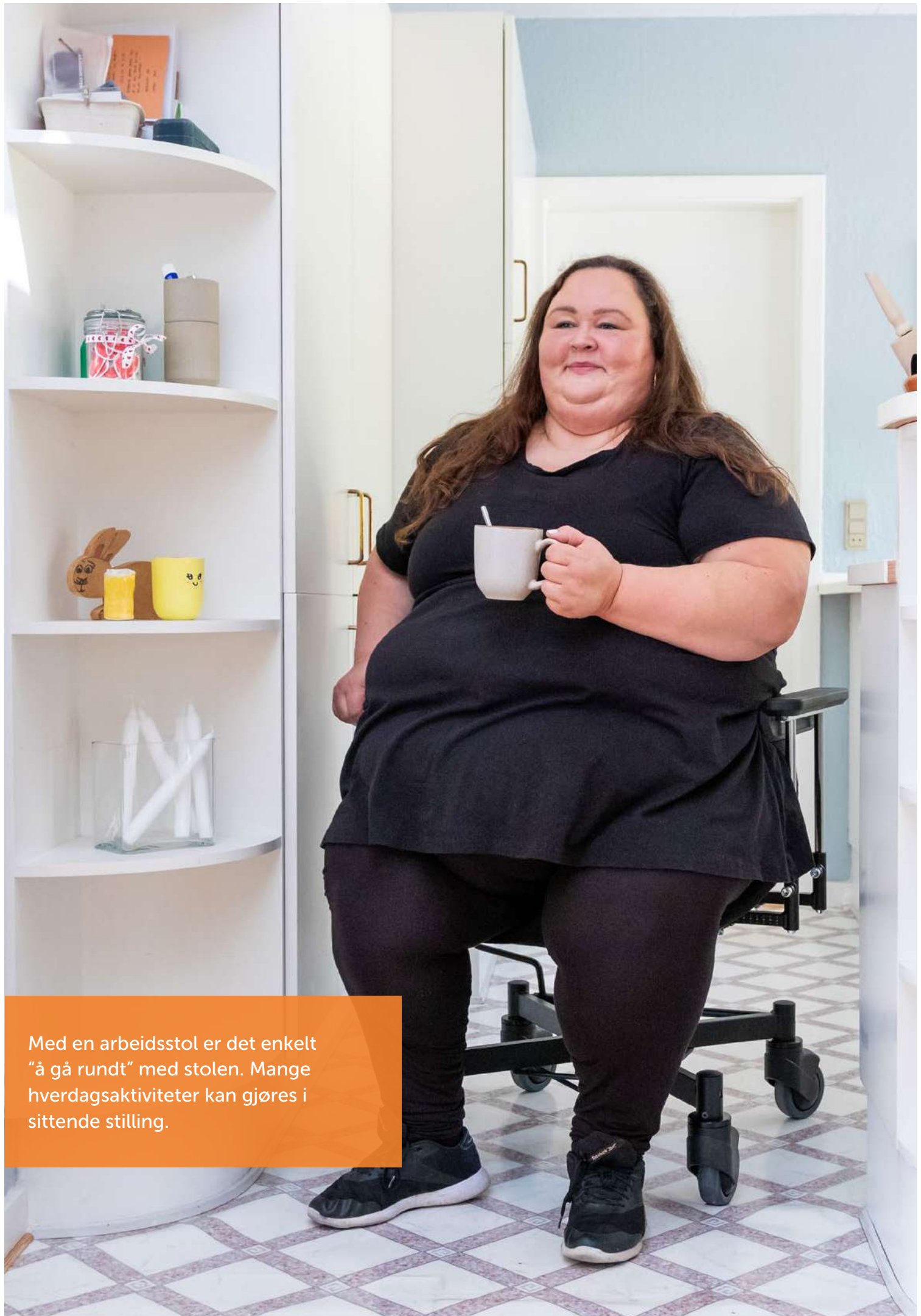

Med en arbeidsstol er det enkelt "å gå rundt" med stolen. Mange hverdagsaktiviteter kan gjøres i sittende stilling.



Med elektrisk seteløft behøver ikke brukeren å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Ståstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon
og
sentralbrems



Spesifikasjoner for:

VELA Salsa 100 sete avrundet front

VELA Salsa 120 sykkelsete

VELA Salsa 400 ridesadelsete

Delkontraktnr.	Delkontrakt 7	Delkontrakt 7	Delkontrakt 7
VELA Art. nr.	J4113-10	J4112-10	J4130-10
HMS Art. nr.	323919	323920	323921
Seteløft	Manuell	Manuell	Manuell
Setehøyde std. (15cm)	58-84cm	57-83cm	59-85cm
Intervalregulering (6 trin)	50-86cm	49-85cm	51-87cm
Setepute (bredde x dybde)	46x35cm (Sete avrundet front)	40x35cm (Sykkelsete)	42x34cm (Ridesadelsete)
Setedybde (min-max)	28-35cm	28-35cm	28-35cm
Ryggpute (bredde x høyde)	38x23cm (Ergo-rygg)	38x23cm (Ergo-rygg)	38x23cm (Ergo-rygg)
Tilt sitteenhet	7° forover, 7° bakover	7° forover, 7° bakover	7° forover, 7° bakover
Seterotasjon	Ja, med lås	Ja, med lås	Ja, med lås
Armlen (bredde x lengde)	8x26cm	8x26cm	8x26cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	0-24cm	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	125kg	125kg	125kg

Alle tre VELA Salsa-modellene har korte seter, slik at du enkelt kan komme tett inntil aktivitetene som skal utføres.



Vi anbefaler **VELA Salsa 100** for brukere som trenger lett støtte i stående stilling, og god støtte i sittende stilling.



Vi anbefaler **VELA Salsa 120** for brukere som ønsker mest mulig støtte i setet ved åpen hoftevinkel



Vi anbefaler **VELA Salsa 400** for brukere som ønsker en åpen hoftevinkel med føttene i god avstand fra hverandre.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Liten

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Medium

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Stor

Delkontraktnr.	Delkontrakt 10	Delkontrakt 10	Delkontrakt 10
VELA Art. nr.	J61013-10	J61013-11	J61013-12
HMS Art. nr.	323896	323897	323898
Seteløft	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Setehøyde std. (20cm)	43-63cm	43-63cm	43-63cm
Intervalregulering (5 trin)	40-63cm	40-63cm	40-63cm
Setepute (bredde x dybde)	32x36cm (E2-sete)	38x42cm (E3-sete)	41x47cm (E4-sete)
Setedybde (min-max)	30-35cm	35-43cm	39-49cm
Ryggpute (bredde x høyde)	28x28cm (E2-rygg)	30x36cm (E3-rygg)	38x30cm (Aktiv liten-rygg)
Tilt sitteenhet	3° forover, 9° bakover	3° forover, 9° bakover	3° forover, 9° bakover
Seterotasjon	Nei	Nei	Nei
Armlen (bredde x lengde)	9x25cm	9x25cm	9x25cm
Armlenehøyde fra setepute, justerbar	0-24cm	0-24cm	0-24cm
Understell (bredde x lengde)	55x55cm	55x55cm	55x55cm
Maks belastning	80kg	80kg	80kg

**Kjørebøyle**

Kjørebøylene gir hjelpere god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 46

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 47



Med elektrisk seteløft behøver ikke junior å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Sete

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv dyp b40xd49cm, grå	J771177920693	323731
Sete Aktiv ekstra liten b40xd40cm, grå	J773217920693	323729
Sete Aktiv liten b44xd44cm, grå	J773227920693	323732
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for mennesker i aktivitet. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.

Farge: grå

Velg Aktiv-setet:

Hvis du har gangfunksjon, men opplever tretthet, ubehag eller smerte ved langvarig stående.

Hvis du har balansevansker

Hvis du foretrekker å utføre daglige aktiviteter sittende.

Setet kan byttes uten bruk av verktøy.

Sete Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Contour liten b44xd44cm, grå	J774227959693	323733
Sete Contour medium b47xd47cm, grå	J774237959693	323735
Sete Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, grå	J774247959693	323738

Setet er designet for brukere med et stort behov for å sitte i mange timer daglig, og derfor trenger mer avlastning. Setet kompensere for fysiologiske forhold som kan oppstå ved langvarig sittestilling, slik som trykk, smerter og ubehag. Midten av setet utgjør et basseng med kaldskum Pantera, en mykere skum med høy tetthet. Kantene på bassenget er skrå og sikrer jevn vektfordeling. Formålet med bassenget er å avlaste sitteknoklene bilateralt.

Bak på setet er det utformet en liten fordybning i halebensområdet. Denne fordybningen gir en trykkavlastende effekt som lindrer eventuelle ubehag i dette området når man sitter. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben.

Farge: grå

Velg Contour-setet:

Hvis du har et stort behov for å sitte.

Hvis du ønsker å forebygge uhensiktsmessig trykk i seteregionen, nær sitteknokler og haleben i sittende stilling.

Hvis du ønsker en høyere grad av mykhet i setet.

Kan byttes uten bruk av verktøy.

Sete Coxit



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete coxit liten b40xd47cm, grå	J929364	323730
Sete coxit stor b47xd47cm, grå	J929369	323736

Sittedelen kan justeres og tilpasses den enkelte bruker og situasjonen.

Klaffene kan justeres individuelt og gir mulighet for å sitte med åpen hoftvinkel, noe som er en fordel for brukere med for eksempel nedsatt bevegelighet i hoftene, samt brukere som har stive ben eller er benamputerte. Farge: grå
Kan byttes uten bruk av verktøy.

Plansete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten b40xd48cm	J771407911052	323660
Medium b45xd48cm	J771417911052	323661
Stor b50xd48cm	J771427911052	323662

Plansete for bruk av annen pute. Farge: svart.
Kan byttes uten bruk av verktøy.



Trekk & skruer

Setetrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinenstrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Aktiv dyp b40xd-49cm	J46T1117521	323768		inko Aktiv dyp b40xd49cm	J46T4117571	323746
	Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T1321521	323767		inko Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T4321571	323745
	Aktiv liten b44xd-44cm	J46T1322521	323769		inko Aktiv liten b44xd44cm	J46T4322571	323747
	Aktiv medium b47xd47cm	J46T1323521	323771		inko Aktiv medium b47xd47cm	J46T4323571	323750
	Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T1324521	323773		inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50	J46T4324571	323752

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Setetrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinenstrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Setetrekk Contour liten b44xd44cm	J46T2422521	323770		inko Contour liten b44xd-44cm	J46T5422571	323748
	Setetrekk Contour medium b47xd47cm	J46T2423521	323772		inko Contour medium b47xd47cm	J46T5423571	323749
	Setetrekk Contour stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T2424521	323774		inko Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, sort	J46T5424571	323751

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Montering av sete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Mont sett f avtagelig sete	J102015	323638

4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.



Elektrisk tilt

Se mulighet for elektrisk tilt her:



Rygg

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv ekstra liten b38xh22cm, grå	J08A15120693	323683
Rygg Aktiv liten b38xh30cm, grå	J08A25120693	323684
Rygg Aktiv medium b40xh40cm, grå	J08A35120693	323686
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm, grå	J08A45120693	323687
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal stilling for utførelsen av aktiviteter.

Farge: grå

Velg Aktiv-ryggstøtte hvis du trenger ryggstøtte, men ikke ønsker å begrense den sittende mobiliteten.

Rygg Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Contour liten b36xh38cm, grå	J08B25122693	323682
Rygg Contour medium b39xh43cm, grå	J08B35122693	323685
Rygg Contour stor/ekstra stor b41xh48cm, grå	J08B45122693	323690

Denne ryggstøtten er laget for sittende aktivitet, hvor det er behov for støtte for å stabilisere kroppen og opprettholde den posturale kontrollen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er fullstøpt i skum med sideputer, som har til hensikt å sikre optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og livet. Ved brysthøyde avtar sideputen for å gi bevegelsesfrihet rundt skulderleddene og armene. Ryggstøtten stabiliserer uten å fiksere.

Farge: grå

Velg Contour-ryggstøtte:

Hvis du har et stort behov for ryggstøtte i sittende stilling.

Hvis du har tendens til å falle over til en av sidene

Hvis du opplever tretthet i ryggmuskulaturen.

Hvis du opplever stabilitets- og balanseproblemer.

Rygg Support



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm, grå	J08255111693	323692
Rygg Support stor m luftpute b43xh46cm, grå	J08335158693	323691

Support-ryggstøtten er godt polstret og har innebygde sidestøtter. De innebygde sidestøtter støtter fra hoften og opp til under armhulen, og gir støtte i sittestillingen samtidig som de veileder brukeren til midtlinjen. Support-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å gi mest mulig støtte i sittestillingen. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å opprettholde oppreist stilling eller blir trett i løpet av dagen. Du må måle brukerens ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til den indre ryggbredden på Support-ryggstøtten (maks. 28 cm).

Farge: grå



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg ALB



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm hø betj, grå	J08U27612693	323667
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm ve betj, grå	J08U37612693	323668
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm hø betj, grå	J08U47612693	323669
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm ve betj, grå	J08U57612693	323670
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm hø betj, grå	J08U67612693	323671
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm ve betj, grå	J08U77612693	323672

ALB-ryggstøtten er en unik ryggstøtte med todelt støtte for rygg og korsrygg. Ryggstøtten gir optimal støtte for korsryggen og bekkenet, støtter den naturlige korsryggsvaien og fremmer en oppreist holdning, noe som kan bidra til å forebygge eller lindre ryggsmerten. Korsryggstøtten kan enkelt justeres frem og tilbake trinnløst via et grep, noe som gir mulighet for variasjon og støtte i korsryggen. Øvre del av ryggen beholder derimot sin vinkel i forhold til setet, slik at brukeren også sikres støtte i den øvre delen av ryggen. Tilgjengelig i tre størrelser
Farge: grå

Planrygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Planrygg m hook velcro b40xh48cm	J08V15160693	323689

Planrygg for bruk af annen pute. Farge: grå.

Ryggbøyle, komplett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
lengde 24cm	J929068	323705
lengde 31cm	J929069	323707
lengde 24cm m vinkel	J929070	323706
Ryggstang ALB	J929071	323708

Ryggbøyle komplett med monteringskit.

Nakkestøtte


J413105391



J4131E1591

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b25xh12cm	J413103167	323654
stor b26xh-13cm	J413105391	323655
liten m fleksibel pute h8cm	J4131E1591	323656

Nakkestøtte i svart skinn.

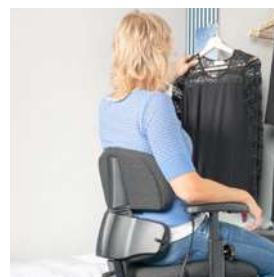

Elektrisk ryggvinkel

Se mulighet for elektrisk ryggvinkel her:

Side 37



Armlen

Armlen 9x30cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026304003	323411		Lav, høyre	J1026305003	323438
	Lav, venstre	J1116304003	323413		Lav, venstre	J1116305003	323441
	Høy, høyre	J1026404003	323415		Høy, høyre	J1026405003	323444
	Høy, venstre	J1116404003	323417		Høy, venstre	J1116405003	323448
Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.				For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.			
Armlen 9x25cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x25cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026335003	323403		Lav, høyre	J1026334003	323420
	Lav, venstre	J1116335003	323405		Lav, venstre	J1116334003	323424
	Høy, høyre	J1026435003	323407		Høy, høyre	J1026434003	323430
	Høy, venstre	J1116435003	323409		Høy, venstre	J1116434003	323433
Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.				Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.			
Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026359003	323421		Lav, høyre	J1026360003	323437
	Lav, venstre	J1116359003	323425		Lav, venstre	J1116360003	323440
	Høy, høyre	J1026459003	323429		Høy, høyre	J1026460003	323443
	Høy, venstre	J1116459003	323434		Høy, venstre	J1116460003	323447
For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.				For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.			
Armlen 10x32cm Combi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 10x37m Combi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026329167	323384		Lav, høyre	J1026326167	323388
	Lav, venstre	J1116329167	323385		Lav, venstre	J1116326167	323389
	Høy, høyre	J1026429167	323386		Høy, høyre	J1026426167	323419
	Høy, venstre	J1116429167	323387		Høy, venstre	J1116426167	323390
Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.				Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.			
Armlen 8x26cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Håndskruer	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026331003	323395		M8x20mm	J928606	323940
	Lav, venstre	J1116331003	323397		Vingskruer M8x20mm for armlenehøyde og -bredde.		
	Høy, høyre	J1026431003	323399				
	Høy, venstre	J1116431003	323401				
Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.							



Armlen

Armlen, nedfellbar 9x30cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026604003	323412
Lav, venstre	J1116604003	323414
Høy, høyre	J1026704003	323416
Høy, venstre	J1116704003	323418

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026605003	323439
Lav, venstre	J1116605003	323442
Høy, høyre	J1026705003	323446
Høy, venstre	J1116705003	323450

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026635003	323404
Lav, venstre	J1116635003	323406
Høy, høyre	J1026735003	323408
Høy, venstre	J1116735003	323410

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026634003	323422
Lav, venstre	J1116634003	323426
Høy, høyre	J1026734003	323431
Høy, venstre	J1116734003	323435

Kortere nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026659003	323423
Lav, venstre	J1116659003	323427
Høy, høyre	J1026759003	323432
Høy, venstre	J1116759003	323436

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026660003	I/A
Lav, venstre	J1116660003	323428
Høy, høyre	J1026760003	323445
Høy, venstre	J1116760003	323449

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 8x26cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026631003	323396
Lav, venstre	J1116631003	323398
Høy, høyre	J1026731003	323400
Høy, venstre	J1116731003	323402

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, traub 10x42cm skålformet Combiarmlen



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026328167	323391
Lav, venstre	J1116328167	323392
Høy, høyre	J1026428167	323393
Høy, venstre	J1116428167	323394

Ett polstret armlen som gir støtte for underarmen/albu. En fordel for brukere med behov for at armstøtten holder armen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, hemiplegi 13x44cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	J1026558167	323451
Venstre side	J1116558167	323452

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleledd gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.







Holder for håndkontroll

Se holder for håndkontroll til montering på armlen her:



Sele, kroppsstøtte & sidestøtte

Hoftesele Y-sele	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hoftesele Pelvi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten br2,5xl127cm	J929010	323497		xtra liten br2,5xl120cm	J929013	323504
	medium br4xl140cm	J929011	323500		liten br4xl200cm	J929014	323496
	stor br4xl175cm	J929012	323503		medium br4xl205cm	J929015	323499
En 4-punkts hoftesele med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit			stor br4xl205cm		J929016	323502	
<p>Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren sklir frem i setet. Med monteringskit</p>							
Brystsele H-sele Sternum	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Beskyttelseskappe f. Y-sele	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten l120cm	J929017	323495		Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633
	medium l135cm	J929018	323498		Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykkklås. Sikrer mot utilsikket åpning av selen.		
	stor l153cm	J929019	323501				
Brystsele Sternum med monteringskit.							
Sidestøtte buet pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidestøtte rett pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten sett, stenger 19,5cm	J929020	323811		rett pute sett, stenger 19,5cm	J929022	323813
	liten sett, stenger 22,5cm	J929046	323814		rett pute sett, stenger 22,5cm	J929048	323816
	stor sett, stenger 19,5cm	J929021	323812		Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. Merk: Husk monteringssett!		
	stor sett, stenger 22,5cm	J929047	323815		Merk: Husk monteringssett!		
Monteringskile for Supportrygg)				Monteringssett for sidestøtter			
Monteringskile for Supportrygg)	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Monteringssett for sidestøtter	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	kile f montering, Support-rygg	J928405	323637		2stk l:15cm	J101001	323639
	Monteringskile for sidestøtte Support rygg				1stk l:15cm	J101080	323640
				Monteringssett for sidestøtte, lengde 15cm.			
Sidestøtte lår/hofte, sett stang 17,5cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidestøtte lår/hofte, sett stang 12,5cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten l11xb6,5cm	J58053052	323806		liten l11xb6,5cm	J58056052	323805
	stor 25xb7,5cm	J58054052	323810		stor l25xb7,5cm	J58057052	323809
	medium l19xb7,5cm	J58055052	323808		medium l19xb7,5cm	J58058052	323807
Sidestøtte med stang 17,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.				Sidestøtte med stang 12,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.			



Benstøtte, fotstøtte & sidestøtte

Benstøtte m. fast vinkel for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929355	323505
ve 67° kompl	J929356	323506

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte m. fast vinkel for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929357	323509
ve 67° kompl	J929358	323510

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte, vinkelstillbar for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929359	323507
ve 68°-7° kompl	J929360	323508

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Benstøtte, vinkelstillbar for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929361	323512
ve 68°-7° kompl	J929362	323511

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Fotstøtte, medium



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b33,5xd-25cm. lang: l31-46cm	J929349	323582
medium b33,5xd-25cm. kort: l26-36cm	J929350	323581

Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte, stor



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
stor b28,3xd27,5cm, lang: l31-46cm	J929347	323580
stor b28,3xd27,5cm, kort: l26-36cm	J929348	323579

Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
f hjul m dobbel hjulbane kompl	J928731	323584
standard type kompl	J928732	323585

Fotstøtte for å oppnå en god sittstilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittstilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

Fotstøtte, enkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Fotstøtte hø ve inkl feste	J928740	323583

Gir støtte i sittstilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittstilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

Amputasjonsstøtte for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929351	323340
Venstre side b16xh26cm	J929352	323341

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.

Amputasjonsstøtte for stol med el.høyderregulering











Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929353	323342
Venstre side b16xh26cm	J929354	323343

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.



Bremser, hjul, antitipp & tilbehør

Bremsestang	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hjulsett dobbel hjulbane	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	std. lengde 39cm	J929023	323529		Hjulsett 4hjul	J928736	323531
	regulerbar lengde 44-62cm	J929024	323530		Doble hjul med dobbel hjulbane som triller lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.		
	regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep	J929025	323531				
<p>Forlenger til bremsespak er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en brems med standard lengde.</p>							
Hjulsett komplett inkl brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsesett for 4 hjulsbrems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	2hjul + 2hjul m brems	J929006	323608		el-brems m mont kit	J929173	323524
	4hjul m brems	J929007	323610		manuell brems komplett kit	J928757	323528
	4hjul m el brems	J929008	323607		<p>Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbrems. 4-hjulsbremse sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.</p>		
Antitipp hjul	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Antitippbøyle	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	foran 2stk kompl	J929151	323350		Antitippbøyle kompl m. mont. kit	J929121	323347
	bak 2stk kompl	J929152	323349		<p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøyle monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p>		
	foran og bak 4stk kompl	J929153	323351				
<p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet. Antitipp hjul kan monteres foran og/eller bak på stolen og gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel til brukere med voldsomme bevegelser.</p>							
Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bord med feste nedfellbart	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	komplett m feste	J929345	323627		Bord b52xd40cm	J928749	323516
	<p>Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.</p>				Bord b60xd49cm	J928750	323517
				<p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p>			













Elektriske funksjoner

Se elektriske funksjoner på lift, tilt, rygg, brems, fremdrift og Utstigningshjelp her:

Side 37



Elektriske innstillingsmuligheter

<p>Seteløft 30cm</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seteløftmotor 30cm</td> <td>J929334</td> <td>323644</td> </tr> </tbody> </table> <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Seteløftmotor 30cm	J929334	323644	<p>Utstigningshjelp med el</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kompl m/30 cm motor</td> <td>J929332</td> <td>323936</td> </tr> <tr> <td>kompl m/20 cm motor</td> <td>J929344</td> <td>I/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alternativ løsning for å reise og sette sig. Utstigningshjelp gir sikkerhet og støtte når bruker reiser sig opp og setter sig i stolen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	kompl m/30 cm motor	J929332	323936	kompl m/20 cm motor	J929344	I/A			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Seteløftmotor 30cm	J929334	323644																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
kompl m/30 cm motor	J929332	323936																			
kompl m/20 cm motor	J929344	I/A																			
<p>Soft touch alternativ styring</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El løft soft touch hø ve front</td> <td>J929054</td> <td>323549</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El løft soft touch hø ve front	J929054	323549	<p>Håndkontroll alternativ styring</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>el løft i håndkontroll m. mont kit</td> <td>J929055</td> <td>323550</td> </tr> <tr> <td>Bryter 1 funksjon m jackhylse</td> <td>J924047</td> <td>323620</td> </tr> </tbody> </table> <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550	Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El løft soft touch hø ve front	J929054	323549																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550																			
Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620																			
<p>Elektrisk brems</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El brems u el boks</td> <td>J929053</td> <td>323556</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk brems for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El brems u el boks	J929053	323556	<p>Elektrisk setetilt</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El tilt u el boks</td> <td>J929051</td> <td>323558</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setetilt gir bruker god aktiv sittestilling, tilbaketent gir god støtte ved hvile i stolen. For stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El tilt u el boks	J929051	323558						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El brems u el boks	J929053	323556																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El tilt u el boks	J929051	323558																			
<p>elektrisk ryggvinkel</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El rygg u el boks</td> <td>J929052</td> <td>323557</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El rygg u el boks	J929052	323557	<p>Fremdriftshjelp, elektrisk</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fremdriftshjelp</td> <td>J929339</td> <td>323586</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fremdriftshjelp for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Fremdriftshjelp	J929339	323586						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
El rygg u el boks	J929052	323557																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Fremdriftshjelp	J929339	323586																			
<p>Holder for håndkontroll</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holder f håndkontroll kompl</td> <td>J928899</td> <td>323616</td> </tr> </tbody> </table> <p>Holder for håndkontroll, komplett for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616	<p>El boks</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f mont i 2 armlen</td> <td>J929049</td> <td>323551</td> </tr> <tr> <td>f mont i håndkontroll</td> <td>J929050</td> <td>323552</td> </tr> <tr> <td>inkl oppreisningshjelp f mont i håndkontroll</td> <td>J929124</td> <td>323553</td> </tr> </tbody> </table> <p>Boks for elektriske funksjoner for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	f mont i 2 armlen	J929049	323551	f mont i håndkontroll	J929050	323552	inkl oppreisningshjelp f mont i håndkontroll	J929124	323553
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616																			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																			
f mont i 2 armlen	J929049	323551																			
f mont i håndkontroll	J929050	323552																			
inkl oppreisningshjelp f mont i håndkontroll	J929124	323553																			



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.
Farge: grå

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.
Farge: grå

Inkontinestrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
inko XXX b58xd48cm, sort	J46406664	323753
inko 4XL b72xd50cm, sort	J46477664	323754
inko Aktiv medium b47xd47cm, sort	J46T4323571	323750
inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort	J46T4324571	323752

Et løst, vannett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Kjørehåndtak	J926350	323625

Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.



Bremsepedal

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Bremsepedal hø	J922982	323522

Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.





Sete

Sete avrundet sadel

Beskrivelse

Art.nr.

HMS art.nr.

Sete avrundet sadel 100/Delta b46xd35cm, sort

J06180712692

323744

Et kort, ergonomisk buet sadelsete, som støtter og stabiliserer brukeren.



Sete sykkel-sadel

Beskrivelse

Art.nr.

HMS art.nr.

Sete sykkel-sadel 120/Midi b40xd35cm, sort

J06190720692

323740

Et ergonomisk, buet sykkel-sadelsete med utskjæring i forkant, som gir brukeren støtte og god plass til lårene.



Sete ridesadel

Beskrivelse

Art.nr.

HMS art.nr.

Sete ride Sadel b43xd35cm, sort

J06164520692

323741

Sete ride Sadel liten b39xd30cm, sort

J06384520692

323739

Ridesadelsetets utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling. Det mindre ridesadelsetes utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling, men i mindre grad enn et standard sadelsete. Lite ridesadelsete kan fås som alternativ



Sete avrundet m. forhøyning

Beskrivelse

Art.nr.

HMS art.nr.

110/Kap b46xd35cm, sort

J06420712692

323743

Et kort sadelsete med en forhøyning (bue) foran på setet, slik at brukeren unngår følelsen av å gli ned fra setet når det vippes fremover.

Komfort sete
bred-kort setedybde

Beskrivelse

Art.nr.

HMS art.nr.

S150 b46xd32cm, sort

J06170745692

323742

Et komfortabelt sete som har en tykk og absorberende kjerne. Setet er kort og gir god plass til ben og sikrer god blodtilførsel til ben og føtter.





Trekk & rygg

Setetrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk ride Sadel sete liten b39xd30cm, sort	J46138666	323775
Setetrekk sete S150 b46xd32cm, sort	J46217666	323781
Setetrekk sete 100/Delta b46xd35cm, sort	J46218666	323783
Setetrekk sete 120/Midi b40xd35cm, sort	J46219666	323777
Setetrekk sete 110/KAP b46xd35cm, sort	J46242666	323784
Setetrekk sete side Sadel b43xd35cm, sort	J46B16666	323780

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinestrekk



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete ride Sadel, sort	J46416664	323779
Setetrekk inko sete S150 bredkort, sort	J46417664	323782
Setetrekk inko sete ride Sadel liten, sort	J46438664	323776
Setetrekk inko sete 100/Delta sadel, sort	J46518664	323785
Setetrekk inko sete 120/Midi sykkel, sort	J46519664	323778
Setetrekk inko sete 110/Delta forhøyet, sort	J46542664	323786

Et løst, vannnett inkontinestrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Rygg rektangulær S150

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
b22xh29cm	J08325147692	323693



En smal ryggpute med ergonomisk bue som gir fri bevegelse i rygg, skuldre og armer. Ryggputen gir god sittekomfort ved langvarig aktivitet.

Rygg Aktiv

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Aktiv ekstra liten b38xh22cm	J08A15120692	323695
Aktiv liten b38xh30cm	J08A25120692	323696



En ergonomisk buet ryggpute som gir god korsryggstøtte. Ryggputen er lav og gir brukeren fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.

Monteringssett for rygg

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
mont sett, rygg	J101052	323643



Monteringssett for ryggbøyle.

Ryggtrekk

















Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
S150 b22xh29cm, sort	J47132666	323710
Aktiv ekstra liten b38xh22cm, sort	J471A1666	323711
Aktiv liten b38xh30cm, sort	J471A2666	323712



Løst varetrekk til ryggpute som er hygienisk, komfortabelt og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Armlen, gassfjær, brems & fotring

Armlen 8x26cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlenesett komplett m pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Hø side h31cm	J1024331003	323453		f ridesadelsete	J925801	323466
	Ve side h31cm	J1024431003	323455		f sete Midi/120	J928599	323467
	Hø side h31cm	J1114331003	323454		Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Svart m. P.U.-pute (8x26cm).		
	Ve side h41cm	J1114431003	323456				
Armlenebunn Midi/sykkelsadelsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidefeste	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Midi/ 120 sykkelsete	J927018	323470		Sidefeste hø	J927960	323787
	Armlene-bunn med oppheng for armlene for sete Midi/120 sykkelsete. Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen.				Sidefeste ve	J927961	323788
						Sidestykke for armlene, svart For armlene-bunn.	
Håndskruer for høyderegulering	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Monteringssett for armlener	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm	J927009	323621		for ridesadelsete	J101093	323641
	Håndskruer for armlene.				for 120/ Midi sykkelsete	J101094	323642
						Monteringssett for armlene.	
Gassfjær med yttørør	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	15cm for sitte-høyde 45-60cm	J926894	323590		Bremsepedal hø	J925936	323523
	26cm for sitte-høyde 60-86cm	J926895	323592		T-grep m kule	J926877	323521
	20cm for sitte-høyde 50-70cm	J926896	323591		Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken. Plasseres på baksiden av stolen hvor bremsespaken er og betjenes ved å trykke den ned med foten.		
						T-bremsehåndtaket forlenger bremsen slik at det er lettere å nå bremsen.	
Fotring oppfellbar understell u/hjul	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Antitippbøyle	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Fotring oppellbar understell u/hjul	J927319	323572		kompl m mont kit	J926970	323348
	En oppfellbar fotring gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen, og kan felles bort når den ikke brukes. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt.				Antitippbøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.		



Sete & trekk

Sete Junior E med/uten forhøyet kap



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete junior E2 liten b32xd35cm	J06484940583	323721
Sete junior E3 medium b36xd43cm	J06494940583	323725
Sete junior E4 stor b40xd47cm	J06504940583	323728
Sete junior E2 forhøyet kap b32xd35cm	J06B34940583	323720
Sete junior E3 forhøyet kap b36xd43cm	J06B44940583	323724
Sete junior E4 forhøyet kap b40xd47cm	J06B54940583	323727

Det gir lett støtte langs låret, noe som støtter brukers sittestilling. Bakerst på setet er det en utskåret "basseng" med to utskiftbare skumplater, som gjør det enkelt å endre mykheten, støtten og sittestøtten, slik at brukeren oppnår riktig avlastning og optimal stabilitet i sittende stilling. Dette setet kan anbefales hvis brukeren kan sitte selv uten støtte, samt ved lett behov for støtte i sittestillingen. Setet med forhøyet kap anbefales hvis brukeren trenger lett hjelp til å holde bena separat eller hvis brukeren har en tendens til å gli fremover i setet.. Farge: svart

Sete opph. side MD



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete opph side front MD35 b35xd40cm	J06934912220	323722
Sete opph side front MD36 b36xd36cm	J06954912220	323723
Sete opph side front MD40 b40xd44cm	J06964912220	323726

MD-setet er et polstret, konturert sete med innebygde kraftige sideputer foran som styrer plasseringen av bena. Seteputen har en fordykning bakerst, slik at brukers bekken havner lenger bak på setet. Setet er egnet for bruker som trenger hjelp til å styre bekket og lårene, og har behov for å kunne føle en fysisk avgrensning - for eksempel brukere med muskeldystrofi eller cerebral parese.

Farge: svart

Setetrekk E-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk sete E2 b32xd35cm	J46148583	323755
Setetrekk sete E3 b36xd43cm	J46149583	323761
Setetrekk sete E4 b40xd47cm	J46150583	323765

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinensetrekk E-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete E2	J46448664	323756
Setetrekk inko sete E3	J46449664	323762
Setetrekk inko sete E4	J46450664	323766

Et løst, vanntett inkontinensetrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Setetrekk MD-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk sete MD35 b35xd40cm	J46293583	323757
Setetrekk sete MD36 b36xd36cm	J46295583	323759
Setetrekk sete MD40 b40xd40cm	J46296583	323763

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinensetrekk MD-sete



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Setetrekk inko sete MD35 b35xd40cm	J46593664	323758
Setetrekk inko sete MD36 b36xd36cm	J46595664	323760
Setetrekk inko sete MD40 b40xd40cm	J46596664	323764

Et løst, vanntett inkontinensetrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg junior E



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg junior E2 liten b26xh26cm	J08206822583	323674
Rygg junior E3 medium b28xh35cm	J08216822583	323675

E-ryggstøtten er en godt polstret ryggstøtte som gir en lett fjæring til ryggen og behagelig støtte spesielt egnet for brukere. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og låses i vinkel, slik at det oppnås mest mulig støtte og fri bevegelse i overkroppen - for en god, aktiv sittestilling. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren selv kan sitte stabilt og ikke trenger ekstra støtte - Kroppsstøtter og sele kan imidlertid legges til senere for mer støtte. Farge: svart

Rygg Support ES



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Support ES3 medium b32xh37cm innv b20cm	J08245111220	323677
Rygg Support ES4 stor b37xh43cm innv b24cm	J08225111220	323678
Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm	J08255111220	323681

ES-ryggen er godt polstret og har innebygde sidestøtter som støtter fra hoften og opp til under armhulen. Dette gir støtte i sittestillingen og leder brukeren til midtlinjen. ES-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å oppnå mest mulig støtte i sittestillingen. Det er også mulig å legge til nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å holde seg oppreist eller blir trett i løpet av dagen. Farge: svart

Du bør måle brukers ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til det innvendige ryggstøttemålet.

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv liten b38xh30cm	J08A25120583	323679
Rygg Aktiv stor/ ekstra stor b40xh48cm	J08A45120583	323680

Denne ryggstøtten tilbyr komfort og lett støtte, samt muligheten til å låse ryggen i en fast vinkel for bedre og mer optimal støtte til korsryggen. Stor/ekstra stor ryggstøtte har også mulighet for nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten for større juniorer som kan sitte selv uten behov for ekstra støtte eller sidestøtte. Farge: svart

Rygg ekstra støtte MD



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg ekstra støtte medium MD4 b30xh25cm	J08285113583	323676

MD4-rygg er en polstret og konturert lav rygg. Puten er buet og gir god støtte for brukeren på sidene samtidig som lumbalstøtten blir god. Ryggputen kan låses i ønsket vinkel. Ryggputen er egnet for brukere med for eksempel muskeldystrofi eller ryggkifose. Farge: svart

Ryggbøyle



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
152cm med 5,4cm vinkel m mont kit	J929259	323700
152cm med 10,3cm vinkel m mont kit	J929260	323699
142cm med 5,4cm vinkel m mont kit	J929278	323698

Ryggbøyle med regulerbar vinkel til ryggputer med låsbar vinkeljustering. Med monteringskit.

Nakkestøtte











Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
liten b17,5xh9cm	J410301391	323653

Nakkestøtte i svart skinn.












Armlen

Armlen 9x25cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x25cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Høyre h31cm	J1026835003	323360		Høyre h31cm	J1026834003	323361
	Venstre h31cm	J1116835003	323363		Venstre h31cm	J1116834003	323364
	Høyre h41cm	J1026935003	323366		Høyre h41cm	J1026934003	323367
	Venstre h41cm	J1116935003	323369		Venstre h41cm	J1116934003	323370
<p>Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p>				<p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p>			
Armlen 9x30cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Høyre h31cm	J1026804003	323372		Høyre h31cm	J1026805003	323374
	Venstre h31cm	J1116804003	323375		Venstre h31cm	J1116805003	323377
	Høyre h41cm	J1026904003	323378		Høyre h41cm	J1026905003	323380
	Venstre h41cm	J1116904003	323381		Venstre h41cm	J1116905003	323383
<p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p>				<p>Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p>			
Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Høyre h31cm	J1026859003	323362		Høyre h31cm	J1026860003	323373
	Venstre h31cm	J1116859003	323365		Venstre h31cm	J1116860003	323376
	Høyre h41cm	J1026959003	323368		Høyre h41cm	J1026960003	323379
	Venstre h41cm	J1116959003	323371		Venstre h41cm	J1116960003	323382
<p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p>				<p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p>			
Armlen 6x21cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 8x26cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Høyre h31cm	J1026809003	323352		Høyre h31cm	J1026831003	323356
	Venstre h31cm	J1116809003	323353		Venstre h31cm	J1116831003	323357
	Høyre h41cm	J1026909003	323354		Høyre h41cm	J1026931003	323358
	Venstre h41cm	J1116909003	323355		Venstre h41cm	J1116931003	323359
<p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p>				<p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p>			













Sele & fotstøtte

Hoftesele Y-sele med trykklås	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hoftesele Y-sele med klemlås	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str liten kompl	J929262	323491		str liten kompl	J929263	323481
	str medium kompl	J929264	323492		str medium kompl	J929265	323482
	str stor kompl	J929266	323493		str stor kompl	J929267	323483
<p>En 4-punkts hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.</p>				<p>En 4-punkts hoftesele med klemlås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.</p>			
Hoftesele Pelvi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Brystsele H-sele Sternum	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	str xtra liten kompl	J929268	323494		str liten kompl	J929272	323485
	str liten kompl	J929269	323486		str medium kompl	J929273	323487
	str medium kompl	J929270	323488		str stor kompl	J929274	323489
	str stor kompl	J929271	323490		<p>Brystsele Sternum komplett med monteringskit.</p>		
<p>Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at gli frem i setet. Med monteringskit.</p>							
Hoftesele 115cm med trykklås	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Beskyttelseskappe f. Y-sele	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	lengde 115cm trykklås kompl	J929331	323484		Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633
	<p>Hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Lengde 115cm, komplett</p>				<p>Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsiktet åpning av selen.</p>		
Fotstøtte, medium	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Fotstøtte, stor	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Fotstøtte plate medium stang l26-41cm 10°	J928209	323577		Fotstøtte plate stor stang l26-41cm 10°	J928098	323578
	Fotstøtte plate medi- um stang l21-31cm 10°	J928210	323574		Fotstøtte plate stor stang l21-31cm 10°	J928099	323575
<p>Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.</p>				<p>Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.</p>			
Fotstøtte	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.				
	standard type kompl	J928732	323585				
	<p>Fotstøtte for å oppnå en god sittstilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittstilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.</p>						









Støtte, kjørebøyle & bord

Sidestøtte buet pute, sett 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.	Sidestøtte rett pute, sett 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten sett, stenger 19,5cm	J929286	323799		rett pute sett, stenger 19,5cm	J929288	323803
	stor sett, stenger 19,5cm	J929287	323800		rett pute sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929293	323802
	liten sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929291	323801				
	stor sett f E2-rygg, stenger 19,5cm	J929292	323804				
Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Kan reguleres i h/d/b, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.				Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde.			
Sidestøtte, sett 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidestøtte lår/hofte, sett 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten l11xb6,5cm sett	J58018052	323793		liten l11xb6,5cm	J58042052	323794
	medium l19xb7,5cm sett	J58019052	323795		medium l19xb7,5cm	J58043052	323796
	stor l25xb7,5cm sett	J58020052	323797		stor 25xb7,5cm	J58044052	323798
Sidestøtte i svart skai. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.				Sidestøtte med stang 12,5x3cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.			
Stang for sidestøtte for Support-rygg 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.	Monteringskile for Support-rygg 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	buet, b2cmxl19,5cm	J928372	323889		kile f montering, Support-rygg	J928405	323637
	buet b2cmxl22,5cm	J928373	323890				
	buet b4,5xl22,5cm	J928374	323891				
	rett l20,8cm	J928597	323892				
Stang for sidestøtte for sidestøtte Support-rygg				Monteringskile for sidestøtte Support-rygg			
Abduksjonskloss 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Ankelbelte 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	d11xb8xh6cm	J58050052	323336		liten, kompl	J929275	323344
	d11xb9xh9cm	J58051052	323337		medium, kompl	J929276	323345
	d14xb12xh6cm	J58052052	323335		stor, kompl	J929277	323346
Abduksjonskloss i svart skai. Monteres under sete på setets front og hjelper bruker i sittestillingen.				Hjelper bruker med å sitte med føttene på fotplaten og gir støtte i sittestillingen.			
Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bord med feste nedfellbart 	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Kjørebøyle regulerbar kompl	J928257	323626		Bord b52xd40cm kompl m mont kit	J929279	323515
Kjørebøylen gir hjelpere god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.				Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.			



Hjul, brems & elektrisk styring

Hjulsett dobbel hjulbane	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsesett for 4 hjulsbrems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Hjulsett 4hjul	J928736	323609		el-brems m mont kit	J929173	323524
	Doble hjul med dobbel hjulbane som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.				manuell brems komplett kit	J928757	323528
					Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbrems. 4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.		
Hjulsett komplett inkl brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Elektrisk brems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	4hjul m el brems	J929008	323607		mont i armlen	J929254	323554
	4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.				med håndkontroll	J929261	323555
					Elektrisk brems sett betjening for stoler med elektrisk høydeinnstilling.		
Soft touch alternativ styring	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Håndkontroll alternativ styring	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	El løft soft touch hø ve front	J929054	323549		el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550
	Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.				Håndkontroll for elektrisk lift.		



Kvalifisert rådgivning og rask service

RÅDGIVNING

En del av kjernekompetansen hos VELA er rådgivning og bistand med utprøving hos brukeren. Vi bistår terapeuten i å finne stolen som dekker den enkelte brukers behov. Du sikrer at brukeren hjelpes med riktig produkt i forhold til funksjonsnedsettelse.

Vi setter brukeren i sentrum og rådgir for å finne den beste løsningen.

Vi er selvsagt alltid klare til å gi råd og veiledning via telefon, e-post og chat.

RASK RESPONSTID

Service er en av våre andre kjernekompetanser i VELA. Vi har egne serviceteknikere og samarbeidspartnere over hele landet. Vi har kort responstid på service, reparasjoner og ombygging, og arbeidet kan ofte utføres hos brukeren slik at bruker ikke må være uten stolen sin.

