

www.vermundlarsen.no

VELA arbeidsstoler og ståstoler

Ergonomiske stoler og tilbehør
for junior, voksne og høy vekt

Komfort, sikkerhet og ergonomi i fokus

VELA stoler er utviklet for mennesker med behov for stabile og trygge sittestillinger, så aktivitetsnivå og selvhjulpenhet kan bevares. Brukere av stolene kan ha funksjonsnedsettelse og begrenset mobilitet. VELA stoler bidrar til å gjøre en aktiv hverdag lettere.





Stoler på avtale

VELA Tango 700ELF Aktiv
Delkontrakt 3



Side 10

VELA Tango 700EL Aktiv
Delkontrakt 3



Side 13

VELA Tango 700EL Contour/Support
Delkontrakt 4



Side 14

VELA Tango 700F Aktiv
Delkontrakt 1



Side 16

VELA Tango 700 Aktiv
Delkontrakt 1



Side 19

VELA Tango 700 Contour/Support
Delkontrakt 2



Side 20

VELA Tango 300/310ELF Aktiv Ekstra Stor
Delkontrakt 5



Side 22

VELA Salsa Ståstoler
Delkontrakt 7



Side 25

VELA Tango 600EL Aktiv Junior
Delkontrakt 10



Side 26

Les mer om:

Slik fungerer en
VELA-stol

Side 4

Nye VELA-stoler
på avtale

Side 6

Nye seter & rygger

Side 8

Tilbehørslister

Side 28



Slik fungerer en VELA-stol

VELA Tango 700EL

Arbeidsstol - Voksen



Se produktark [Side 10-21](#)

VELA Salsa 120

Ståstol - Voksen



Se produktark [Side 25](#)



Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i



VL1935.dk/finnstol



Nye VELA-stoler på avtale

Opp till 300 kg

NY

PÅ AVTALE

VELA Tango 300ELF

VELA Tango 310ELF

Arbeidsstol - opptil 200kg

Arbeidsstol - opptil 300kg

FORSTERKET RYGGBØYLE, SOM
KAN LÅSES I EN FAST VINKEL FOR
OPTIMAL STØTTE

STABIL STØTTE FRA SETE
OG RYGG FOR EN GOD
SITTEKOMFORT

STABILE OG ROBUSTE ARMLENER ER
TIL HJELP NÅR BRUKER REISER SEG
OG SETTER SEG NED BRUKER KAN
SKYVE FRA PÅ ARMLENET MED FULL
VEKT

STORE KNAPPER FOR ELEKTRISK
HØYDEJUSTERING, SOM ER
TYDELIG MERKET OG ENKLE Å NÅ
FOR BRUKER

ROBUST OG SIKKER STOL UTVIKLET
TIL VELDIG HØY BRUKERVEKT

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR BRUKER STOR MOBILITET
OG MULIGHET TIL Å KOMME SEG
RUNDT SITTEDE I STOLEN



Se produktark

Side 22





Nye VELA-stoler på avtale

Arbeidsstol
for junior
NY
PÅ AVTALE

VELA Tango 600EL

Arbeidsstol - Junior

MULIGHET FOR Å VELGE ULIKE SETER
OG RYGGER FOR Å OPPNÅ OPTIMAL
SITTEKOMFORT FOR BRUKEREN

SETETILT OG RYGGVINKEL GIR GOD
MULIGHET FOR EN VARIERT OG AKTIV
SITTESTILLING

RYGGBØYLE, SOM KAN LÅSES I EN
FAST VINKEL FOR OPTIMAL STØTTE

ARMLENER GIR GOD STØTTE NÅR
BRUKER SITTER I STOLEN, ELLER
NÅR BRUKER SKAL REISE SEG OG
SETTE SEG MED MINIMUM AV HJELP

STORE HÅNDTAK SOM ER TYDELIG
MERKET OG ENKLE Å NÅ FOR BRUKER
OG HJELPER

JUSTERBAR FOTPLATE GIR
MULIGHETER FOR HENSIKTMESSIG
OG TRYGG PLASSERING AV FØTTENE

SENTRALBREMS GIR GOD
STABILITET OG GJØR DET SIKKERT Å
STIGE INN OG UT AV STOLEN

STORE LETTRULLENDE HJUL
GIR MOBILITET OG MULIGHET
TIL Å FLYTTE PÅ STOLEN MED
BRUKEREN SITTENDE



Se produktark [Side 26](#)



VELA Tango 700-serien tar ergonomisk sittekomfort i aktive arbeidsstoler til et nytt nivå.

Velg mellom to serier av seter og ryggstøtter: "Aktiv" og "Contour". Begge seriene fås i størrelsene liten, medium og stor; hvor setets oppbygning og støtte er tilpasset brukers høyde og vekt. Begge setetyper har avrundet forkant slik at man kan bevege seg rundt ved å "gå" stolen frem.

Aktiv-serien:

Standard sete for den aktive personen med normalt sittebehov:

- 
Aktivitet og økt behov for å sitte
 Rettes mot den aktive brukeren som ønsker en balanse mellom komfort og lett støtte.
- 
Laget for mennesker i bevegelse
 Med sine runde former og omfavnende fasong utgjør Aktiv-setet en solid base for både kortvarig og langvarig stabil sittestilling for mennesker i bevegelse.
- 
Neste stilling er den beste
 Setet og ryggstøtten gir lett og fleksibel støtte, noe som er ideelt for brukere som beveger seg fritt og kan endre sin sittestilling selv.
- 
Stabil støtte med fri bevegelse
 Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både under hvile og aktivitet, samtidig som den gir bevegelsesfrihet for skuldre og armer.

Contour-serien:

Avansert sete med ekstra støtte og avlastning:


- 
Økt støtte og komfort
 Dette gir økt støtte og komfort til brukere som trenger støtte, avlastning og mykere sittestøtte.
- 
Fantastisk trykkfordeling
 Setet er sammensatt av ulike skumtyper som støtter og fordeler vekten, slik at risikoen for uheldig trykk i seteregionen nær sitteknokler og haleben reduseres.
- 
Lindrer trykk, smerter og ubehag
 De skrånende kantene og fordyppingene i setet hjelper med å lindre trykk, smerter og ubehag. Dette er en fordel hvis man tilbringer mye tid i sittende stilling.
- 
Ekstra støtte i rygg
 Ryggstøtten har kiler i sidene som gir optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og midjen, uten å gå på kompromiss med rygglenets komfort og mykhet.





Hvilken størrelse bør jeg velge?

Vi har utarbeidet denne enkle størrelsesguiden, som kan hjelpe når du skal velge setestørrelse for den enkelte bruker.

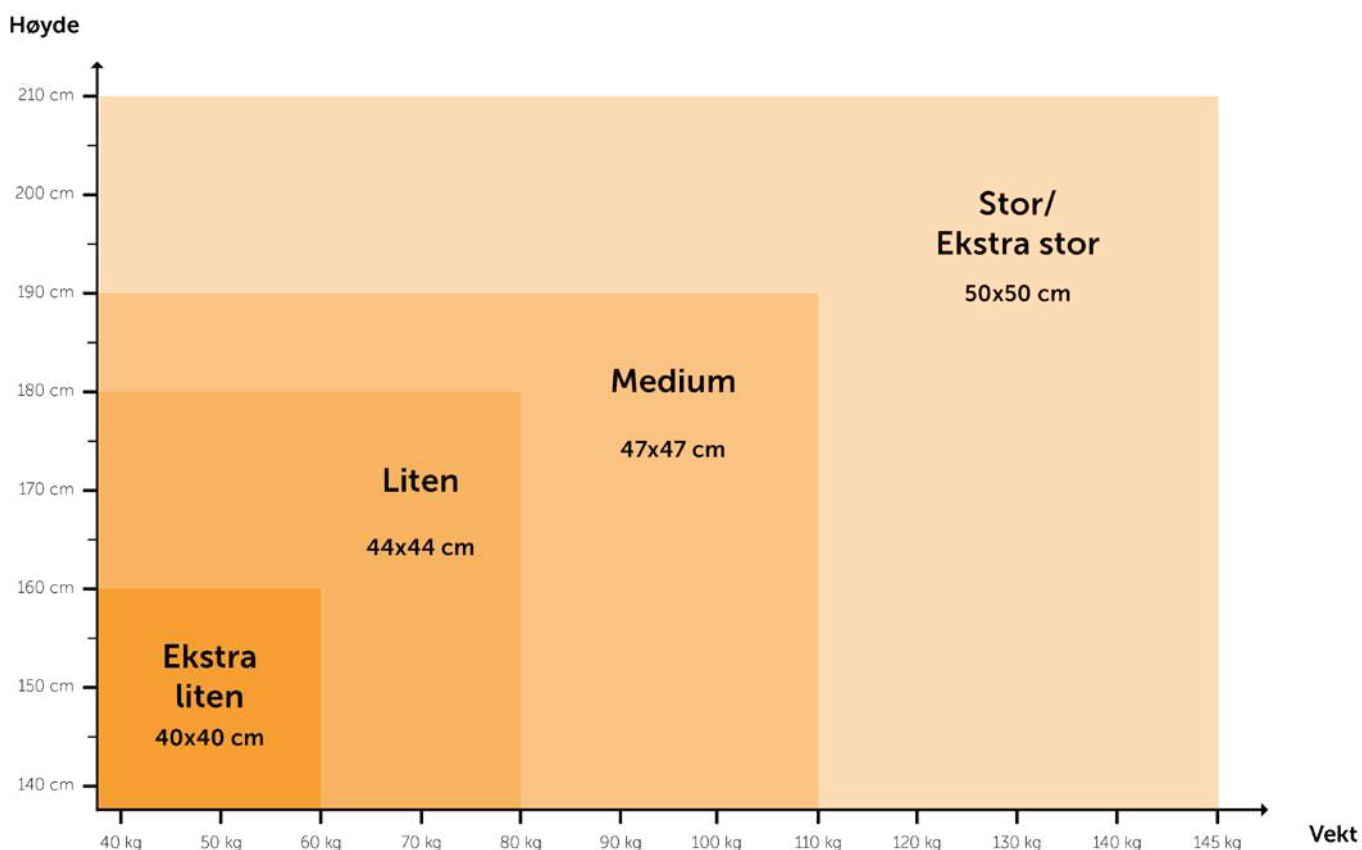

Merk: Hvis bruker er betydelig bredere enn sin høyde, kan det være nødvendig å velge en større størrelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du er usikker på hva du skal velge.

Se alle våre seter og rygger med HMS art.nr og mål i tilbehørskataloget fra side 28.



Visste du at: VELA Tango 700-serien er designet slik at setene kan byttes uten bruk av verktøy.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700ELF Aktiv Liten

VELA Tango 700ELF Aktiv Medium

VELA Tango 700ELF Aktiv Stor

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 |
| VELA Art. nr. | J71011-10 | J71011-11 | J71011-12 |
| HMS Art. nr. | 323913 | 323914 | 323915 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 41-61cm | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm(Aktiv Liten) (HMS.nr: 323732) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
| Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Nei | Nei | Nei |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg | 160kg |

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. Merk: laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36

Nyhet: Utstigningshjelp til VELA-stoler med elektrisk seteløft



Få økt sikkerhet og støtte ved forflytning til og fra stolen


VELA Tango 700EL og VELA Tango 700ELF kan nå fås med utstigningshjelp. Funksjonen har et brukervennlig design og flere elektriske innstillinger som bidrar til økt selvstendighet både hjemme og på jobb.

- ✓ Stolens elektriske funksjoner gjør at stolen alltid kan justeres skånsomt, trinnløst og uten bruk av krefter.
- ✓ Én knapp aktiverer brems, seteløft og setetilt
- ✓ Brukeren får hjelp til enkelt og trygt å komme opp i stående stilling



vela.my/utstigning

Les mer på side 37

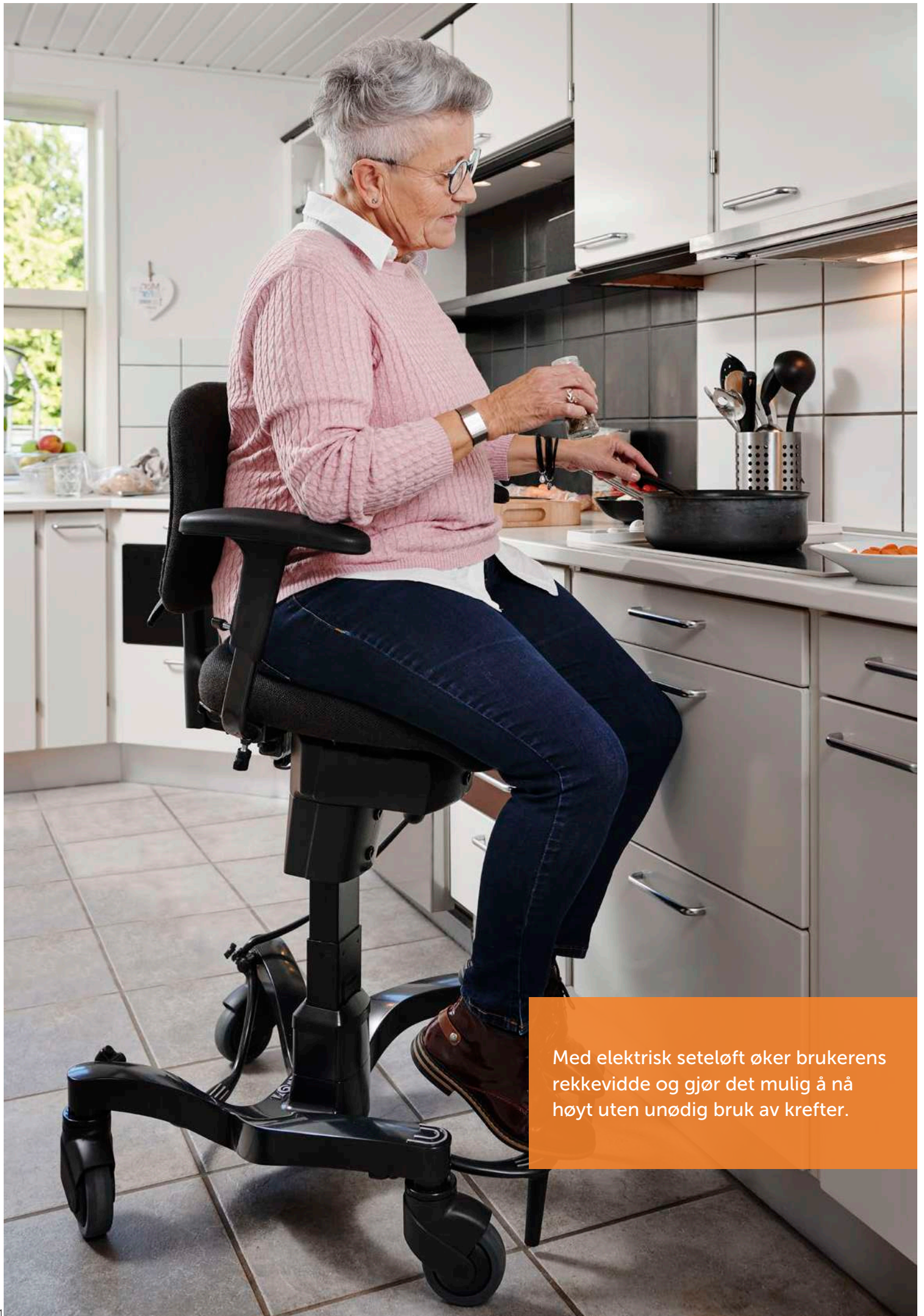

Med elektrisk seteløft øker brukerens rekkevidde og gjør det mulig å nå høyt uten unødig bruk av krefter.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700EL Aktiv Liten

VELA Tango 700EL Aktiv Medium


VELA Tango 700EL Aktiv Stor

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 | Delkontrakt 3 |
| VELA Art. nr. | J71011-13 | J71011-14 | J71011-15 |
| HMS Art. nr. | 323906 | 323907 | 323908 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 41-61cm | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
| Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg | 160kg |

**Fremdriftshjelp**

Mennesker som ikke har tilstrekkelig styrke i beina til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag, kan supplere kreftene sine med fremdriftshjelp når det er nødvendig.

Side 37

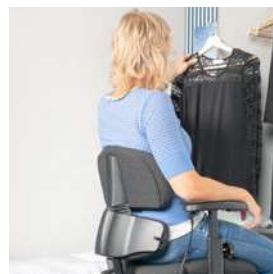**Aktiv rygg - ALB**

Optimal støtte til korsrygg og bekken, som støtter korsryggens naturlige krumning og fremmer en god holdning.

Side 31



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700EL Contour Medium



VELA Tango 700EL Contour Stor

Spesifikasjoner for:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 4 | Delkontrakt 4 |
| VELA Art. nr. | J71011-16 | J71011-17 |
| HMS Art. nr. | 323909 | 323910 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 42x44cm (Contour Medium) | 44x51cm (Contour Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg |

**30cm løftemotor**

Gjør det lettere for brukeren å nå høyt opp, da setehøyde og dermed rekkevidde økes med 10 cm. Merk: laveste setehøyde økes 5 cm

Side 37

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36



Arbeidsstoler med elektrisk seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700EL Support Medium



VELA Tango 700EL Support Stor

Spesifikasjoner for:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 4 | Delkontrakt 4 |
| VELA Art. nr. | J71011-18 | J71011-19 |
| HMS Art. nr. | 323911 | 323912 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 41-61cm | 41-61cm |
| Intervallregulering (5 trin) | 41-68cm | 41-68cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 44x44cm (Support) | 44x44cm (Support) |
| Indre mål (bredde) | opp til 28cm | opp til 28cm |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra settepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg |

**Utstigningshjelp**

Én knapp aktiverer brems, seteløft, rygglen og setetilt, slik at brukeren enkelt og trygt kan komme opp i stående stilling.

Side 37

**Kjørebøyle**

Kjørebøylene gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 36



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700F Aktiv Liten

VELA Tango 700F Aktiv Medium

VELA Tango 700F Aktiv Stor

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 |
| VELA Art. nr. | J71001-10 | J71001-11 | J71001-12 |
| HMS Art. nr. | 323916 | 323917 | 323918 |
| Seteløft | Manuell | Manuell | Manuell |
| Setehøyde std. (15cm) | 43-58cm | 43-58cm | 43-58cm |
| Intervalregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm | 43-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
| Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Nei | Nei | Nei |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg | 160kg |

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påkledning.

Side 33


**4-hjuls brems**


Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 36

Fremdriftshjelp

Fremdriftshjelpen er en assistansemotor som hjelper brukeren med å opprettholde sin mobilitet på en trygg måte når kreftene begynner å avta.

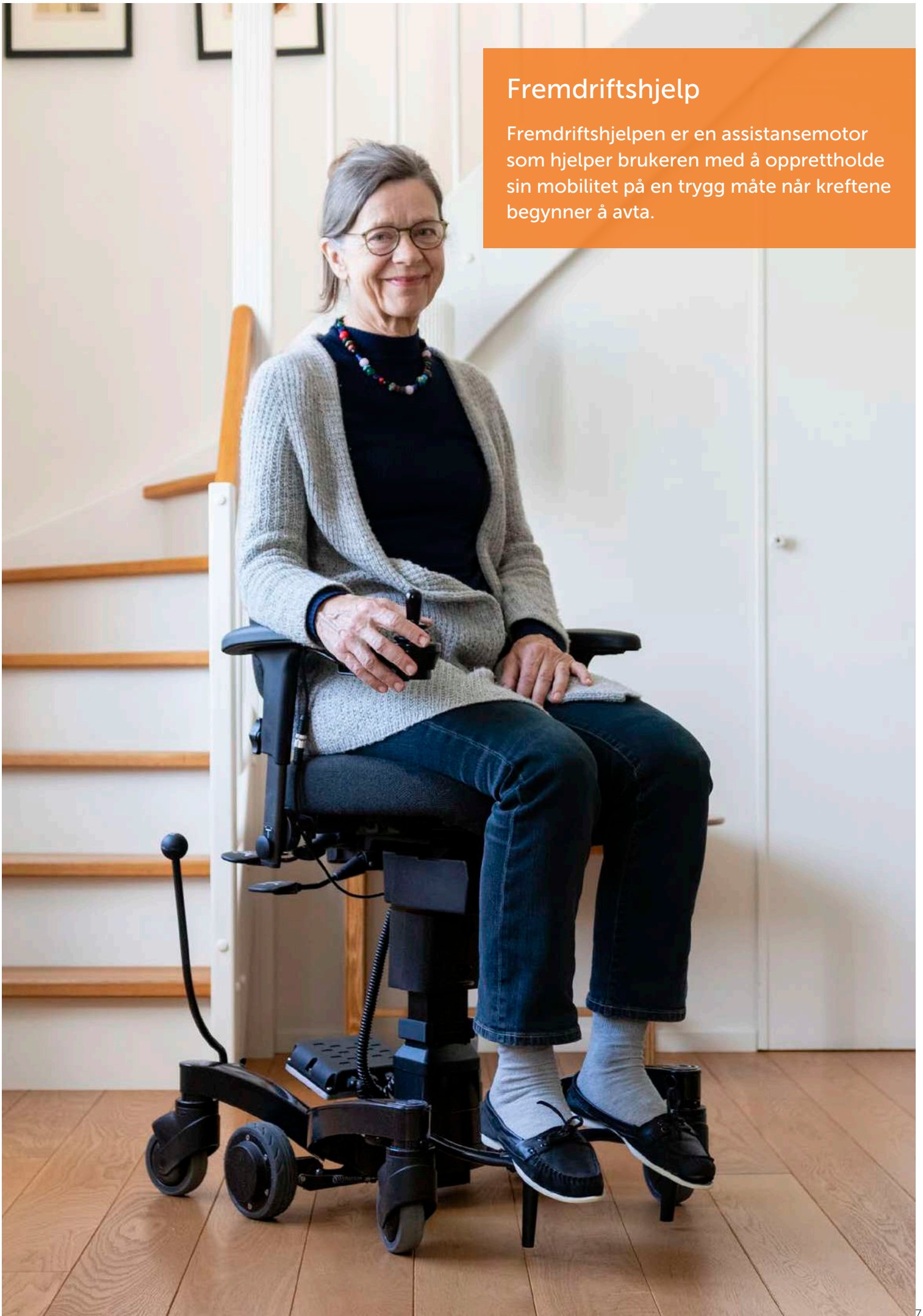

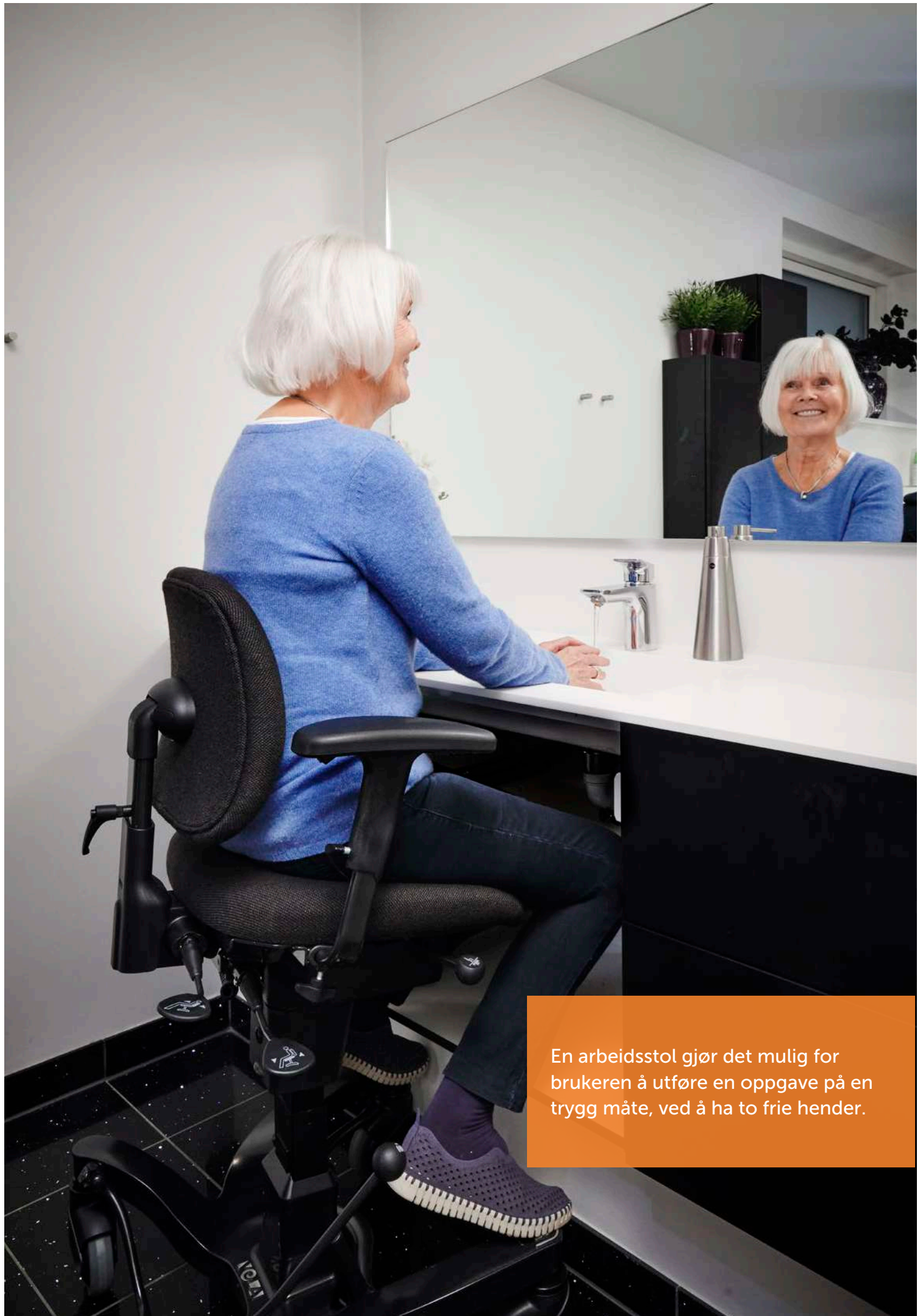

En arbeidsstol gjør det mulig for brukeren å utføre en oppgave på en trygg måte, ved å ha to frie hender.



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
Seterotasjon

Spesifikasjoner for:

VELA Tango 700 Aktiv Liten

VELA Tango 700 Aktiv Medium

VELA Tango 700 Aktiv Stor

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 | Delkontrakt 1 |
| VELA Art. nr. | J71001-13 | J71001-14 | J71001-15 |
| HMS Art. nr. | 323899 | 323900 | 323901 |
| Seteløft | Manuell | Manuell | Manuell |
| Setehøyde std. (15cm) | 43-58cm | 43-58cm | 43-58cm |
| Intervalregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm | 43-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 44x44cm (Aktiv Liten) | 47x47cm (Aktiv Medium) | 50x50cm (Aktiv Stor) |
| Setedybde (min-max) | 31-46cm | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x32cm (Aktiv Liten) | 43x42cm (Aktiv Medium) | 43x50cm (Aktiv Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg | 160kg |

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



VL1935.dk/finnstol



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Contour Medium



VELA Tango 700 Contour Stor

Spesifikasjoner for:

| Delkontraktnr. | Delkontrakt 2 | Delkontrakt 2 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VELA Art. nr. | J71001-16 | J71001-17 |
| HMS Art. nr. | 323902 | 323903 |
| Seteløft | Manuell | Manuell |
| Setehøyde std. (15cm) | 43-58cm | 43-58cm |
| Intervalregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 42x44cm (Contour Medium) | 44x51cm (Contour Stor) |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg |

Skal jeg velge manuelt eller elektrisk seteløft?

Manuelt seteløft høydeinnstilles med gassfjær, og er spesielt godt egnet til brukere som kan reise og sette seg selv, f.eks. ved å skyve fra på armlenet.

Elektrisk seteløft hever og senker trinnløst via elektrisk høydeinnstilling i armlenet, slik at brukere med nedsatt kraft eller bevegelighet kan reise og sette seg uten problemer og unngå smertefulle støt.

Prøv vår stolguide

Svar på fem korte spørsmål og vi anbefaler den stolen som vi synes man bør ta utgangspunkt i.



[VL1935.dk/finnstol](https://www.vela.com/finnstol)



Arbeidsstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon,
høy rygg og
nakkestøtte



VELA Tango 700 Support Medium



VELA Tango 700 Support Stor

Spesifikasjoner for:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 2 | Delkontrakt 2 |
| VELA Art. nr. | J71001-18 | J71001-19 |
| HMS Art. nr. | 323904 | 323905 |
| Seteløft | Manuell | Manuell |
| Setehøyde std. (15cm) | 43-58cm | 43-58cm |
| Intervallregulering (4 trin) | 43-63cm | 43-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 47x47cm (Contour Medium) | 50x50cm (Contour Stor) |
| Setedybde (min-max) | 36-51cm | 39-54cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 44x44cm (Support) | 44x44cm (Support) |
| Indre mål (bredde) | opp til 28cm | opp til 28cm |
| Tilt sitteenhet | 10° forover, 15° bakover | 10° forover, 15° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x30cm | 9x30cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 14-25cm | 14-25cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 160kg | 160kg |

**Nedfellbare armlener**

En fordel hvis brukeren skal forflytte seg sidelengs til annen stol eller seng, og ved behov for mer plass ved f.eks påkledning.

Side 33

**Setetrekk**

God beskyttelse mod slitasje, fuktighet og smuss. Overtrekket kan tas av og vaskes i vaskemaskin.

Side 29



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 300ELF Aktiv Ekstra Stor

VELA Tango 310ELF Aktiv Ekstra Stor HD

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Delkontraktnr. | Delkontrakt 5 | Delkontrakt 5 |
| VELA Art. nr. | J5105-10 | J5106-10 |
| HMS Art. nr. | 323894 | 323895 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (15cm) | 44-59cm | 44-59cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 61x52cm (XXX-sete) | 73x51cm (4XL-sete) |
| Setedybde (min-max) | 46-56cm | 46-56cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 41x43cm (CX-rygg) | 41x43cm (CX-rygg) |
| Tilt sitteenhet | Nei | Nei |
| Seterotasjon | Nei | Nei |
| Armlen (bredde x lengde) | 7x35cm | 7x35cm |
| Armlenehøyde fra sittepute, justerbar | 0-24cm | 0-24cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm |
| Største utvendige bredde | 68cm | 84cm |
| Maks belastning | 200kg | 300kg |

**Bremsepedal**


Bremsepedalen kan brukes som alternativ for bremsepedalen. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes ved å trykke bremsepedalen ned med foten.

Side 38

**Kjørebøyle**

Kjørebøyle gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen.

Side 38

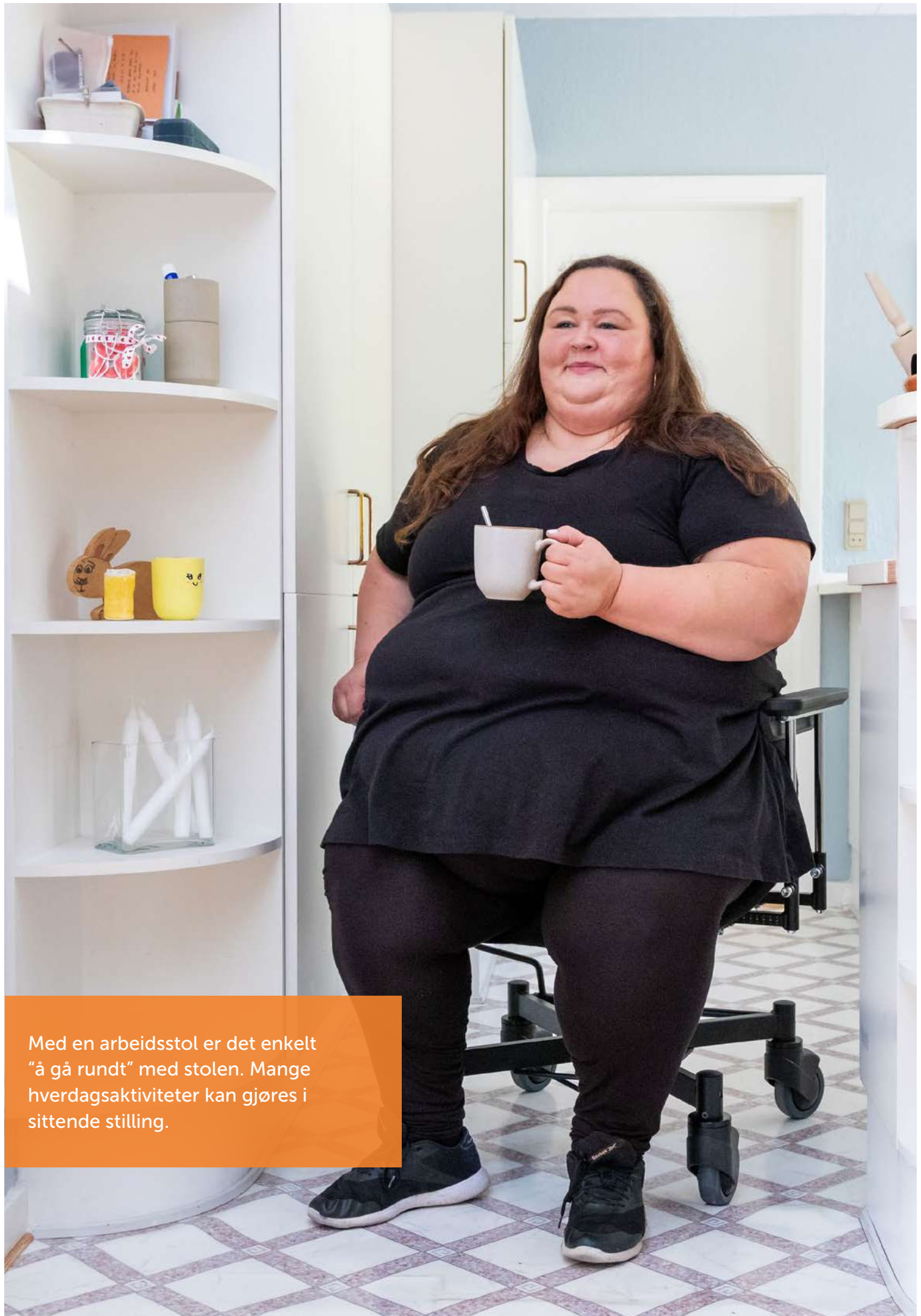

Med en arbeidsstol er det enkelt "å gå rundt" med stolen. Mange hverdagsaktiviteter kan gjøres i sittende stilling.



Med elektrisk seteløft behøver ikke brukeren å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Ståstoler med manuelt seteløft

Med
seterotasjon
og
sentralbrems



Spesifikasjoner for:

VELA Salsa 100 sete avrundet front

VELA Salsa 120 sykkelsete

VELA Salsa 400 ridesadelsete

| Delkontraktnr. | Delkontrakt 7 | Delkontrakt 7 | Delkontrakt 7 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| VELA Art. nr. | J4113-10 | J4112-10 | J4130-10 |
| HMS Art. nr. | 323919 | 323920 | 323921 |
| Seteløft | Manuell | Manuell | Manuell |
| Setehøyde std. (15cm) | 58-84cm | 57-83cm | 59-85cm |
| Intervalregulering (6 trin) | 50-86cm | 49-85cm | 51-87cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 46x35cm (Sete avrundet front) | 40x35cm (Sykkelsete) | 42x34cm (Ridesadelsete) |
| Setedybde (min-max) | 28-35cm | 28-35cm | 28-35cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 38x23cm (Ergo-rygg) | 38x23cm (Ergo-rygg) | 38x23cm (Ergo-rygg) |
| Tilt sitteenhet | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover | 7° forover, 7° bakover |
| Seterotasjon | Ja, med lås | Ja, med lås | Ja, med lås |
| Armlen (bredde x lengde) | 8x26cm | 8x26cm | 8x26cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 0-24cm | 0-24cm | 0-24cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 125kg | 125kg | 125kg |

Alle tre VELA Salsa-modellene har korte seter, slik at du enkelt kan komme tett inntil aktivitetene som skal utføres.



Vi anbefaler **VELA Salsa 100** for brukere som trenger lett støtte i stående stilling, og god støtte i sittende stilling.



Vi anbefaler **VELA Salsa 120** for brukere som ønsker mest mulig støtte i setet ved åpen hoftevinkel



Vi anbefaler **VELA Salsa 400** for brukere som ønsker en åpen hoftevinkel med føttene i god avstand fra hverandre.



Spesifikasjoner for:

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Liten

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Medium

VELA Tango 600EL Aktiv Junior Stor

| Delkontraktnr. | Delkontrakt 10 | Delkontrakt 10 | Delkontrakt 10 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| VELA Art. nr. | J61013-10 | J61013-11 | J61013-12 |
| HMS Art. nr. | 323896 | 323897 | 323898 |
| Seteløft | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Setehøyde std. (20cm) | 43-63cm | 43-63cm | 43-63cm |
| Intervalregulering (5 trin) | 40-63cm | 40-63cm | 40-63cm |
| Setepute (bredde x dybde) | 32x36cm (E2-sete) | 38x42cm (E3-sete) | 41x47cm (E4-sete) |
| Setedybde (min-max) | 30-35cm | 35-43cm | 39-49cm |
| Ryggpute (bredde x høyde) | 28x28cm (E2-rygg) | 30x36cm (E3-rygg) | 38x30cm (Aktiv liten-rygg) |
| Tilt sitteenhet | 3° forover, 9° bakover | 3° forover, 9° bakover | 3° forover, 9° bakover |
| Seterotasjon | Nei | Nei | Nei |
| Armlen (bredde x lengde) | 9x25cm | 9x25cm | 9x25cm |
| Armlenehøyde fra setepute, justerbar | 0-24cm | 0-24cm | 0-24cm |
| Understell (bredde x lengde) | 55x55cm | 55x55cm | 55x55cm |
| Maks belastning | 80kg | 80kg | 80kg |

**Kjørebøyle**

Kjørebøylene gir hjelpere god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen, og kan innstilles så den passer den som skyver stolen.

Side 46

**4-hjuls brems**

Gir en ekstra stabil stol, som er spesielt egnet til brukere som sitter urolig, eller hvis stolen skal stå på et ujevnt underlag.

Side 47



Med elektrisk seteløft behøver ikke junior å bruke krefter på å justere stolens setehøyde, men kan i stedet bruke energien på hverdagsaktiviteter.



Sete

Sete Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|---------------|-------------|
| Sete Aktiv dyp b40xd49cm, grå | J771177920693 | 323731 |
| Sete Aktiv ekstra liten b40xd40cm, grå | J773217920693 | 323729 |
| Sete Aktiv liten b44xd44cm, grå* | J773227920693 | 323732 |
| Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå* | J773237920693 | 323734 |
| Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå* | J773247920693 | 323737 |

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for mennesker i aktivitet. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate. Farge: grå

Velg Aktiv-setet:

Hvis du har gangfunksjon, men opplever tretthet, ubehag eller smerte ved langvarig stående.

Hvis du har balansevansker

Hvis du foretrekker å utføre daglige aktiviteter sittende.

Setet kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Sete Contour



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|---------------|-------------|
| Sete Contour liten b44xd44cm, grå | J774227959693 | 323733 |
| Sete Contour medium b47xd47cm, grå* | J774237959693 | 323735 |
| Sete Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, grå* | J774247959693 | 323738 |

Setet er designet for brukere med et stort behov for å sitte i mange timer daglig, og derfor trenger mer avlastning. Setet kompensere for fysiologiske forhold som kan oppstå ved langvarig sittstilling, slik som trykk, smerter og ubehag. Midten av setet utgjør et basseng med kaldskum Pantera, en mykere skum med høy tetthet. Kantene på bassenget er skrå og sikrer jevn vektfordeling. Formålet med bassenget er å avlaste sitteknoklene bilateralt.

Bak på setet er det utformet en liten fordybning i halebensområdet. Denne fordybningen gir en trykkavlastende effekt som lindrer eventuelle ubehag i dette området når man sitter. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben. Farge: grå

Velg Contour-setet:

Hvis du har et stort behov for å sitte.

Hvis du ønsker å forebygge uhensiktsmessig trykk i seteregionen, nær sitteknokler og haleben i sittende stilling.

Hvis du ønsker en høyere grad av mykhet i setet.

Kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Contour & Support sitteenhet**

Sete Coxit



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------|---------|-------------|
| Sete coxit liten b40xd47cm, grå | J929364 | 323730 |
| Sete coxit stor b47xd47cm, grå | J929369 | 323736 |

Sittedelen kan justeres og tilpasses den enkelte bruker og situasjonen.

Klaffene kan justeres individuelt og gir mulighet for å sitte med åpen hoftevinkel, noe som er en fordel for brukere med for eksempel nedsatt bevegelighet i hoftene, samt brukere som har stive ben eller er benamputerte. Farge: grå
Kan byttes uten bruk av verktøy.

Plansete



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------|---------------|-------------|
| Liten b40xd48cm | J771407911052 | 323660 |
| Medium b45xd48cm | J771417911052 | 323661 |
| Stor b50xd48cm | J771427911052 | 323662 |

Plansete for bruk av annen pute. Farge: svart.
Kan byttes uten bruk av verktøy.



Trekk & skruer

| Setetrekk Aktivsete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Inkontinenstrekk Aktivsete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
|  | Aktiv dyp b40xd-49cm | J46T1117521 | 323768 |  | inko Aktiv dyp b40xd49cm | J46T4117571 | 323746 |
| | Aktiv ekstra liten b40xd40cm | J46T1321521 | 323767 | | inko Aktiv ekstra liten b40xd40cm | J46T4321571 | 323745 |
| | Aktiv liten b44xd-44cm | J46T1322521 | 323769 | | inko Aktiv liten b44xd44cm | J46T4322571 | 323747 |
| | Aktiv medium b47xd47cm | J46T1323521 | 323771 | | inko Aktiv medium b47xd47cm | J46T4323571 | 323750 |
| | Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm | J46T1324521 | 323773 | | inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50 | J46T4324571 | 323752 |

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

| Setetrekk Contoursete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Inkontinenstrekk Contoursete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
|  | Setetrekk Contour liten b44xd44cm | J46T2422521 | 323770 |  | inko Contour liten b44xd-44cm | J46T5422571 | 323748 |
| | Setetrekk Contour medium b47xd47cm | J46T2423521 | 323772 | | inko Contour medium b47xd47cm | J46T5423571 | 323749 |
| | Setetrekk Contour stor/ekstra stor b50xd50cm | J46T2424521 | 323774 | | inko Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, sort | J46T5424571 | 323751 |

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

| Montering av sete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|----------------------------|---------|-------------|
|  | Mont sett f avtagelig sete | J102015 | 323638 |

4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.



Elektrisk tilt

Se mulighet for elektrisk tilt her.



Rygg

Rygg Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--------------|-------------|
| Rygg Aktiv ekstra liten b38xh22cm, grå | J08A15120693 | 323683 |
| Rygg Aktiv liten b38xh30cm, grå* | J08A25120693 | 323684 |
| Rygg Aktiv medium b40xh40cm, grå* | J08A35120693 | 323686 |
| Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm, grå* | J08A45120693 | 323687 |
| Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå | J08A55120693 | 323688 |

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal stilling for utførelsen av aktiviteter.

Farge: grå

Velg Aktiv-ryggstøtte hvis du trenger ryggstøtte, men ikke ønsker å begrense den sittende mobiliteten.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Rygg Contour



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--------------|-------------|
| Rygg Contour liten b36xh38cm, grå | J08B25122693 | 323682 |
| Rygg Contour medium b39xh43cm, grå* | J08B35122693 | 323685 |
| Rygg Contour stor/ekstra stor b41xh48cm, grå* | J08B45122693 | 323690 |

Denne ryggstøtten er laget for sittende aktivitet, hvor det er behov for støtte for å stabilisere kroppen og opprettholde den posturale kontrollen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er fullstøpt i skum med sideputer, som har til hensikt å sikre optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og livet. Ved brysthøyde avtar sideputen for å gi bevegelsesfrihet rundt skulderleddene og armene. Ryggstøtten stabiliserer uten å fiksere. Farge: grå

Velg Contour-ryggstøtte:

Hvis du har et stort behov for ryggstøtte i sittende stilling.

Hvis du har tendens til å falle over til en av sidene

Hvis du opplever tretthet i ryggmuskulaturen.

Hvis du opplever stabilitets- og balanseproblemer.

***Standard på stoler med Contour sitteenhet**

Rygg Support



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm, grå* | J08255111693 | 323692 |
| Rygg Support stor m luftpute b43xh46cm, grå | J08335158693 | 323691 |


Support-ryggstøtten er godt polstret og har innebygde sidestøtter. De innebygde sidestøtter støtter fra hoften og opp til under armhulen, og gir støtte i sittestillingen samtidig som de veileder brukeren til midtlinjen. Support-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å gi mest mulig støtte i sittestillingen. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å opprettholde oppreist stilling eller blir trett i løpet av dagen. Du må måle brukerens ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til den indre ryggbredden på Support-ryggstøtten (maks. 28 cm). Farge: grå

***Standard på stoler med Support sitteenhet**



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg ALB

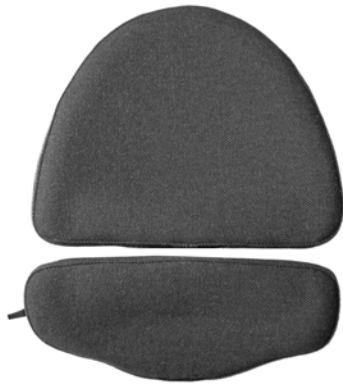

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm hø betj, grå | J08U27612693 | 323667 |
| Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm ve betj, grå | J08U37612693 | 323668 |
| Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm hø betj, grå | J08U47612693 | 323669 |
| Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm ve betj, grå | J08U57612693 | 323670 |
| Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm hø betj, grå | J08U67612693 | 323671 |
| Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm ve betj, grå | J08U77612693 | 323672 |

ALB-ryggstøtten er en unik ryggstøtte med todelt støtte for rygg og korsrygg. Ryggstøtten gir optimal støtte for korsryggen og bekkenet, støtter den naturlige korsryggsvaien og fremmer en oppreist holdning, noe som kan bidra til å forebygge eller lindre ryggsmerten. Korsryggstøtten kan enkelt justeres frem og tilbake trinnløst via et grep, noe som gir mulighet for variasjon og støtte i korsryggen. Øvre del av ryggen beholder derimot sin vinkel i forhold til setet, slik at brukeren også sikres støtte i den øvre delen av ryggen. Tilgjengelig i tre størrelser. Farge: grå

Planrygg



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Planrygg m hook velcro b40xh48cm | J08V15160693 | 323689 |

Planrygg for bruk af annen pute. Farge: grå.

Ryggbøyle, komplett



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------|---------|-------------|
| lengde 24cm | J929068 | 323705 |
| lengde 31cm | J929069 | 323707 |
| lengde 24cm m vinkel | J929070 | 323706 |
| Ryggstang ALB | J929071 | 323708 |

Ryggbøyle komplett med monteringskit.

Nakkestøtte

J413105391



J4131E1591

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------------|------------|-------------|
| medium b25xh12cm | J413103167 | 323654 |
| stor b26xh-13cm | J413105391 | 323655 |
| liten m fleksibel pute h8cm | J4131E1591 | 323656 |

Nakkestøtte i svart skinn.



Elektrisk ryggvinkel

Se mulighet for elektrisk ryggvinkel her:

Side 37



Armlen

| Armlen 9x30cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x30cm for elbetjening | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|----------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|
|  | Lav, høyre* | J1026304003 | 323411 |  | Lav, høyre* | J1026305003 | 323438 |
| | Lav, venstre* | J1116304003 | 323413 | | Lav, venstre* | J1116305003 | 323441 |
| | Høy, høyre** | J1026404003 | 323415 | | Høy, høyre** | J1026405003 | 323444 |
| | Høy, venstre** | J1116404003 | 323417 | | Høy, venstre** | J1116405003 | 323448 |
| <p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p> | | | | <p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">Standard på manuelle stoler. * Aktiv / **Contour & Support</p> | | | | | | | |
| Armlen 9x25cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x25cm for elbetjening | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Lav, høyre | J1026335003 | 323403 |  | Lav, høyre | J1026334003 | 323420 |
| | Lav, venstre | J1116335003 | 323405 | | Lav, venstre | J1116334003 | 323424 |
| | Høy, høyre | J1026435003 | 323407 | | Høy, høyre | J1026434003 | 323430 |
| | Høy, venstre | J1116435003 | 323409 | | Høy, venstre | J1116434003 | 323433 |
| <p>Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p> | | | | <p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p> | | | |
| Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Lav, høyre | J1026359003 | 323421 |  | Lav, høyre | J1026360003 | 323437 |
| | Lav, venstre | J1116359003 | 323425 | | Lav, venstre | J1116360003 | 323440 |
| | Høy, høyre | J1026459003 | 323429 | | Høy, høyre | J1026460003 | 323443 |
| | Høy, venstre | J1116459003 | 323434 | | Høy, venstre | J1116460003 | 323447 |
| <p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p> | | | | <p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p> | | | |
| Armlen 10x32cm Combi | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 10x37m Combi | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Lav, høyre | J1026329167 | 323384 |  | Lav, høyre | J1026326167 | 323388 |
| | Lav, venstre | J1116329167 | 323385 | | Lav, venstre | J1116326167 | 323389 |
| | Høy, høyre | J1026429167 | 323386 | | Høy, høyre | J1026426167 | 323419 |
| | Høy, venstre | J1116429167 | 323387 | | Høy, venstre | J1116426167 | 323390 |
| <p>Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p> | | | | <p>Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p> | | | |
| Armlen 8x26cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Håndskruer | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Lav, høyre | J1026331003 | 323395 |  | M8x20mm | J928606 | 323940 |
| | Lav, venstre | J1116331003 | 323397 | | Vingskruer M8x20mm for armlenehøyde og -bredde. | | |
| | Høy, høyre | J1026431003 | 323399 | | | | |
| | Høy, venstre | J1116431003 | 323401 | | | | |
| <p>Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p> | | | | | | | |



Armlen

Armlen, nedfellbar 9x30cm



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026604003 | 323412 |
| Lav, venstre | J1116604003 | 323414 |
| Høy, høyre | J1026704003 | 323416 |
| Høy, venstre | J1116704003 | 323418 |

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026605003 | 323439 |
| Lav, venstre | J1116605003 | 323442 |
| Høy, høyre | J1026705003 | 323446 |
| Høy, venstre | J1116705003 | 323450 |

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026635003 | 323404 |
| Lav, venstre | J1116635003 | 323406 |
| Høy, høyre | J1026735003 | 323408 |
| Høy, venstre | J1116735003 | 323410 |

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026634003 | 323422 |
| Lav, venstre | J1116634003 | 323426 |
| Høy, høyre | J1026734003 | 323431 |
| Høy, venstre | J1116734003 | 323435 |

Kortere nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening Soft touch



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026659003 | 323423 |
| Lav, venstre | J1116659003 | 323427 |
| Høy, høyre | J1026759003 | 323432 |
| Høy, venstre | J1116759003 | 323436 |

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening Soft touch



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026660003 | I/A |
| Lav, venstre | J1116660003 | 323428 |
| Høy, høyre | J1026760003 | 323445 |
| Høy, venstre | J1116760003 | 323449 |

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 8x26cm



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026631003 | 323396 |
| Lav, venstre | J1116631003 | 323398 |
| Høy, høyre | J1026731003 | 323400 |
| Høy, venstre | J1116731003 | 323402 |

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, traub 10x42cm skålformet Combiarmlen



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Lav, høyre | J1026328167 | 323391 |
| Lav, venstre | J1116328167 | 323392 |
| Høy, høyre | J1026428167 | 323393 |
| Høy, venstre | J1116428167 | 323394 |

Ett polstret armlen som gir støtte for underarmen/albu. En fordel for brukere med behov for at armstøtten holder armen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, hemiplegi 13x44cm



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|-------------|-------------|
| Høyre side | J1026558167 | 323451 |
| Venstre side | J1116558167 | 323452 |

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleledd gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.




Holder for håndkontroll

Se holder for håndkontroll til montering på armlen her:



Sele, kroppsstøtte & sidestøtte

| Hoftesele Y-sele | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Hoftesele Pelvi | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--|-----------|-----------------|--|--|-----------|-------------|
|  | liten br2,5xl127cm | J929010 | 323497 |  | xtra liten br2,5xl120cm | J929013 | 323504 |
| | medium br4xl140cm | J929011 | 323500 | | liten br4xl200cm | J929014 | 323496 |
| | stor br4xl175cm | J929012 | 323503 | | medium br4xl205cm | J929015 | 323499 |
| En 4-punkts hoftesele med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit | | | stor br4xl205cm | | J929016 | 323502 | |
| <p>Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren sklir frem i setet. Med monteringskit</p> | | | | | | | |
| Brystsele H-sele Sternum | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Beskyttelseskappe f. Y-sele | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | liten l120cm | J929017 | 323495 |  | Svart, 55x25x65 mm | J923615 | 323633 |
| | medium l135cm | J929018 | 323498 | | Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykkklås. Sikrer mot utilsikket åpning av selen. | | |
| | stor l153cm | J929019 | 323501 | | | | |
| Brystsele Sternum med monteringskit. | | | | | | | |
| Sidestøtte buet pute | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Sidestøtte rett pute | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | liten sett, stenger 19,5cm | J929020 | 323811 |  | rett pute sett, stenger 19,5cm | J929022 | 323813 |
| | liten sett, stenger 22,5cm | J929046 | 323814 | | rett pute sett, stenger 22,5cm | J929048 | 323816 |
| | stor sett, stenger 19,5cm | J929021 | 323812 | | Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. Merk: Husk monteringssett! | | |
| | stor sett, stenger 22,5cm | J929047 | 323815 | | Merk: Husk monteringssett! | | |
| Monteringskile for Supportrygg) | | | | Monteringssett for sidestøtter | | | |
| Monteringskile for Supportrygg) | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Monteringssett for sidestøtter | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | kile f montering, Support-rygg | J928405 | 323637 |  | 2stk l:15cm | J101001 | 323639 |
| | Monteringskile for sidestøtte Support rygg | | | | 1stk l:15cm | J101080 | 323640 |
| | | | | Monteringssett for sidestøtte, lengde 15cm. | | | |
| Sidestøtte lår/hofte, sett stang 17,5cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Sidestøtte lår/hofte, sett stang 12,5cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | liten l11xb6,5cm | J58053052 | 323806 |  | liten l11xb6,5cm | J58056052 | 323805 |
| | stor 25xb7,5cm | J58054052 | 323810 | | stor l25xb7,5cm | J58057052 | 323809 |
| | medium l19xb7,5cm | J58055052 | 323808 | | medium l19xb7,5cm | J58058052 | 323807 |
| Sidestøtte med stang 17,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen. | | | | Sidestøtte med stang 12,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen. | | | |



Benstøtte, fotstøtte & sidestøtte

Benstøtte m. fast vinkel for manuell stol



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| hø 67° kompl | J929355 | 323505 |
| ve 67° kompl | J929356 | 323506 |

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte m. fast vinkel for stol med el.høyderregulering



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| hø 67° kompl | J929357 | 323509 |
| ve 67° kompl | J929358 | 323510 |

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte, vinkelstillbar for manuell stol



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|---------|-------------|
| hø 68°-7° kompl | J929359 | 323507 |
| ve 68°-7° kompl | J929360 | 323508 |

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Benstøtte, vinkelstillbar for stol med el.høyderregulering



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|---------|-------------|
| hø 68°-7° kompl | J929361 | 323512 |
| ve 68°-7° kompl | J929362 | 323511 |

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Fotstøtte, medium



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| medium b33,5xd-25cm. lang: l31-46cm | J929349 | 323582 |
| medium b33,5xd-25cm. kort: l26-36cm | J929350 | 323581 |

Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte, stor



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|---------|-------------|
| stor b28,3xd27,5cm, lang: l31-46cm | J929347 | 323580 |
| stor b28,3xd27,5cm, kort: l26-36cm | J929348 | 323579 |

Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------------------------|---------|-------------|
| f hjul m dobbel hjulbane kompl | J928731 | 323584 |
| standard type kompl | J928732 | 323585 |

Fotstøtte for å oppnå en god sittestilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittestilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

Fotstøtte, enkel



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------|---------|-------------|
| Fotstøtte hø ve inkl feste | J928740 | 323583 |

Gir støtte i sittestilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittestilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

Amputasjonsstøtte for manuell stol



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| Høyre side b16xh26cm | J929351 | 323340 |
| Venstre side b16xh26cm | J929352 | 323341 |

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.

Amputasjonsstøtte for stol med el.høyderregulering











| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|---------|-------------|
| Høyre side b16xh26cm | J929353 | 323342 |
| Venstre side b16xh26cm | J929354 | 323343 |

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.



Bremser, hjul, antitipp & tilbehør

| Bremsestang | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Hjulsett dobbel hjulbane | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--|---------|-------------|--|--|---------|-------------|
|  | std. lengde 39cm | J929023 | 323529 |  | Hjulsett 4hjul | J928736 | 323609 |
| | regulerbar lengde 44-62cm | J929024 | 323530 | | Doble hjul med dobbel hjulbane som triller lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen. | | |
| | regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep | J929025 | 323531 | | | | |
| <p>Forlenger til bremsespak er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en brems med standard lengde.</p> | | | | | | | |
| Hjulsett komplett inkl brems | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Bremsesett for 4 hjulsbrems | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | 2hjul + 2hjul m brems | J929006 | 323608 |  | el-brems m mont kit | J929173 | 323524 |
| | 4hjul m brems | J929007 | 323610 | | manuell brems komplett kit | J928757 | 323528 |
| | 4hjul m el brems | J929008 | 323607 | | <p>Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbrems. 4-hjulsbremse sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.</p> | | |
| Antitipp hjul | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Antitippbøyle | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | foran 2stk kompl | J929151 | 323350 |  | Antitippbøyle kompl m. mont. kit | J929121 | 323347 |
| | bak 2stk kompl | J929152 | 323349 | | <p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøyle monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p> | | |
| | foran og bak 4stk kompl | J929153 | 323351 | | | | |
| <p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet. Antitipp hjul kan monteres foran og/eller bak på stolen og gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel til brukere med voldsomme bevegelser.</p> | | | | | | | |
| Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Bord med feste nedfellbart | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | komplett m feste | J929345 | 323627 |  | Bord b52xd40cm | J928749 | 323516 |
| | <p>Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.</p> | | | | Bord b60xd49cm | J928750 | 323517 |
| | | | | <p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p> | | | |













Elektriske funksjoner

Se elektriske funksjoner på lift, tilt, rygg, brems, fremdrift og Utstigningshjelp her:

Side 37



Elektriske innstillingsmuligheter

| <p>Seteløft 30cm</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seteløftmotor 30cm</td> <td>J929334</td> <td>323644</td> </tr> </tbody> </table> <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Seteløftmotor 30cm | J929334 | 323644 | <p>Utstigningshjelp med el</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kompl m/30 cm motor</td> <td>J929332</td> <td>323936</td> </tr> <tr> <td>kompl m/20 cm motor</td> <td>J929344</td> <td>I/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alternativ løsning for å reise og sette sig. Utstigningshjelp gir sikkerhet og støtte når bruker reiser sig opp og setter sig i stolen.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | kompl m/30 cm motor | J929332 | 323936 | kompl m/20 cm motor | J929344 | I/A | | | |
|--|---|-------------|---------|-------------|-------------------------------|---------|--------|--|---|-------------|--|---|------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|---------|--------|---|---------|--------|
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seteløftmotor 30cm | J929334 | 323644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompl m/30 cm motor | J929332 | 323936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompl m/20 cm motor | J929344 | I/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Soft touch alternativ styring</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El løft soft touch høve front</td> <td>J929054</td> <td>323549</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | El løft soft touch høve front | J929054 | 323549 | <p>Håndkontroll alternativ styring</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>el løft i håndkontroll m. mont kit</td> <td>J929055</td> <td>323550</td> </tr> <tr> <td>Bryter 1 funksjon m jackhylse</td> <td>J924047</td> <td>323620</td> </tr> </tbody> </table> <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | el løft i håndkontroll m. mont kit | J929055 | 323550 | Bryter 1 funksjon m jackhylse | J924047 | 323620 | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El løft soft touch høve front | J929054 | 323549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| el løft i håndkontroll m. mont kit | J929055 | 323550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bryter 1 funksjon m jackhylse | J924047 | 323620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Elektrisk brems</p> <p>J929675</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El brems u el boks</td> <td>J929676</td> <td>329599</td> </tr> <tr> <td>El brems kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929675</td> <td>330110</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk brems for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | El brems u el boks | J929676 | 329599 | El brems kompl m el boks inkl armlenpute | J929675 | 330110 | <p>Elektrisk setetilt</p> <p>J929669</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El tilt u el boks</td> <td>J929671</td> <td>329597</td> </tr> <tr> <td>El tilt kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929669</td> <td>330112</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setetilt gir bruker god aktiv sittestilling, tilbakelett gir god støtte ved hvile i stolen. For stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | El tilt u el boks | J929671 | 329597 | El tilt kompl m el boks inkl armlenpute | J929669 | 330112 |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El brems u el boks | J929676 | 329599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El brems kompl m el boks inkl armlenpute | J929675 | 330110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El tilt u el boks | J929671 | 329597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El tilt kompl m el boks inkl armlenpute | J929669 | 330112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>elektrisk ryggvinkel</p> <p>J929672</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El rygg u el boks</td> <td>J929674</td> <td>329598</td> </tr> <tr> <td>El rygg kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929672</td> <td>330111</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | El rygg u el boks | J929674 | 329598 | El rygg kompl m el boks inkl armlenpute | J929672 | 330111 | <p>Fremdriftshjelp, elektrisk</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fremdriftshjelp</td> <td>J929339</td> <td>323586</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fremdriftshjelp for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Fremdriftshjelp | J929339 | 323586 | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El rygg u el boks | J929674 | 329598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El rygg kompl m el boks inkl armlenpute | J929672 | 330111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fremdriftshjelp | J929339 | 323586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Holder for håndkontroll</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holder f håndkontroll kompl</td> <td>J928899</td> <td>323616</td> </tr> </tbody> </table> <p>Holder for håndkontroll, komplett for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Holder f håndkontroll kompl | J928899 | 323616 | <p>El boks</p> <p>J929665</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inkl håndkontroll for 20cm motor</td> <td>J929665</td> <td>329596</td> </tr> <tr> <td>inkl håndkontroll for 30cm motor</td> <td>J929666</td> <td>330109</td> </tr> </tbody> </table> <p>Boks for elektriske funksjoner for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p> | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | inkl håndkontroll for 20cm motor | J929665 | 329596 | inkl håndkontroll for 30cm motor | J929666 | 330109 | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holder f håndkontroll kompl | J928899 | 323616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inkl håndkontroll for 20cm motor | J929665 | 329596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inkl håndkontroll for 30cm motor | J929666 | 330109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Sete, rygg, trekk, brems & kjørebøyle

Sete Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|---------------|-------------|
| Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå | J773237920693 | 323734 |
| Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå | J773247920693 | 323737 |

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for både kortvarig og lengre stabil sittestilling for mennesker i bevegelse. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate.
Farge: grå

Rygg Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--------------|-------------|
| Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå | J08A55120693 | 323688 |

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal bruk i utførelsen av aktiviteter.
Farge: grå

Inkontinestrekk



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|-------------|-------------|
| inko XXX b58xd48cm, sort | J46406664 | 323753 |
| inko 4XL b72xd50cm, sort | J46477664 | 323754 |
| inko Aktiv medium b47xd47cm, sort | J46T4323571 | 323750 |
| inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50, sort | J46T4324571 | 323752 |

Et løst, vannett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Kjørebøyle

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--------------|---------|-------------|
| Kjørehåndtak | J926350 | 323625 |

Kjørehåndtak gir en god arbeidsstilling når det er behov for å transportere stolen hen til bruker.



Bremsepedal

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------|---------|-------------|
| Bremsepedal hø | J922982 | 323522 |

Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken. Bremsepedalen er plassert på baksiden av stolen, og betjenes av en hjelper, ved å trykke bremsepedalen ned med foten.





Sete

Sete avrundet sadel

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Sete avrundet sadel 100/Delta b46xd35cm, sort* | J06180712692 | 323744 |

Et kort, ergonomisk buet sadelsete, som støtter og stabiliserer brukeren.



*Standard på VELA Salsa 100

Sete sykkelsadel

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Sete sykkelsadel 120/Midi b40xd35cm, sort* | J06190720692 | 323740 |

Et ergonomisk, buet sykkelsadelsete med utskjæring i forkant, som gir brukeren støtte og god plass til lårene.



*Standard på VELA Salsa 120

Sete ridesadel

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Sete ride Sadel b43xd35cm, sort* | J06164520692 | 323741 |
| Sete ride Sadel liten b39xd30cm, sort | J06384520692 | 323739 |

Ridesadelsetets utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling. Det mindre ridesadelsetes utforming gir en åpen hoftevinkel og en rett sittestilling, men i mindre grad enn et standard sadelsete. Lite ridesadelsete kan fås som alternativ



*Standard på VELA Salsa 400

Sete avrundet m. forhøyning

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------|--------------|-------------|
| 110/Kap b46xd35cm, sort | J06420712692 | 323743 |

Et kort sadelsete med en forhøyning (bue) foran på setet, slik at brukeren unngår følelsen av å gli ned fra setet når det vippes fremover.

Komfort sete
bred-kort setedybde

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------|--------------|-------------|
| S150 b46xd32cm, sort | J06170745692 | 323742 |

Et komfortabelt sete som har en tykk og absorberende kjerne. Setet er kort og gir god plass til ben og sikrer god blodtilførsel til ben og føtter.





Trekk & rygg

Setetrekk



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|-----------|-------------|
| Setetrekk ride Sadel sete liten b39xd30cm, sort | J46138666 | 323775 |
| Setetrekk sete S150 b46xd32cm, sort | J46217666 | 323781 |
| Setetrekk sete 100/Delta b46xd35cm, sort | J46218666 | 323783 |
| Setetrekk sete 120/Midi b40xd35cm, sort | J46219666 | 323777 |
| Setetrekk sete 110/KAP b46xd35cm, sort | J46242666 | 323784 |
| Setetrekk sete side Sadel b43xd35cm, sort | J46B16666 | 323780 |

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinestrekk



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|-----------|-------------|
| Setetrekk inko sete ride Sadel, sort | J46416664 | 323779 |
| Setetrekk inko sete S150 bredkort, sort | J46417664 | 323782 |
| Setetrekk inko sete ride Sadel liten, sort | J46438664 | 323776 |
| Setetrekk inko sete 100/Delta sadel, sort | J46518664 | 323785 |
| Setetrekk inko sete 120/Midi sykkel, sort | J46519664 | 323778 |
| Setetrekk inko sete 110/Delta forhøyet, sort | J46542664 | 323786 |

Et løst, vannnett inkontinestrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Rygg rektangulær S150

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------|--------------|-------------|
| b22xh29cm | J08325147692 | 323693 |



En smal ryggpute med ergonomisk bue som gir fri bevegelse i rygg, skuldre og armer. Ryggputen gir god sittekomfort ved langvarig aktivitet.

Rygg Aktiv

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Aktiv ekstra liten b38xh22cm* | J08A15120692 | 323695 |
| Aktiv liten b38xh30cm | J08A25120692 | 323696 |



En ergonomisk buet ryggpute som gir god korsryggstøtte. Ryggputen er lav og gir brukeren fri bevegelse i rygg, skuldre og armer ved forskjellige aktiviteter.

*Standard

Monteringssett for rygg

| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------|---------|-------------|
| mont sett, rygg | J101052 | 323643 |



Monteringssett for ryggbøyle.

Ryggtrekk











| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| S150 b22xh29cm, sort | J47132666 | 323710 |
| Aktiv ekstra liten b38xh22cm, sort | J471A1666 | 323711 |
| Aktiv liten b38xh30cm, sort | J471A2666 | 323712 |



Løst varetrekk til ryggpute som er hygienisk, komfortabelt og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Armlen, gassfjær, bremsse & fotring

| Armlen 8x26cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlenesett komplett m pute | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--|-------------|---|--|---|---------|-------------|
|  | Hø side h31cm* | J1024331003 | 323453 |  | f ridesadelsete | J925801 | 323466 |
| | Ve side h31cm* | J1024431003 | 323455 | | f sete Midi/120 | J928599 | 323467 |
| | Hø side h41cm | J1114331003 | 323454 | | Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen. Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært god styrke, holdbarhet og stabilitet. Svart m. P.U.-pute (8x26cm). | | |
| | Ve side h41cm | J1114431003 | 323456 | | *Standard | | |
| Armlenebunn Midi/sykkelsadelsete | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Sidefeste | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Midi/ 120 sykkelsete | J927018 | 323470 |  | Sidefeste hø | J927960 | 323787 |
| | Armlene-bunn med oppheng for armlene for sete Midi/120 sykkelsete. Armlene gir god støtte når man f.eks. reiser seg eller setter seg i stolen. | | | | Sidefeste ve | J927961 | 323788 |
|  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Monteringssett for armlener | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | Håndskruer f armlen høydereg M8x30mm | J927009 | 323621 |  | for ridesadelsete | J101093 | 323641 |
| Håndskruer for armlene. | | | for 120/ Midi sykkelsete | | J101094 | 323642 | |
|  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Brems | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | 15cm for sitte-høyde 45-60cm | J926894 | 323590 |  | Bremsepedal hø | J925936 | 323523 |
| | 26cm for sitte-høyde 60-86cm | J926895 | 323592 | | T-grep m kule | J926877 | 323521 |
| 20cm for sitte-høyde 50-70cm | J926896 | 323591 | Bremsepedalen kan brukes som alternativ f. bremsespaken eller sammen med bremsespaken. Plasseres på baksiden av stolen hvor bremsespaken er og betjenes ved å trykke den ned med foten. | | | | |
| Gassfjær for stoler med manuell høydejustering. Med yder-/innerrør. | | | T-bremsehåndtaket forlenger bremsen slik at det er lettere å nå bremsen. | | | | |
|  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Antitippbøyle | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | Fotring oppellbar understell u/hjul | J927319 | 323572 |  | kompl m mont kit | J926970 | 323348 |
| En oppfellbar fotring gir støtte til føttene og gir stabilitet, støtte og komfort i sittestillingen, og kan felles bort når den ikke brukes. Fotringen er spesielt praktisk når man sitter høyt. | | | Antitippbøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøylen monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover. | | | | |



Sete & trekk

Sete Junior E med/uten forhøyet kap



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Sete junior E2 liten b32xd35cm* | J06484940583 | 323721 |
| Sete junior E3 medium b36xd43cm* | J06494940583 | 323725 |
| Sete junior E4 stor b40xd47cm* | J06504940583 | 323728 |
| Sete junior E2 forhøyet kap b32xd35cm | J06B34940583 | 323720 |
| Sete junior E3 forhøyet kap b36xd43cm | J06B44940583 | 323724 |
| Sete junior E4 forhøyet kap b40xd47cm | J06B54940583 | 323727 |

Det gir lett støtte langs låret, noe som støtter brukers sittestilling.

Bakerst på setet er det en utskåret "basseng" med to utskiftbare skumplater, som gjør det enkelt å endre mykheten, støtten og sittestøtten, slik at brukeren oppnår riktig avlastning og optimal stabilitet i sittende stilling. Dette setet kan anbefales hvis brukeren kan sitte selv uten støtte, samt ved lett behov for støtte i sittestillingen. Setet med forhøyet kap anbefales hvis brukeren trenger lett hjelp til å holde bena separat eller hvis brukeren har en tendens til å gli fremover i setet.. Farge: svart

***Standard**

Sete opph. side MD



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Sete opph side front MD35 b35xd40cm | J06934912220 | 323722 |
| Sete opph side front MD36 b36xd36cm | J06954912220 | 323723 |
| Sete opph side front MD40 b40xd44cm | J06964912220 | 323726 |

MD-setet er et polstret, konturert sete med innebygde kraftige sideputer foran som styrer plasseringen av bena. Seteputen har en fordykning bakerst, slik at brukers bekken havner lenger bak på setet. Setet er egnet for bruker som trenger hjelp til å styre bekkenet og lårene, og har behov for å kunne føle en fysisk avgrensning - for eksempel brukere med muskeldystrofi eller cerebral parese.

Farge: svart

Setetrekk E-sete



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Setetrekk sete E2 b32xd35cm | J46148583 | 323755 |
| Setetrekk sete E3 b36xd43cm | J46149583 | 323761 |
| Setetrekk sete E4 b40xd47cm | J46150583 | 323765 |

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinenstrekk E-sete



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------|-----------|-------------|
| Setetrekk inko sete E2 | J46448664 | 323756 |
| Setetrekk inko sete E3 | J46449664 | 323762 |
| Setetrekk inko sete E4 | J46450664 | 323766 |

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Setetrekk MD-sete



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Setetrekk sete MD35 b35xd40cm | J46293583 | 323757 |
| Setetrekk sete MD36 b36xd36cm | J46295583 | 323759 |
| Setetrekk sete MD40 b40xd40cm | J46296583 | 323763 |

Et løst varetrekk til sete, som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Inkontinenstrekk MD-sete



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Setetrekk inko sete MD35 b35xd40cm | J46593664 | 323758 |
| Setetrekk inko sete MD36 b36xd36cm | J46595664 | 323760 |
| Setetrekk inko sete MD40 b40xd40cm | J46596664 | 323764 |

Et løst, vanntett inkontinenstrekk i kunststoff til (Decu-tex) seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg junior E



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Rygg junior E2 liten b26xh26cm* | J08206822583 | 323674 |
| Rygg junior E3 medium b28xh35cm* | J08216822583 | 323675 |

E-ryggstøtten er en godt polstret ryggstøtte som gir en lett fjæring til ryggen og behagelig støtte spesielt egnet for brukere. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og låses i vinkel, slik at det oppnås mest mulig støtte og fri bevegelse i overkroppen - for en god, aktiv sittestilling. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren selv kan sitte stabilt og ikke trenger ekstra støtte - Kroppsstøtter og sele kan imidlertid legges til senere for mer støtte. Farge: svart

***Standard for stoler med Liten & Medium sitteenhet**

Rygg Support ES



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Rygg Support ES3 medium b32xh37cm innv b20cm | J08245111220 | 323677 |
| Rygg Support ES4 stor b37xh43cm innv b24cm | J08225111220 | 323678 |
| Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm | J08255111220 | 323681 |

ES-ryggen er godt polstret og har innebygde sidestøtter som støtter fra hoften og opp til under armhulen. Dette gir støtte i sittestillingen og leder brukeren til midtlinjen. ES-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å oppnå mest mulig støtte i sittestillingen. Det er også mulig å legge til nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å holde seg oppreist eller blir trett i løpet av dagen. Farge: svart

Du bør måle brukers ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til det innvendige ryggstøttemålet.

Rygg Aktiv



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--------------|-------------|
| Rygg Aktiv liten b38xh30cm* | J08A25120583 | 323679 |
| Rygg Aktiv stor/ ekstra stor b40xh48cm | J08A45120583 | 323680 |

Denne ryggstøtten tilbyr komfort og lett støtte, samt muligheten til å låse ryggen i en fast vinkel for bedre og mer optimal støtte til korsryggen. Stor/ekstra stor ryggstøtte har også mulighet for nakkestøtte. Vi anbefaler denne ryggstøtten for større juniorer som kan sitte selv uten behov for ekstra støtte eller sidestøtte. Farge: svart

***Standard for stoler med Stor sitteenhet**

Rygg ekstra støtte MD



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|--------------|-------------|
| Rygg ekstra støtte medium MD4 b30xh25cm | J08285113583 | 323676 |

MD4-rygg er en polstret og konturert lav rygg. Puten er buet og gir god støtte for brukeren på sidene samtidig som lumbalstøtten blir god. Ryggputen kan låses i ønsket vinkel. Ryggputen er egnet for brukere med for eksempel muskeldystrofi eller ryggkifose. Farge: svart

Ryggbøyle



| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------------------------|---------|-------------|
| 152cm med 5,4cm vinkel m mont kit | J929259 | 323700 |
| 152cm med 10,3cm vinkel m mont kit | J929260 | 323699 |
| 142cm med 5,4cm vinkel m mont kit | J929278 | 323698 |

Ryggbøyle med regulerbar vinkel til ryggputer med låsbar vinkeljustering. Med monteringskit.

Nakkestøtte











| Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|------------------|------------|-------------|
| liten b17,5xh9cm | J410301391 | 323653 |

Nakkestøtte i svart skinn.












Armlen

| Armlen 9x25cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x25cm for elbetjening | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|---|---------------|-------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------|
|  | Høyre h31cm | J1026835003 | 323360 |  | Høyre h31cm* | J1026834003 | 323361 |
| | Venstre h31cm | J1116835003 | 323363 | | Venstre h31cm* | J1116834003 | 323364 |
| | Høyre h41cm | J1026935003 | 323366 | | Høyre h41cm | J1026934003 | 323367 |
| | Venstre h41cm | J1116935003 | 323369 | | Venstre h41cm | J1116934003 | 323370 |
| <p>Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p> | | | | <p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen. *Standard</p> | | | |
| Armlen 9x30cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x30cm for elbetjening | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Høyre h31cm | J1026804003 | 323372 |  | Høyre h31cm | J1026805003 | 323374 |
| | Venstre h31cm | J1116804003 | 323375 | | Venstre h31cm | J1116805003 | 323377 |
| | Høyre h41cm | J1026904003 | 323378 | | Høyre h41cm | J1026905003 | 323380 |
| | Venstre h41cm | J1116904003 | 323381 | | Venstre h41cm | J1116905003 | 323383 |
| <p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p> | | | | <p>Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p> | | | |
| Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Høyre h31cm | J1026859003 | 323362 |  | Høyre h31cm | J1026860003 | 323373 |
| | Venstre h31cm | J1116859003 | 323365 | | Venstre h31cm | J1116860003 | 323376 |
| | Høyre h41cm | J1026959003 | 323368 | | Høyre h41cm | J1026960003 | 323379 |
| | Venstre h41cm | J1116959003 | 323371 | | Venstre h41cm | J1116960003 | 323382 |
| <p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p> | | | | <p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p> | | | |
| Armlen 6x21cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Armlen 8x26cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Høyre h31cm | J1026809003 | 323352 |  | Høyre h31cm | J1026831003 | 323356 |
| | Venstre h31cm | J1116809003 | 323353 | | Venstre h31cm | J1116831003 | 323357 |
| | Høyre h41cm | J1026909003 | 323354 | | Høyre h41cm | J1026931003 | 323358 |
| | Venstre h41cm | J1116909003 | 323355 | | Venstre h41cm | J1116931003 | 323359 |
| <p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p> | | | | <p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Merk: ingen innebygd mulighet for elektrisk høydeinnstilling.</p> | | | |













Sele & fotstøtte

| Hoftesele Y-sele med trykklås | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Hoftesele Y-sele med klemlås | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|---|---------|-------------|--|--|---------|-------------|
|  | str liten kompl | J929262 | 323491 |  | str liten kompl | J929263 | 323481 |
| | str medium kompl | J929264 | 323492 | | str medium kompl | J929265 | 323482 |
| | str stor kompl | J929266 | 323493 | | str stor kompl | J929267 | 323483 |
| <p>En 4-punkts hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.</p> | | | | <p>En 4-punkts hoftesele med klemlås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit.</p> | | | |
| Hoftesele Pelvi | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Brystesele H-sele Sternum | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | str xtra liten kompl | J929268 | 323494 |  | str liten kompl | J929272 | 323485 |
| | str liten kompl | J929269 | 323486 | | str medium kompl | J929273 | 323487 |
| | str medium kompl | J929270 | 323488 | | str stor kompl | J929274 | 323489 |
| | str stor kompl | J929271 | 323490 | | <p>Brystesele Sternum komplett med monteringskit.</p> | | |
| <p>Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at gli frem i setet. Med monteringskit.</p> | | | | | | | |
| Hoftesele 115cm med trykklås | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Beskyttelseskappe f. Y-sele | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | lengde 115cm trykklås kompl | J929331 | 323484 |  | Svart, 55x25x65 mm | J923615 | 323633 |
| | <p>Hoftesele med trykklås og regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Lengde 115cm, komplett</p> | | | | <p>Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykklås. Sikrer mot utilsikket åpning av selen.</p> | | |
| Fotstøtte, medium | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Fotstøtte, stor | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | Fotstøtte plate medium stang l26-41cm 10° | J928209 | 323577 |  | Fotstøtte plate stor stang l26-41cm 10° | J928098 | 323578 |
| | Fotstøtte plate medi- um stang l21-31cm 10° | J928210 | 323574 | | Fotstøtte plate stor stang l21-31cm 10° | J928099 | 323575 |
| <p>Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.</p> | | | | <p>Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir bruker god støtte til føttene.</p> | | | |
| Fotstøtte | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | | | | |
|  | standard type kompl | J928732 | 323585 | | | | |
| | <p>Fotstøtte for å oppnå en god sittstilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittstilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.</p> | | | | | | |











Støtte, kjørebøyle & bord

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|--|--------------------|----------------|--------------------|
|  | Sidedøtte buet pute, sett | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art. nr. |  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | liten sett, stenger 19,5cm | J929286 | 323799 | rett pute sett, stenger 19,5cm | | J929288 | 323803 | |
| | stor sett, stenger 19,5cm | J929287 | 323800 | rett pute sett f E2-rygg, stenger 19,5cm | | J929293 | 323802 | |
| | liten sett f E2-rygg, stenger 19,5cm | J929291 | 323801 | Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. | | | | |
| | stor sett f E2-rygg, stenger 19,5cm | J929292 | 323804 | | | | | |
|  | Sidedøtte, sett | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | liten l11xb6,5cm sett | J58018052 | 323793 | liten l11xb6,5cm | | J58042052 | 323794 | |
| | medium l19xb7,5cm sett | J58019052 | 323795 | medium l19xb7,5cm | | J58043052 | 323796 | |
| | stor l25xb7,5cm sett | J58020052 | 323797 | stor 25xb7,5cm | | J58044052 | 323798 | |
| Sidedøtte i svart skai. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen. | | | Sidedøtte med stang 12,5x3cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen. | | | | | |
|  | Stang for sidedøtte for Support-rygg | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art. nr. |  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | buet, b2cmxl19,5cm | J928372 | 323889 | kile f montering, Support-rygg | | J928405 | 323637 | |
| | buet b2cmxl22,5cm | J928373 | 323890 | Monteringskile for sidedøtte Support-rygg | | | | |
| | buet b4,5xl22,5cm | J928374 | 323891 | | | | | |
| | rett l20,8cm | J928597 | 323892 | | | | | |
| Stang for sidedøtte for sidedøtte Support-rygg | | | | | | | | |
|  | Abduksjonskloss | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | d11xb8xh6cm | J58050052 | 323336 | liten, kompl | | J929275 | 323344 | |
| | d11xb9xh9cm | J58051052 | 323337 | medium, kompl | | J929276 | 323345 | |
| | d14xb12xh6cm | J58052052 | 323335 | stor, kompl | | J929277 | 323346 | |
| Abduksjonskloss i svart skai. Monteres under sete på setets front og hjelper bruker i sittestillingen. | | | Hjelper bruker med å sitte med føttene på fotplaten og gir støtte i sittestillingen. | | | | | |
|  | Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |  | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
| | Kjørebøyle regulerbar kompl | J928257 | 323626 | Bord b52xd40cm kompl m mont kit | | J929279 | 323515 | |
| Kjørebøylen gir hjelpere god arbeidsstilling når det er behov for å transportere bruker i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres. | | | Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen. | | | | | |



Hjul, brems & elektrisk styring

| Hjulsett dobbel hjulbane | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Bremsetett for 4 hjulsbrems | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|--|--|---------|-------------|--|--|---------|-------------|
|  | Hjulsett 4hjul | J928736 | 323609 |  | el-brems m mont kit | J929173 | 323524 |
| | Doble hjul med dobbel hjulbane som trillet lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen. | | | | manuell brems komplett kit | J928757 | 323528 |
| | | | | | Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbrems. 4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag. | | |
| Hjulsett komplett inkl brems | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Seteløft 30cm | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | 4hjul m el brems | J929008 | 323607 |  | Seteløftmotor 30cm | J929334 | 323644 |
| | 4-hjulsbrems sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag. | | | | Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling. | | |
| Elektrisk brems for armlen | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Elektrisk brems for håndkontroll | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | kompl m el boks inkl armlenpute | J929677 | 330113 |  | kompl m el boks inkl håndkontr f 20cm motor | J929679 | 330114 |
| | Elektrisk brems sett betjening for stoler med elektrisk høydeinnstilling i armlen. | | | | kompl m el boks inkl håndkontr f 30cm motor | J929680 | 330115 |
| | | | | | Elektrisk brems sett betjening for stoler med elektriske funksjoner i håndkontroll. | | |
| Soft touch alternativ styring | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. | Håndkontroll alternativ styring | Beskrivelse | Art.nr. | HMS art.nr. |
|  | El løft soft touch hø ve front | J929054 | 323549 |  | el løft i håndkontroll m. mont kit | J929055 | 323550 |
| | Soft touch-hev/senk bryter f. armlen. | | | | Håndkontroll for elektrisk løft. | | |



Kvalifisert rådgivning og rask service

RÅDGIVNING

En del av kjernekompetansen hos VELA er rådgivning og bistand med utprøving hos brukeren. Vi bistår terapeuten i å finne stolen som dekker den enkelte brukers behov. Du sikrer at brukeren hjelpes med riktig produkt i forhold til funksjonsnedsettelse.

Vi setter brukeren i sentrum og rådgir for å finne den beste løsningen.

Vi er selvsagt alltid klare til å gi råd og veiledning via telefon, e-post og chat.

RASK RESPONSTID

Service er en av våre andre kjernekompetanser i VELA. Vi har egne serviceteknikere og samarbeidspartnere over hele landet. Vi har kort responstid på service, reparasjoner og ombygging, og arbeidet kan ofte utføres hos brukeren slik at bruker ikke må være uten stolen sin.

