



Sete

Sete Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Aktiv dyp b40xd49cm, grå	J771177920693	323731
Sete Aktiv ekstra liten b40xd40cm, grå	J773217920693	323729
Sete Aktiv liten b44xd44cm, grå*	J773227920693	323732
Sete Aktiv medium b47xd47cm, grå*	J773237920693	323734
Sete Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm, grå*	J773247920693	323737

Med runde former og omfavnende fasong utgjør dette setet et godt fundament for mennesker i aktivitet. Setets avrundede forkant gjør det mulig å bevege seg fremover i stolen uten friksjon ved hjelp av bena. Brukeren får god komfort med lett støtte i den aktive sittestillingen, en liten forhøyning langs setets side og bak-kant støtter hele brukerens sitteflate. Farge: grå

Velg Aktiv-setet:

Hvis du har gangfunksjon, men opplever tretthet, ubehag eller smerte ved langvarig stående.

Hvis du har balansevansker

Hvis du foretrekker å utføre daglige aktiviteter sittende.

Setet kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Sete Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete Contour liten b44xd44cm, grå	J774227959693	323733
Sete Contour medium b47xd47cm, grå*	J774237959693	323735
Sete Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, grå*	J774247959693	323738

Setet er designet for brukere med et stort behov for å sitte i mange timer daglig, og derfor trenger mer avlastning. Setet kompensere for fysiologiske forhold som kan oppstå ved langvarig sittestilling, slik som trykk, smerter og ubehag. Midten av setet utgjør et basseng med kaldskum Pantera, en mykere skum med høy tetthet. Kantene på bassenget er skrå og sikrer jevn vektfordeling. Formålet med bassenget er å avlaste sitteknoklene bilateralt.

Bak på setet er det utformet en liten fordybning i halebensområdet. Denne fordybningen gir en trykkavlastende effekt som lindrer eventuelle ubehag i dette området når man sitter. Setets avrundede forkant fremmer blodsirkulasjon til ben. Farge: grå

Velg Contour-setet:

Hvis du har et stort behov for å sitte.

Hvis du ønsker å forebygge uhensiktsmessig trykk i seteregionen, nær sitteknokler og haleben i sittende stilling.

Hvis du ønsker en høyere grad av mykhet i setet.

Kan byttes uten bruk av verktøy.

***Standard på stoler med Contour & Support sitteenhet**

Sete Coxit




Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Sete coxit liten b40xd47cm, grå	J929364	323730
Sete coxit stor b47xd47cm, grå	J929369	323736

Sittedelen kan justeres og tilpasses den enkelte bruker og situasjonen.

Klaffene kan justeres individuelt og gir mulighet for å sitte med åpen hoftevinkel, noe som er en fordel for brukere med for eksempel nedsatt bevegelighet i hoftene, samt brukere som har stive ben eller er benamputerte. Farge: grå
Kan byttes uten bruk av verktøy.

Plansete

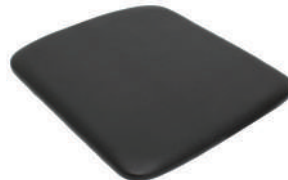

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Liten b40xd48cm	J771407911052	323660
Medium b45xd48cm	J771417911052	323661
Stor b50xd48cm	J771427911052	323662

Plansete for bruk av annen pute. Farge: svart.
Kan byttes uten bruk av verktøy.





Trekk & skruer

Setetrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinestrekk Aktivsete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Aktiv dyp b40xd-49cm	J46T1117521	323768		inko Aktiv dyp b40xd49cm	J46T4117571	323746
	Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T1321521	323767		inko Aktiv ekstra liten b40xd40cm	J46T4321571	323745
	Aktiv liten b44xd-44cm	J46T1322521	323769		inko Aktiv liten b44xd44cm	J46T4322571	323747
	Aktiv medium b47xd47cm	J46T1323521	323771		inko Aktiv medium b47xd47cm	J46T4323571	323750
	Aktiv stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T1324521	323773		inko Aktiv stor/ekstra stor b50xd50	J46T4324571	323752

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart


Setetrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Inkontinestrekk Contoursete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Setetrekk Contour liten b44xd44cm	J46T2422521	323770		inko Contour liten b44xd-44cm	J46T5422571	323748
	Setetrekk Contour medium b47xd47cm	J46T2423521	323772		inko Contour medium b47xd47cm	J46T5423571	323749
	Setetrekk Contour stor/ekstra stor b50xd50cm	J46T2424521	323774		inko Contour stor/ekstra stor b50xd50cm, sort	J46T5424571	323751

Et løst stofftrekk til setet som skåner stoltrekket mot slitasje og smuss. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i ullvask. Farge: svart

Et løst, vanntett inkontinestrekk i kunststoff til seter. Velegnet til brukere som søler mye eller ved inkontinens. Trekket er pustende, hygienisk og rengjøringsvennlig, og kan enkelt tas av og vaskes i vaskemaskin. Farge: svart

Montering av sete	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Mont sett f avtagelig sete	J102015	323638

4 stykk fingerskruer for montering av seter på VELA Tango 700-serien.

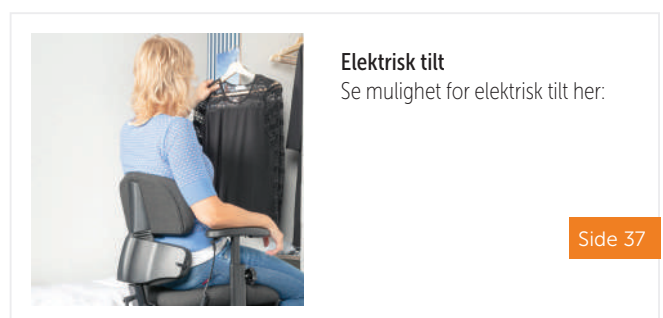

Elektrisk tilt

Se mulighet for elektrisk tilt her.



Rygg

Rygg Aktiv



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Aktiv ekstra liten b38xh22cm, grå	J08A15120693	323683
Rygg Aktiv liten b38xh30cm, grå*	J08A25120693	323684
Rygg Aktiv medium b40xh40cm, grå*	J08A35120693	323686
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm, grå*	J08A45120693	323687
Rygg Aktiv stor/ekstra stor b40xh48cm m luftpute, grå	J08A55120693	323688

Denne ryggstøtte er laget for sittende aktivitet. Ryggstøttens størrelse sikrer støtte og stabilisering av ryggen både i hvile og aktivitet, uten å begrense bevegeligheten. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er utformet slik at når den er innstilt og tilpasset brukeren, har den en holdningskorrigerende effekt som skaper optimal stilling for utførelsen av aktiviteter.

Farge: grå

Velg Aktiv-ryggstøtte hvis du trenger ryggstøtte, men ikke ønsker å begrense den sittende mobiliteten.

***Standard på stoler med Aktiv sitteenhet**

Rygg Contour



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Contour liten b36xh38cm, grå	J08B25122693	323682
Rygg Contour medium b39xh43cm, grå*	J08B35122693	323685
Rygg Contour stor/ekstra stor b41xh48cm, grå*	J08B45122693	323690

Denne ryggstøtten er laget for sittende aktivitet, hvor det er behov for støtte for å stabilisere kroppen og opprettholde den posturale kontrollen. Ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel vertikalt for å tilpasse seg den enkelte brukers naturlige korsryggsvai. Den er fullstøpt i skum med sideputer, som har til hensikt å sikre optimal støtte og stabilisering rundt korsryggen og livet. Ved brysthøyde avtar sideputen for å gi bevegelsesfrihet rundt skulderleddene og armene. Ryggstøtten stabiliserer uten å fiksere. Farge: grå

Velg Contour-ryggstøtte:

Hvis du har et stort behov for ryggstøtte i sittende stilling.

Hvis du har tendens til å falle over til en av sidene

Hvis du opplever tretthet i ryggmuskulaturen.

Hvis du opplever stabilitets- og balanseproblemer.

***Standard på stoler med Contour sitteenhet**

Rygg Support



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg Support stor b43xh46cm innv b28cm, grå*	J08255111693	323692
Rygg Support stor m luftpute b43xh46cm, grå	J08335158693	323691

Support-ryggstøtten er godt polstret og har innebygde sidestøtter. De innebygde sidestøtter støtter fra hoften og opp til under armhulen, og gir støtte i sittestillingen samtidig som de veileder brukeren til midtlinjen. Support-ryggstøtten kan justeres i høyde, dybde og vinkel for å gi mest mulig støtte i sittestillingen. Vi anbefaler denne ryggstøtten hvis brukeren bruker mye krefter på å opprettholde oppreist stilling eller blir trett i løpet av dagen. Du må måle brukerens ryggbredde både øverst (under armhulen) og nederst (ved hoften) for å forsikre deg om at brukeren passer til den indre ryggbredden på Support-ryggstøtten (maks. 28 cm). Farge: grå

***Standard på stoler med Support sitteenhet**



Rygg, ryggbøyle & nakkestøtte

Rygg ALB



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm hø betj, grå	J08U27612693	323667
Rygg ALB liten reg bar b39xh39cm ve betj, grå	J08U37612693	323668
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm hø betj, grå	J08U47612693	323669
Rygg ALB medium reg bar b39xh49cm ve betj, grå	J08U57612693	323670
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm hø betj, grå	J08U67612693	323671
Rygg ALB stor reg bar b39xh51cm ve betj, grå	J08U77612693	323672

ALB-ryggstøtten er en unik ryggstøtte med todelt støtte for rygg og korsrygg. Ryggstøtten gir optimal støtte for korsryggen og bekkenet, støtter den naturlige korsryggsvaien og fremmer en oppreist holdning, noe som kan bidra til å forebygge eller lindre ryggsmerten. Korsryggstøtten kan enkelt justeres frem og tilbake trinnløst via et grep, noe som gir mulighet for variasjon og støtte i korsryggen. Øvre del av ryggen beholder derimot sin vinkel i forhold til setet, slik at brukeren også sikres støtte i den øvre delen av ryggen. Tilgjengelig i tre størrelser. Farge: grå

Planrygg



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Planrygg m hook velcro b40xh48cm	J08V15160693	323689

Planrygg for bruk af annen pute. Farge: grå.

Ryggbøyle, komplett



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
lengde 24cm	J929068	323705
lengde 31cm	J929069	323707
lengde 24cm m vinkel	J929070	323706
Ryggstang ALB	J929071	323708

Ryggbøyle komplett med monteringskit.

Nakkestøtte


J413105391



J4131E1591

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b25xh12cm	J413103167	323654
stor b26xh-13cm	J413105391	323655
liten m fleksibel pute h8cm	J4131E1591	323656

Nakkestøtte i svart skinn.

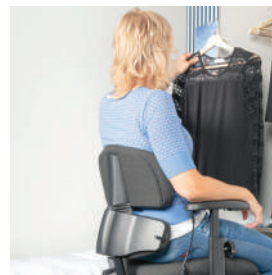

Elektrisk ryggvinkel

Se mulighet for elektrisk ryggvinkel her:

Side 37



Armlen

Armlen 9x30cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre*	J1026304003	323411		Lav, høyre*	J1026305003	323438
	Lav, venstre*	J1116304003	323413		Lav, venstre*	J1116305003	323441
	Høy, høyre**	J1026404003	323415		Høy, høyre**	J1026405003	323444
	Høy, venstre**	J1116404003	323417		Høy, venstre**	J1116405003	323448
<p>Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p>				<p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p>			
Standard på manuelle stoler. * Aktiv / **Contour & Support							
Armlen 9x25cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x25cm for elbetjening	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026335003	323403		Lav, høyre	J1026334003	323420
	Lav, venstre	J1116335003	323405		Lav, venstre	J1116334003	323424
	Høy, høyre	J1026435003	323407		Høy, høyre	J1026434003	323430
	Høy, venstre	J1116435003	323409		Høy, venstre	J1116434003	323433
<p>Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p>				<p>Kortere armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.</p>			
Armlen 9x25cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 9x30cm for elbetjening Soft touch	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026359003	323421		Lav, høyre	J1026360003	323437
	Lav, venstre	J1116359003	323425		Lav, venstre	J1116360003	323440
	Høy, høyre	J1026459003	323429		Høy, høyre	J1026460003	323443
	Høy, venstre	J1116459003	323434		Høy, venstre	J1116460003	323447
<p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p>				<p>For stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.</p>			
Armlen 10x32cm Combi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Armlen 10x37m Combi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026329167	323384		Lav, høyre	J1026326167	323388
	Lav, venstre	J1116329167	323385		Lav, venstre	J1116326167	323389
	Høy, høyre	J1026429167	323386		Høy, høyre	J1026426167	323419
	Høy, venstre	J1116429167	323387		Høy, venstre	J1116426167	323390
<p>Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p>				<p>Lengre og polstret armlen. Kan justeres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p>			
Armlen 8x26cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Håndskruer	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	Lav, høyre	J1026331003	323395		M8x20mm	J928606	323940
	Lav, venstre	J1116331003	323397		Vingskruer M8x20mm for armlenehøyde og -bredde.		
	Høy, høyre	J1026431003	323399				
	Høy, venstre	J1116431003	323401				
<p>Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.</p>							



Armlen

Armlen, nedfellbar 9x30cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026604003	323412
Lav, venstre	J1116604003	323414
Høy, høyre	J1026704003	323416
Høy, venstre	J1116704003	323418

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026605003	323439
Lav, venstre	J1116605003	323442
Høy, høyre	J1026705003	323446
Høy, venstre	J1116705003	323450

Nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026635003	323404
Lav, venstre	J1116635003	323406
Høy, høyre	J1026735003	323408
Høy, venstre	J1116735003	323410

Nedfellbare armlen for stoler med manuell justering av setehøyden. Kortere armlen. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026634003	323422
Lav, venstre	J1116634003	323426
Høy, høyre	J1026734003	323431
Høy, venstre	J1116734003	323435

Kortere nedfellbare armlen for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Armlen reguleres i høyden og bredden i forhold til setet og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet. Juster høyde via knapper under armlen.

Armlen, nedfellbar 9x25cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026659003	323423
Lav, venstre	J1116659003	323427
Høy, høyre	J1026759003	323432
Høy, venstre	J1116759003	323436

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 9x30cm for elbetjening Soft touch



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026660003	I/A
Lav, venstre	J1116660003	323428
Høy, høyre	J1026760003	323445
Høy, venstre	J1116760003	323449

Nedfellbare armlener for stoler med elektrisk justering av setehøyden. Soft touch justering er enkel å bruke. Knappen sitter ut fra armlenet og krever en lett trykk opp eller ned for å endre stolens høyde. Armlenet har høy styrke og stabilitet og kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet.

Armlen, nedfellbar 8x26cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026631003	323396
Lav, venstre	J1116631003	323398
Høy, høyre	J1026731003	323400
Høy, venstre	J1116731003	323402

Kan reguleres i høyden og bredden i forhold til setet. Armlenene er smalere og har svært høy styrke, holdbarhet og stabilitet.

Armlen, traub 10x42cm skålformet Combiarmlen



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Lav, høyre	J1026328167	323391
Lav, venstre	J1116328167	323392
Høy, høyre	J1026428167	323393
Høy, venstre	J1116428167	323394


Ett polstret armlen som gir støtte for underarmen/albu. En fordel for brukere med behov for at armstøtten holder armen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

Armlen, hemiplegi 13x44cm



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side	J1026558167	323451
Venstre side	J1116558167	323452

Gir sideveis støtte for underarmen/albu. Kuleledd gir trinnløs innstilling av armleneskålen i alle retninger og vinkler. En fordel for brukere med behov for at armstøtten kan plasseres inn foran kroppen, f.eks. brukere med lammelse på én side.

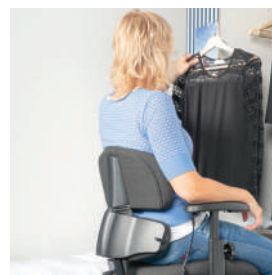

Holder for håndkontroll

Se holder for håndkontroll til montering på armlen her:



Sele, kroppsstøtte & sidestøtte

Hoftesele Y-sele	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hoftesele Pelvi	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten br2,5xl127cm	J929010	323497		xtra liten br2,5xl120cm	J929013	323504
	medium br4xl140cm	J929011	323500		liten br4xl200cm	J929014	323496
	stor br4xl175cm	J929012	323503		medium br4xl205cm	J929015	323499
<p>En 4-punkts hoftesele med regulerbar lengde. Selen kan tas av og vaskes i vaskemaskin. Med monteringskit</p>				<p>Velegnet for brukere som trenger en hoftesele med god støtte, da trykket fordeles jevnt over et større område. Pelvi-selen gir optimal støtte og reduserer risikoen for at brukeren sklir frem i setet. Med monteringskit</p>			
Brystsele H-sele Sternum	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Beskyttelseskappe f. Y-sele	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten l120cm	J929017	323495		Svart, 55x25x65 mm	J923615	323633
	medium l135cm	J929018	323498		<p>Beskyttelseskappe for hoftebelte med trykkklås. Sikrer mot utilsikket åpning av selen.</p>		
	stor l153cm	J929019	323501		<p>Brystsele Sternum med monteringskit.</p>		
Sidestøtte buet pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidestøtte rett pute	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten sett, stenger 19,5cm	J929020	323811		rett pute sett, stenger 19,5cm	J929022	323813
	liten sett, stenger 22,5cm	J929046	323814		rett pute sett, stenger 22,5cm	J929048	323816
	stor sett, stenger 19,5cm	J929021	323812		<p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet og støtte. Støtten er regulerbar i høyden, dybden og bredden. Kroppsstøtten kan svinges til siden og monteres på ulike kroppsstøttestenger, slik at de passer i forhold til kroppens bredde. Merk: Husk monteringssett!</p>		
	stor sett, stenger 22,5cm	J929047	323815		<p>Merk: Husk monteringssett!</p>		
Monteringskile for Supportrygg)	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Monteringssett for sidestøtter	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	kile f montering, Support-rygg	J928405	323637		2stk l:15cm	J101001	323639
	<p>Monteringskile for sidestøtte Support rygg</p>				1stk l:15cm	J101080	323640
Sidestøtte lår/hofte, sett stang 17,5cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Sidestøtte lår/hofte, sett stang 12,5cm	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	liten l11xb6,5cm	J58053052	323806		liten l11xb6,5cm	J58056052	323805
	stor 25xh7,5cm	J58054052	323810		stor l25xh7,5cm	J58057052	323809
	medium l19xh7,5cm	J58055052	323808		medium l19xh7,5cm	J58058052	323807
<p>Sidestøtte med stang 17,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.</p>				<p>Sidestøtte med stang 12,5cm. Monteres under sete og hjelper bruker for støtte i sittestillingen.</p>			



Benstøtte, fotstøtte & sidestøtte

Benstøtte m. fast vinkel for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929355	323505
ve 67° kompl	J929356	323506

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte m. fast vinkel for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 67° kompl	J929357	323509
ve 67° kompl	J929358	323510

Benstøtte med 67° fast vinkel, som er sidehengt, svingbar og avtagbar, med oppklappbar fotplate og justerbar lengde. Benstøtten kan svinges ut til siden og fjernes helt. Fotplaten kan justeres i vinkel og har sklisikker overflate.

Benstøtte, vinkelstillbar for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929359	323507
ve 68°-7° kompl	J929360	323508

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Benstøtte, vinkelstillbar for stol med el.høyderregulering



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
hø 68°-7° kompl	J929361	323512
ve 68°-7° kompl	J929362	323511

Benstøtte med 68-7° vinkling. Benstøtten har leggpute og kan vinkles og innstilles høyt, hvis bruker har behov for avlastning av ben i hevet posisjon.

Må kun monteres i 1 side!

Fotstøtte, medium



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
medium b33,5xd-25cm. lang: l31-46cm	J929349	323582
medium b33,5xd-25cm. kort: l26-36cm	J929350	323581

Medium fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte, stor



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
stor b28,3xd27,5cm, lang: l31-46cm	J929347	323580
stor b28,3xd27,5cm, kort: l26-36cm	J929348	323579

Stor fotstøtten med 10° vinkel og LP-plastplate er montert under setet og følger med om høyden endres, noe som gir brukeren god støtte til føttene. **Merk:** Fotstøtte LP kan ikke velges ved stoler med seterotasjon.

Fotstøtte



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
f hjul m dobbel hjulbane kompl	J928731	323584
standard type kompl	J928732	323585

Fotstøtte for å oppnå en god sittstilling og samtidig være i stand til å hvile føttene når en høy sittstilling er nødvendig. Fotstøtten kan oppfelles slik at den ikke er i veien for å komme inn og ut av stolen.

Fotstøtte, enkel



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Fotstøtte hø ve inkl feste	J928740	323583

Gir støtte i sittstilling. Fotstøtten er plassert under stolrammen, ved høyre og/eller venstre forhjul. Støtten kan enkelt dreies ut med foten og støtte for en variert sittstilling. Kan enkelt dreies vekk når brukeren trenger å gå stolen frem.

Amputasjonsstøtte for manuell stol



Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929351	323340
Venstre side b16xh26cm	J929352	323341

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.

Amputasjonsstøtte for stol med el.høyderregulering












Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
Høyre side b16xh26cm	J929353	323342
Venstre side b16xh26cm	J929354	323343

Komplett amputasjonsstøtte for benamputerte. Polstret pute som kan vinkles og justeres i forhold til avstanden til setet. Puten er laget i en mykt stoff, og har god polstring.



Bremser, hjul, antitipp & tilbehør

Bremsestang	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Hjulsett dobbel hjulbane	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	std. lengde 39cm	J929023	323529		Hjulsett 4hjul	J928736	323609
	regulerbar lengde 44-62cm	J929024	323530		Doble hjul med dobbel hjulbane som triller lett vil hjelpe bruker med å gå og svinge stolen.		
	regulerbar lengde 44-62cm m. T-grep	J929025	323531				
<p>Forlenger til bremsepedal er en fordel for brukeren ved høy sittehøyde, ved redusert kraft eller hvis brukeren har vanskelig for å nå en bremse med standard lengde.</p>							
Hjulsett komplett inkl bremser	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bremsesett for 4 hjulsbrems	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	2hjul + 2hjul m bremser	J929006	323608		el-bremser m mont kit	J929173	323524
	4hjul m bremser	J929007	323610		manuell bremser komplett kit	J928757	323528
	4hjul m el bremser	J929008	323607		<p>Sett for skifte fra 2 til 4-hjulsbremser. 4-hjulsbremser sikrer optimal bremsing på alle fire hjul, selv på ujevne overflater. Er godt egnet til brukere som er meget urolige, eller om stolen skal stå på et ujevnt underlag.</p>		
Antitipp hjul	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Antitippbøyle	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	foran 2stk kompl	J929151	323350		Antitippbøyle kompl m. mont. kit	J929121	323347
	bak 2stk kompl	J929152	323349		<p>Anti-tipp-bøyle gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel når stolen skal brukes til brukere med voldsomme bevegelser. Bøyle monteres bak på stolen og sikrer at stolen ikke kan velte bakover.</p>		
	foran og bak 4stk kompl	J929153	323351				
<p>Velegnet for brukere som trenger stabilitet. Antitipp hjul kan monteres foran og/eller bak på stolen og gir stolen ekstra stabilitet, noe som er en fordel til brukere med voldsomme bevegelser.</p>							
Kjørebøyle høyde- vinkel- og dybdeinstillbar	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Bord med feste nedfellbart	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.
	komplett m feste	J929345	323627		Bord b52xd40cm	J928749	323516
	<p>Kjørebøylen gir hjelperen god arbeidsstilling når det er behov for å transportere brukeren i stolen. Kjørebøylen er regulerbar i vinkel, høyde og dybde så den passer den som skyver stolen. Kjørebøylen kan enkelt avmonteres.</p>				Bord b60xd49cm	J928750	323517
				<p>Nedfellbart bord i akryl med bøyle og oppheng. Er avtakbart og kan reguleres i høyde, dybde og bredde, slik at det passer til brukers sittestilling. Kan monteres i høyre eller venstre side. Bordet hviler på begge armlener når det er montert på stolen.</p>			

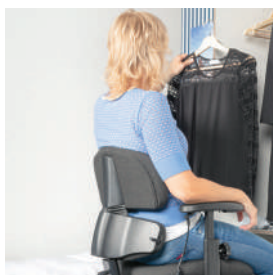

Elektriske funksjoner

Se elektriske funksjoner på lift, tilt, rygg, bremser, fremdrift og Utstigningshjelp her:

Side 37



Elektriske innstillingsmuligheter

<p>Seteløft 30cm</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seteløftmotor 30cm</td> <td>J929334</td> <td>323644</td> </tr> </tbody> </table> <p>Motor for elektrisk seteløft for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Seteløftmotor 30cm	J929334	323644	<p>Utstigningshjelp med el</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kompl m/30 cm motor</td> <td>J929332</td> <td>323936</td> </tr> <tr> <td>kompl m/20 cm motor</td> <td>J929344</td> <td>I/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alternativ løsning for å reise og sette sig. Utstigningshjelp gir sikkerhet og støtte når bruker reiser sig opp og setter sig i stolen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	kompl m/30 cm motor	J929332	323936	kompl m/20 cm motor	J929344	I/A						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Seteløftmotor 30cm	J929334	323644																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
kompl m/30 cm motor	J929332	323936																						
kompl m/20 cm motor	J929344	I/A																						
<p>Soft touch alternativ styring</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El løft soft touch hø ve front</td> <td>J929054</td> <td>323549</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soft touch-hev/senk bryter f. armlen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El løft soft touch hø ve front	J929054	323549	<p>Håndkontroll alternativ styring</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>el løft i håndkontroll m. mont kit</td> <td>J929055</td> <td>323550</td> </tr> <tr> <td>Bryter 1 funksjon m jackhylse</td> <td>J924047</td> <td>323620</td> </tr> </tbody> </table> <p>Håndkontroll for ulike elektriske funksjoner på VELA Tango 700-serien.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550	Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
El løft soft touch hø ve front	J929054	323549																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
el løft i håndkontroll m. mont kit	J929055	323550																						
Bryter 1 funksjon m jackhylse	J924047	323620																						
<p>Elektrisk brems</p> <p>J929675</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El brems u el boks</td> <td>J929676</td> <td>329599</td> </tr> <tr> <td>El brems kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929675</td> <td>330110</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk brems for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El brems u el boks	J929676	329599	El brems kompl m el boks inkl armlenpute	J929675	330110	<p>Elektrisk setetilt</p> <p>J929669</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El tilt u el boks</td> <td>J929671</td> <td>329597</td> </tr> <tr> <td>El tilt kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929669</td> <td>330112</td> </tr> </tbody> </table> <p>Setetilt gir bruker god aktiv sittestilling, tilbakelett gir god støtte ved hvile i stolen. For stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El tilt u el boks	J929671	329597	El tilt kompl m el boks inkl armlenpute	J929669	330112			
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
El brems u el boks	J929676	329599																						
El brems kompl m el boks inkl armlenpute	J929675	330110																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
El tilt u el boks	J929671	329597																						
El tilt kompl m el boks inkl armlenpute	J929669	330112																						
<p>elektrisk ryggvinkel</p> <p>J929672</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El rygg u el boks</td> <td>J929674</td> <td>329598</td> </tr> <tr> <td>El rygg kompl m el boks inkl armlenpute</td> <td>J929672</td> <td>330111</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrisk justerbar ryggvinkel for brukere som har behov for hjelp til å justere, eller for forsiktig justering av ryggvinkelen.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	El rygg u el boks	J929674	329598	El rygg kompl m el boks inkl armlenpute	J929672	330111	<p>Fremdriftshjelp, elektrisk</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fremdriftshjelp</td> <td>J929339</td> <td>323586</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fremdriftshjelp for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Fremdriftshjelp	J929339	323586						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
El rygg u el boks	J929674	329598																						
El rygg kompl m el boks inkl armlenpute	J929672	330111																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Fremdriftshjelp	J929339	323586																						
<p>Holder for håndkontroll</p>  <p>J928899</p> <p>929757 & 929758</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holder f håndkontroll kompl</td> <td>J928899</td> <td>323616</td> </tr> <tr> <td>Nedklappelig holder Hs f/1 og 5 funk. kont.boks JC</td> <td>929757</td> <td>Ny holder</td> </tr> <tr> <td>Nedklappelig holder Vs f/1 og 5 funk. kont.boks JC</td> <td>929758</td> <td>Ny holder</td> </tr> </tbody> </table> <p>Holder for håndkontroll, komplett for stoler med elektrisk høydeinnstilling/elektriske funksjoner.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616	Nedklappelig holder Hs f/1 og 5 funk. kont.boks JC	929757	Ny holder	Nedklappelig holder Vs f/1 og 5 funk. kont.boks JC	929758	Ny holder	<p>El boks</p> <p>J929665</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beskrivelse</th> <th>Art.nr.</th> <th>HMS art.nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inkl håndkontroll for 20cm motor</td> <td>J929665</td> <td>329596</td> </tr> <tr> <td>inkl håndkontroll for 30cm motor</td> <td>J929666</td> <td>330109</td> </tr> </tbody> </table> <p>Boks for elektriske funksjoner for stoler med elektrisk høydeinnstilling.</p>	Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.	inkl håndkontroll for 20cm motor	J929665	329596	inkl håndkontroll for 30cm motor	J929666	330109
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
Holder f håndkontroll kompl	J928899	323616																						
Nedklappelig holder Hs f/1 og 5 funk. kont.boks JC	929757	Ny holder																						
Nedklappelig holder Vs f/1 og 5 funk. kont.boks JC	929758	Ny holder																						
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art.nr.																						
inkl håndkontroll for 20cm motor	J929665	329596																						
inkl håndkontroll for 30cm motor	J929666	330109																						