



Ledsagerstyring

Manual. nr. 105754





ADVARSEL

Stolen må ikke løftes eller vippes med bruk av håndtaket



Viktig: Les denne bruksanvisningen grundig. Den bør alltid være tilgjengelig for bruker/ledsager og følge med produktet, da den inneholder nyttig informasjon om innstilling, betjening og vedlikehold av ledsagerstyringen.

Ved spørsmål kontakt:

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4

1599 Moss

Norge

www.vermundlarsen.no

REKLAMASJONSRETT

VELA gir reklamasjonsrett i henhold til norsk kjøpslov. Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt for tilpasninger som er utført av en autorisert servicetekniker.

VELA påtar seg ikke ansvar for skader på produktet eller brukeren som har oppstått på grunn av:

- :: Transport
- :: Misbruk
- :: Vanlig slitasje
- :: Feil bruk

:: Bruk av uoriginale deler og tilbehør

:: Tilpasninger utført av uautorisert servicetekniker

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler årlig ettersyn, slik at eventuelle defekte eller slitte deler kan oppdages. Man bør selv utføre regelmessig kontroll for å teste ledsagerstyrings funksjoner, at ledsagerstyringen er godt festet til stolen, at alle bevegelige deler sitter ordentlig fast og at alle skrueforbindelser er i orden. Mosegummien på kjørehåndtakene bør skiftes ut hvis den er skadet.

Merk: Ikke bruk ledsagerstyringen hvis den ikke oppfører seg som normalt, f. eks. hvis ledsagerstyringen slår av stolen under tilkobling.


Tilkall tekniker for justering/utskifting av fjærhus.

DEPONERING

Dette produktet inneholder resirkulerbare materialer som plast, metall og elektrisk og elektronisk utstyr, etc. Som et resultat av dette, må avhending av produktet utføres i samsvar med lokal lovgivning og det må skilles fra vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending og resirkulering bidrar til å forhindre at produktet har en negativ innvirkning på miljøet og mennesker.

INNSTILLINGER OG BRUK

Dette produktet er et tilbehør til rullestoler med elektriske funksjoner. 2-hånds ledsagerstyring gir komfort og ergonomisk riktige bevegelser for ledsageren mens han eller hun går bak og styrer stolen.

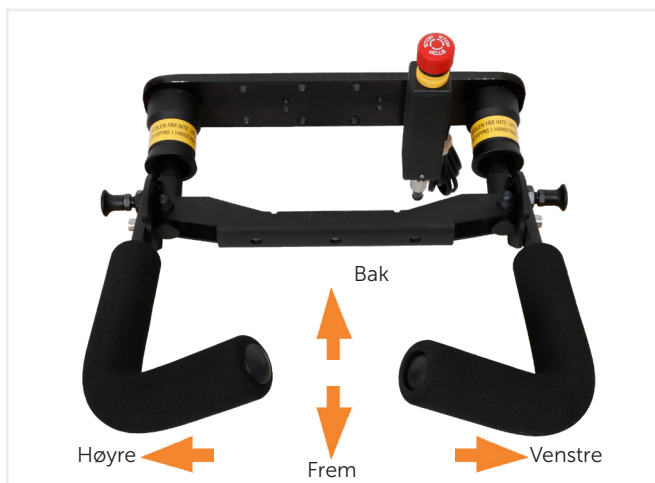

BRUK AV LEDSAGERSTYRING


Fremover: kjørehåndtakene trykkes ned for å kjøre fremover.

Bak: kjørehåndtakene løftes opp for å kjøre bakover.

Høyre: skyv kjørehåndtakene til venstre for å svinge til høyre.

Venstre: skyv kjørehåndtakene til høyre (motsatt) for å svinge til venstre (motsatt retning).

Merk: når håndtakene slippes så finner de midtstilling, og stolen stanser.

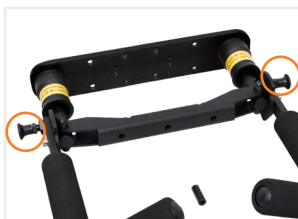

JUSTERING AV KJØREHÅNDTAKENE

En hurtigkobling trekkes ut på begge sider, som gjør at man enkelt kan justere kjørehåndtakene i ulike høyder for en behaglig kjørestilling. **Merk:** kjørehåndtakene kan slås ned når de ikke brukes, også når brukeren kjører rullestolen selv. Dette bør også alltid gjøres under transport og lagring for å minske risikoen for skader.



NØDSTOPP

Nødstopp skal alltid være tilkoblet når ledsagerstyringen brukes. Om en nødsituasjon skulle oppstå slik at stolen må stanses, trykkes nødstopppknappen ned. Stolen stopper umiddelbart. For å kunne kjøre stolen igjen, vri nødstopppknappen mot høyre, slik at den kommer opp i normal stilling igjen.

Advarsel: Ledsagerstyringens kjørehåndtak må aldri benyttes for å løfte eller vippe stolen over hindringer, fortauskanter og lignende! Dette kan føre til deformering eller negativ innvirkning på kjøregenskaper, slik som skade på enheten, som kan føre til at den ikke lenger fungerer som den skal.



**ADVARSEL**

Stolen må ikke løftes eller vippes med bruk av håndtaket

**PRODUSENT:**

Attende AS har levert denne ledsagerstyringen i samsvar med:
EMC direktiv 89/336/EØF, 92/31 EØF, Direktiv om medisinsk utstyr 93/42/EØF,
Maskindirektiv 89/392/EØF og Forskrift om elektrisk utstyr.

Produktet er CE-merket.

Materialer: stål, aluminium og plast. Alle deler som er utsatt for korrosjon er pulverlakkerte. Dette gir en robust overflate som tåler en del slitasje.

Om det oppstår slitasje som følge av "unormal bruk", f. eks. ved bruk av kjørehåndtakene som "løfteredskap", må fjærhuset skiftes.