



Rengjøring og vedlikehold

Informasjon om rengjøring og vedlikehold av VELA Blues rullestoler.

RENGJØRING

VELA Blues rullestoler rengjøres ved behov. For skikkelig rengjøring, brukes mildt såpevann uten slipemiddel og en myk børste eller klut. Du trenger ikke verktøy for å rense den elektriske stolen. Det er dessuten viktig at du ikke bruker kjemikalier, sterke rengjøringsmidler eller børster og lignende som kan ripe eller skade produktet.

Sete og rygg kan våt renses med møbelrens eller tørkes av med en fuktig klut. Sete og rygg kan også støvsuges og tørkes av med en tørr klut.

Merk: Stolen skal stå på jevnt underlag ved rengjøring. Stolen må aldri spyles med rennende vann eller ved høytrykk.

Stolen må rengjøres ved å fjerne store gjenstander for hånd.

Hvis mulig, blåse støvet bort med en blåsepistol - være forsiktig for ikke å blåse direkte inn i de elektriske komponentene. Tørk av stolen med en fuktig klut med mild såpe på, og la stolen lufttørke.

Det er tillatt å bruke godkjente desinfeksjonsmidler for overflater på stolen.

Etter vask bør alle bevegelige deler, som i utgangspunktet er smurt, smøres opp med WD40 eller annen syrefritt smøremiddel.

VEDLIKEHOLD

For å holde produktets standard, kvalitet og funksjonalitet, skal den stolen ha ettersyn, vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

VELA anbefaler et serviceintervall hver 2500 driftstimer eller en gang i året.

I tillegg sjekkes dens funksjonalitet, sikkerhet og batterier etter behov.

Kontroll	Daglig	Ukentlig	månedlig
Joystick viser ingen feilmelding	X		
Batteri må være ladet	X		
Kontroll av bremsene	X		
Armlene må være festet		X	
Fotplate må være festet		X	
Kontrollere skruforbindelser			X
Drivhjul kan bevege sig fritt			X
Sete og ryggputene er intakte			X



Før den elektriske stolen kan gjenbrukes må den gjennomgå en sjekk og være grundig rengjort. Ettersom dette også er en teknisk kontroll skal du erstatte de delene som ikke fungerer lenger. Av hygieniske grunner, er det anbefalt at sete og ryggputer og dekker erstattet ved resirkulering av elektriske stolen.

Sjekkliste for periodisk ettersyn og klargjøring for gjenbruk.

Dato: _____

Bruker: _____

Stolens identitetsnummer: _____

Ettersynsrutine	Hvor?	Ok	Byttet	Justert	Reparert	Utført av
Visuell sjekk	Kappe					
	Lys					
	Dekk					
	Lakk					
Funksjoner	Elektriske funksjoner					
	Kjørekarakteristikk					
	Hastighetsbegrenser					
Mekanikk	Rotasjonsenhet (VELA Blues 300)					
	Svinggaffel					
	Låseringer					
	Settskruer					
	Drivmotorer					
	Brems					
	Mikrobryter					
	Aktuatorinnfestning					
	Ryggaktuator					
	Løfteaktuator					
Smørepunkter	Tiltelektuator					
	Benstøtter					
	Feillog					
Elektronikk	Batteri					
	Ledninger					
	Lader					
	Hovedkabler					
Diverse	Koblinger powermodul					
	Kobling aktuatorer					
	Vask og rens					
	Brukerjustering					
	Brukermanual					



Demontering & avfallshåndtering

Informasjon om demontering og avfallshåndtering for VELA Blues rullestoler. Dessuten kan du også lese om hva VELA gjør i forhold til ansvarlig og sikker avfallshåndtering.

VELA anbefaler at produkter som skal kasseres, leveres til en godkjent gjenbruksstasjon for å sikre en ansvarlig og miljøvennlig avfallshåndtering. Batterier og elektronikk skal håndteres som spesialavfall.

PRODUSENTANSVAR (EE-PRODUKTER)

Vermund Larsen Norge AS er tilsluttet det offentlig godkjente returselskapet Eurovirement AS. Dette medlemskapet oppfyller produsentansvar for kasserte elektriske og elektroniske produkter innenfor følgende kategorier:

1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11, 12, 13 og 14.

Vermund Larsen Norge AS lever opp til avfallsforskriften av 2004-06-01 nr 930:Kap. 1 (EE-forskriften). Eurovirement AS garanterer på vegne av tilsluttede medlemmer at forpliktelsen blir løst gjennom en landsdekkende returordning som sikrer miljøriktig håndtering, sanering og gjenvinning av EE-avfall, samt rapportering til offentlige myndigheter.

Eurovirement AS er godkjent av Miljødirektoratet som et kollektiv finansiert returselskap for alle kategorier EE-avfall, samt sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og sertifiseringsbestemmelsene i Avfallsforskriftens kapittel 1.

KJEMIKALIER

VELA er kjent med og respekterer miljøvernmyndighetenes forskrift om kjemikalier.

VELA håndterer farlige stoffer i overensstemmelse med EU-direktiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer, EU-direktiv 99/45/EC av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer, FN PIC-konvensjonen om forhåndsgodkjenning av import av farlige kjemikalier og plantevernmidler, POP FNs konvensjon om forbud og fjerning av sterkt forurensende organisk stoffer og FNs protokoll for å fase ut ozonreducerende stoffer.

AVFALL

Avfall, inkludert resirkulerbart avfall er sortert etter miljøvernmyndighetenes regler og vil bli gjenvunnet eller avhendet til godkjent mottaksanlegg. Farlig avfall merkes, lagres og avhendes i henhold til offisielle instruksjoner til miljømessig godkjente mottaksanlegg.

VELA er kjent med og respekterer de norske kravene til sortering, gjenvinning og deponering av avfall gjemmen avfallsforskriften av 2004-06-01 nr 930:Kap. 1 (EE-forskriften). VELA opererer i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall, EU-direktiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig avfall, EU forordning 259/93/EØF av 1. februar 1993 om tilsyn og kontroll av avfallstransport innenfor, til og ut av det europeiske fellesskap samt Basel-konvensjonen om grensekryssende transport av avfall.