




Fremdriftshjelp

TIL:

700E & 600ES

Manual. nr. 105759

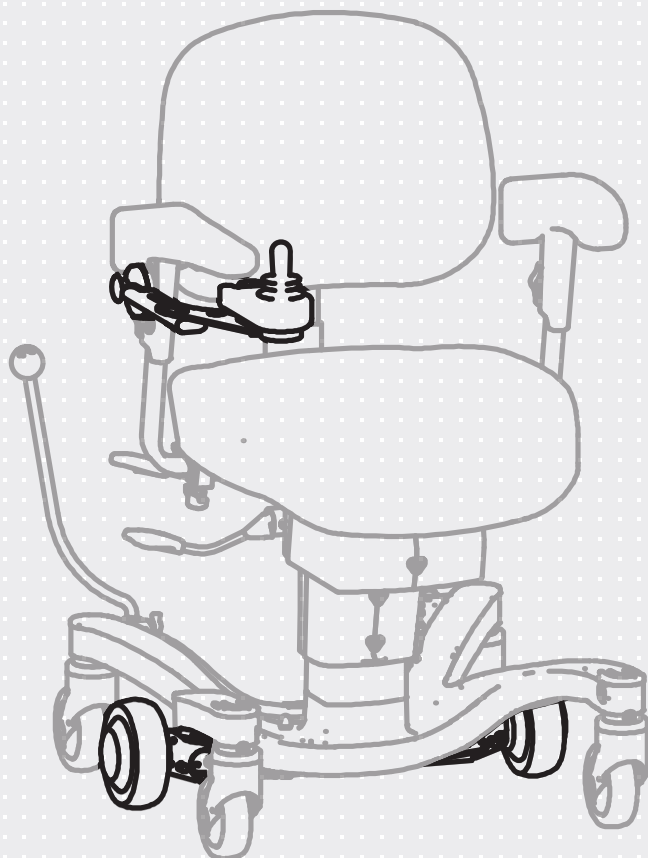ISO 9001
ISO 14001

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0. INNLEDNING	3
1.1. ADVARSLER	4
1.2. FEILSØKING	5
1.3. TILSIKTET BRUK	6
1.3.1. Følgende kan påvirke batterikapasiteten	6
1.3.2. Kontraindikasjoner	6
1.4. BRUKSANVISNING	8
1.4.1. Slå på/av drivesystemet	8
1.4.2. Styring	8
1.4.3. Hastighet	8
1.4.4. Foldbart joystick	8
1.4.5. Høydebegrensning	9
1.4.6. Batteriindikator	9
1.4.7. Hjul som kan foldes opp	9
1.4.8. Bremsing	9
1.4.9. Juster joystick	10
1.4.10. Batterilading	10

1.0. INNLEDNING

KJÆRE KUNDE

Gratulerer med din nye fremdrift-tilbehør fra VELA.

Dette produktet er ikke i seg selv et medisinsk apparat, men et tilbehør til VELA Tango 700E- og VELA Tango 600ES-stolene. Vennligst se bruksanvisningen for VELA Tango 700E eller VELA Tango 600ES for tiltenkt bruk og annen informasjon.

Dette dokumentet fungerer som et tillegg til bruksanvisningen som følger med VELA Tango 700E- og VELA Tango 600ES-stolene.

Viktig

Vennligst les denne brukermanualen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge stolen. Brukermanualen kan også finnes på www.vermundlarsen.no, hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon om våre stoler.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Vermund Larsen Norge AS

Solgaard Skog 4
1599 Moss
Norge
www.vermundlarsen.no

1.1. ADVARSLER



Når fremdriftshjelp er montert, er stolen mer retningsstabil og kan derfor ikke bevege seg direkte sidelengs.

Bruk	Ikke bruk drivesystemet mens bremsen er aktivert.
Bruk	Ikke bruk drivesystemet når drivhjulene ikke er i kontakt med gulvet.
Bruk	Ikke bruk drivesystemet når du ikke sitter i stolen.
Bruk	Ikke kjør mens stolen er montert på laderen.
Bruk	Skal monteres av kvalifisert personell.
Bruk	Vær oppmerksom på omgivelsene dine.
Bruk	Ikke kjør utendørs eller på skråninger.
Underlag	Bruk av fremdriftshjelp på tepper øker friksjonen og forkorter batteriets levetid. Vi fraråder derfor all bruk på tepper og myke gulv.
Sikkerhet	Av sikkerhetsmessige grunner må brukeren ved et uventet batteristopp selvstendig kunne utføre en forflytning til og fra stolen.
Batteri	Batteriet skal lades helt opp hver kveld/natt. Økt behov for lading vil forkorte batteriets levetid.
Bruk	Dette tilbehøret fungerer ikke sammen med doble hjul eller seterotasjon.
Bruk	Ikke tråkk på motorkontrollen, som befinner seg nederst på stolrammen mellom bakhjulene.
Bruk	Bremsen er IKKE koblet til drivsystemet. Bruk bremsen som beskrevet i avsnitt 1.4.8.

1.2. FEILSØKING

Monteringsinstruksjon 106234 kan finnes på: www.vermundlarsen.no

Feilkode	Årsak	Løsning
Feilkode C1 vises i displayet	Høydejusteringen er satt for høyt. Mekanismen for høydebegrensning er defekt.	Senk setehøyden Gjennomgå monteringsinstruksjonen, trinn 3, nr. 14 igjen.
Feilkode C8 vises i displayet	Lavt batteri.	Lad stolen
Feilkode C2 vises i displayet	Joysticken var ikke i nøytralstilling da drivsystemet ble slått på.	Løsne joysticken og start drivesystemet på nytt
Utilstrekkelig dreiemoment	Tykke eller løse tepper, myke gulvbelegg. Skrå overflate. Lavt batteri. Høy rullemodstand. Fartskontrollen er skrudd ned.	Unngå disse typer gulvbelegg Ikke kjør på skråninger Lad stolen Hjelp med føttene dine Skru opp hastigheten. Se 1.4.3.
Høy motstand når du trækker med føttene	Drivsystemet er slått på.	Slå av drivesystemet

Hvis de ovenstående løsningene ikke løser ditt problem, bør du kontakte din VELA-leverandør.

1.3. TILSIKTET BRUK

Fremdriftshjelp er et tilbehør til VELA Tango 700E og 600ES som gir brukeren ekstra assistanse og dermed forlenger muligheten for selvstendig å utføre daglige innendørs aktiviteter. Det er ikke en erstatning for en elektrisk rullestol, men en støtte til brukere som trenger hjelp til å skape fremdrift i stolen.

1.3.1. FØLGENDE KAN PÅVIRKE BATTERIKAPASITETEN

Utvidet bruksmønster: En arbeidsstol med fremdriftshjelp skal brukes på samme måte som en arbeidsstol uten fremdriftshjelp. Dette betyr at brukeren selv "går" stolen rundt sittende i stolen.

Dersom stolen brukes med føttene plassert på en fotbøyle under kjøring, forkorter det batteriets levetid.

Høy brukervekt: Hvis brukeren veier rundt 100 kg eller mer, kan dette påvirke batteriets kapasitet og dermed driftstiden.

Underlag: Arbeidsstolen med fremdrift har best forhold på harde gulv som tre- eller linoleumsgulv. Bruk av fremdriftshjelp på tepper øker friksjonen og forkorter batteriets levetid. Derfor frarådes all bruk på tepper og myke gulv.


Lading: Batteriet skal lades helt opp hver kveld/natt. Økt behov for lading vil forkorte batteriets levetid.

Merk: En kombinasjon av flere eller alle ovennevnte faktorer vil i stor grad forkorte batteriets levetid.

1.3.2. KONTRAINDIKASJONER

Av sikkerhetsmessige grunner må brukeren ved et eventuelt batteristopp selvstendig kunne utføre en forflytning til og fra stolen.


1.4. BRUKSANVISNING

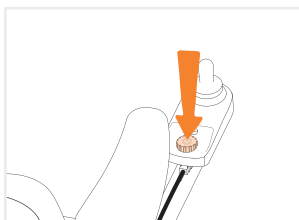

1.4.1. SLÅ PÅ/AV DRIVESYSTEMET


Slå på drivesystemet ved å trykke på på-/av-knappen på kontrolleren. Slå av ved å trykke på den igjen.

Drivesystemet slår seg av automatisk etter 5 minutters inaktivitet.

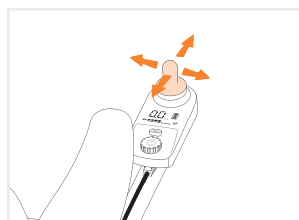

1.4.2. STYRING


Bruk joysticken på kontrolleren til intuitivt å kontrollere retning og hastighet. Merk at det er en gradvis økning og nedtrapping for å sikre en jevn kjøretur. Du kan kjøre ved å bare bruke drivesystemet eller kombinere det med bruk av føttene dine som assistanse.

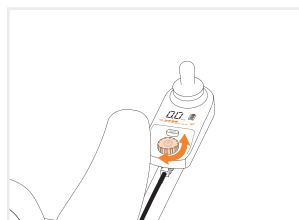

1.4.3. HASTIGHET


Vri på/av-knappen til en av sidene for å justere maksimal hastighet. Skalaen går mellom full og halv hastighet.

Merk at dreiemomentet er knyttet til hastigheten, dermed jo høyere hastighet, desto bedre kan du komme fremover.

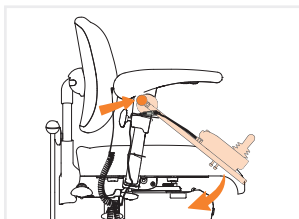

1.4.4. FOLDBART JOYSTICK


For å kunne komme nærmere bordet eller bare være unna når det ikke er i bruk, kan du folde ned kontrolleren. Trykk på den oransje knappen, og tyngdekraften får joysticken til å folde ned. For å sette den tilbake på plass, løft joysticken opp igjen. Merk at du ikke kan trykke på knappen når vekt legges på joysticken.

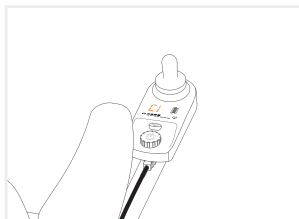

1.4.5. HØYDEBEGRENSNING


Av sikkerhetsmessige årsaker kan stolen ikke kjøre når høydeinnstillingen er for høy. Kontrolleren kutter automatisk strømmen til hjulene hvis innstillingen er for høy. Dette kan sees på kontrolleren som viser "C1" på displayet.

Den aktiveres automatisk igjen når høyden senkes til et akseptabelt nivå.

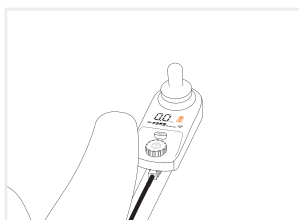

1.4.6. BATTERIINDIKATOR


På kontrolleren er det en batteriindikator som er aktiv når fremdriftssystemet er slått på. Høydejusteringen og fremdriftssystemet bruker det samme batteriet, så stolen lades fortsatt normalt. Vær oppmerksom på at indikatoren kan undervurdere batterikapasiteten ved overdreven bruk. Daglig lading anbefales for forbedret batterilevetid.

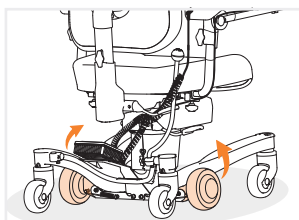

1.4.7. HJUL SOM KAN FOLDES OPP


Hjulene kan foldes opp for å tillate at VELA-stolen fungerer fullstendig som den gjorde uten fremdriftssystemet. Løft enkelt og greit fremdriftshjulene manuelt til de ikke lenger har kontakt med rammen. Da kan du bevege stolen sidelengs igjen.

For å aktivere fremdriftshjulene på nytt, trykk dem bare ned igjen.

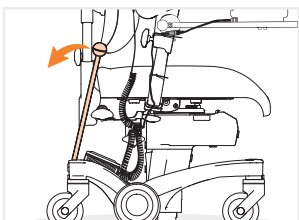

1.4.8. BREMSING

Bremsen du kjenner fra din VELA-stol er ikke koblet til fremdriftssystemet. Du må derfor huske å låse opp bremsen før du kjører. Merk at dette gjelder både manuelle og elektriske bremses.

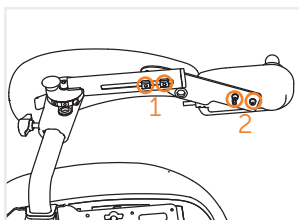

1.4.9. JUSTER JOYSTICK

Joysticken kan justeres i både dybde og bredde. Løsne de to skruene (1) som er synlige ved siden av styrespaken for å justere posisjonen til styrespaken. Skru løs de to skruene (2) under joysticken for å justere vinkelen. Husk å stramme alle fire skruene igjen etterpå.



1.4.10. BATTERILADING

Lad hver dag. Ladestikket bak på armlene trekkes ut og settes i ladekontakt på batteriladeren. Batteriladeren settes så i stikkontakten. Batteriene blir ladet når lampen på laderen lyser gult. Når lampen lyser grønt er batteriene ferdig ladet.

Merk: Stolen må ikke brukes under lading.

