


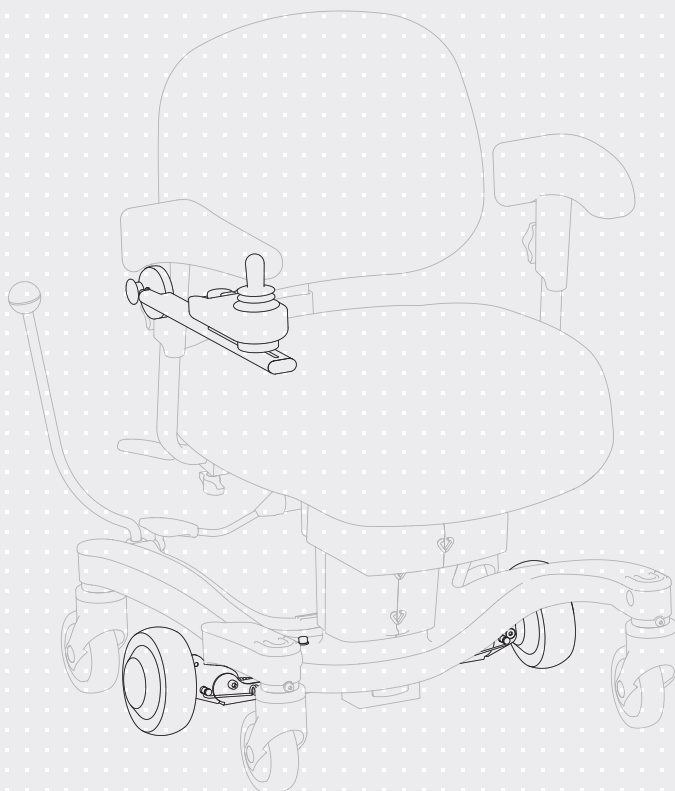

# Fremdriftshjelp

TIL: 700E

Manual. nr. 105759



ISO 9001  
ISO 14001

## INNHALDSFORTEGNELSE

<b>1.0. INNLEDNING</b>	<b>3</b>
<b>1.1. ADVARSLER</b>	<b>4</b>
<b>1.2. FEILSØKING</b>	<b>5</b>
<b>1.3. BRUKSANVISNING</b>	<b>6</b>
1.3.1. Slå på/av drivesystemet	6
1.3.2. Styring	6
1.3.3. Hastighet	6
1.3.4. Foldbart joystick	6
1.3.5. Høydebegrensning	7
1.3.6. Batteriindikator	7
1.3.7. Hjul som kan foldes opp	7
1.3.8. Bremsing	7

## 1.0. INNLEDNING

### KJÆRE KUNDE

Gratulerer med din nye fremdrift-tilbehør fra VELA.

Dette produktet er ikke en medisinsk enhet i seg selv, men et tilbehør til VELA Tango 700E-stol. Vennligst se brukerhåndboken til VELA Tango 700E for tiltenkt bruk og annen informasjon.

Dette dokumentet fungerer som et tillegg til bruksanvisningen som følger med arbeidsstolen.

#### **Viktig**

Vennligst les denne brukermanualen grundig og ta vare på den til senere bruk. Den bør alltid være tilgjengelig for brukeren og følge stolen. Brukermanualen kan også finnes på [www.vermundlarsen.no](http://www.vermundlarsen.no), hvor du i tillegg kan finne annen relevant informasjon om våre stoler.

Har du spørsmål, opplever feil eller utilsiktede hendelser, kontakt din VELA-leverandør.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

#### **Vermund Larsen Norge AS**

Solgaard Skog 4

1599 Moss

Norge

[www.vermundlarsen.no](http://www.vermundlarsen.no)

## 1.1. ADVARSLER



Drevsystemet gir assistanse til stolens mobilitet, samtidig som du fortsatt kan bruke beina til å bevege deg. Det er ikke ment å brukes som en rullestol. Når det er montert, er stolen mer retningsstabil og kan derfor ikke bevege seg direkte sidelengs.

<b>Bruk</b>	Ikke bruk drivesystemet mens bremsen er aktivert.
<b>Bruk</b>	Ikke bruk drivesystemet når drivhjulene ikke er i kontakt med gulvet.
<b>Bruk</b>	Ikke bruk drivesystemet når du ikke sitter i stolen.
<b>Bruk</b>	Ikke kjør mens stolen er montert på laderen.
<b>Bruk</b>	Skal monteres av kvalifisert personell.
<b>Bruk</b>	Vær oppmerksom på omgivelsene dine.
<b>Bruk</b>	Ikke kjør utendørs eller på skråninger.
<b>Bruk</b>	Overdreven bruk kan tømme batteriet raskere enn normalt. Husk å lade ofte.
<b>Bruk</b>	Dette tilleggsutstyret fungerer ikke sammen med dobbelthjul eller firhjulsbremse.
<b>Bruk</b>	Ikke tråkk på motorkontrollen, som befinner seg nederst på stolrammen mellom bakhjulene.


## 1.2. FEILSØKING

Monteringsinstruksjon 106234 kan finnes på: [www.vermundlarsen.no](http://www.vermundlarsen.no)

Feilkode	Årsak	Løsning
Feilkode C1 vises i displayet	Høydejusteringen er satt for høyt. Mekanismen for høydebegrensning er defekt.	Senk setehøyden Gjennomgå monteringsinstruksjonen, trinn 3, nr. 14 igjen.
Feilkode R6 vises i displayet	Lavt batteri.	Lad stolen
Utilstrekkelig dreiemoment	Joysticken var ikke i nøytralstilling da drivsystemet ble slått på.	Løsne joysticken og start drivesystemet på nytt
Høy motstand når du trækker med føttene	Tykke eller løse tepper, myke gulvbelegg. Skrå overflate. Lavt batteri. Høy rullemodstand. Fartskontrollen er skrudd ned.	Unngå disse typer gulvbelegg Ikke kjør på skrån timer Lad stolen Hjelp med føttene dine Skru opp hastigheten. Se 1.3.3.
High resistance when paddling with your feet	Drivsystemet er slått på.	Slå av drivesystemet

Hvis de ovenstående løsningene ikke løser ditt problem, bør du kontakte din VELA-leverandør.


## 1.3. BRUKSANVISNING

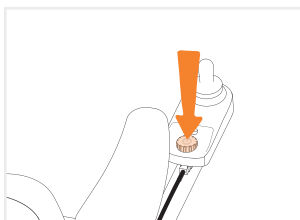

### 1.3.1. SLÅ PÅ/AV DRIVESYSTEMET


Slå på drivesystemet ved å trykke på på-/av-knappen på kontrolleren. Slå av ved å trykke på den igjen.

Drivesystemet slår seg av automatisk etter 5 minutters inaktivitet.

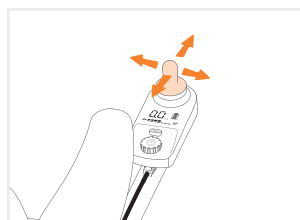

### 1.3.2. STYRING


Bruk joysticken på kontrolleren til intuitivt å kontrollere retning og hastighet. Merk at det er en gradvis økning og nedtrapping for å sikre en jevn kjøretur. Du kan kjøre ved å bare bruke drivesystemet eller kombinere det med bruk av føttene dine som assistanse.

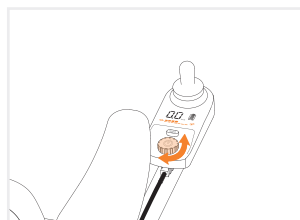

### 1.3.3. HASTIGHET


Vri på/av-knappen til en av sidene for å justere maksimal hastighet. Skalaen går mellom full og halv hastighet.

Merk at dreiemomentet er knyttet til hastigheten, dermed jo høyere hastighet, desto bedre kan du komme fremover.

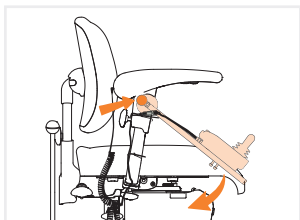

### 1.3.4. FOLDBART JOYSTICK


For å kunne komme nærmere bordet eller bare være unna når det ikke er i bruk, kan du folde ned kontrolleren. Trykk på den oransje knappen, og tyngdekraften får joysticken til å folde ned. For å sette den tilbake på plass, løft joysticken opp igjen. Merk at du ikke kan trykke på knappen når vekt legges på joysticken.

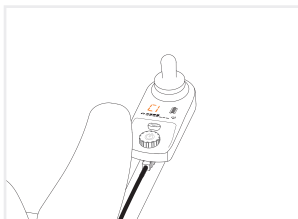

### 1.3.5. HØYDEBEGRENSNING


Av sikkerhetsmessige årsaker kan stolen ikke kjøre når høydeinnstillingen er for høy. Kontrolleren kutter automatisk strømmen til hjulene hvis innstillingen er for høy. Dette kan sees på kontrolleren som viser "C1" på displayet.

Den aktiveres automatisk igjen når høyden senkes til et akseptabelt nivå.

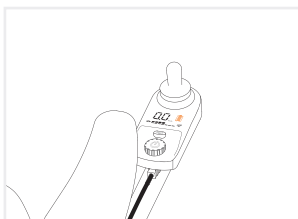

### 1.3.6. BATTERIINDIKATOR


På kontrolleren er det en batteriindikator som er aktiv når fremdriftssystemet er slått på. Høydejusteringen og fremdriftssystemet bruker det samme batteriet, så stolen lades fortsatt normalt. Vær oppmerksom på at indikatoren kan undervurdere batterikapasiteten ved overdreven bruk. Daglig lading anbefales for forbedret batterilevetid.

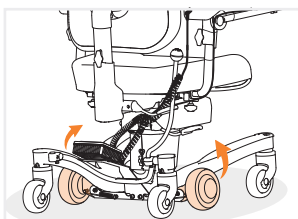

### 1.3.7. HJUL SOM KAN FOLDES OPP

Hjulene kan foldes opp for å tillate at VELA-stolen fungerer fullstendig som den gjorde uten fremdriftssystemet. Løft enkelt og greit fremdriftshjulene manuelt til de ikke lenger har kontakt med rammen. Da kan du bevege stolen sidelengs igjen.

For å aktivere fremdriftshjulene på nytt, trykk dem bare ned igjen.

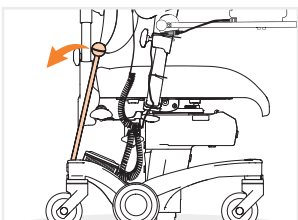

### 1.3.8. BREMSING

Bremsen du kjenner fra din VELA-stol er ikke koblet til fremdriftssystemet. Du må derfor huske å låse opp bremsen før du kjører. Merk at dette gjelder både manuelle og elektriske bremseser.

