

Fremdriftshjelp for VELA-stoler

Fremdriftshjelp er utviklet for at borgere med balanseutfordringer og borgere som raskt blir trette, kan ha en så selvstendig hverdag som mulig. Vi vet at autonomi og livskvalitet henger sammen, og med fremdriftshjelp kan man gi en brukergruppe, som ikke tidligere har hatt disse mulighetene i arbeidsstolen, muligheten for å få en så selvstendig hverdag som mulig.

Hva består fremdriftshjelp av?

Fremdriftshjelp består av hjul med hjelpemotorer, en styreenhet, en opphengsdel, en holder for joystick og et joystick. Settet kan monteres på alle VELA Tango 700EL-stoler. Når settet er montert på stolen, får brukeren muligheten til å velge elektrisk assistanse for å skyve stolen fremover, avhengig av energinivå og behov.

Hvordan fungerer det?

En VELA Tango 700EL med fremdriftshjelp fungerer akkurat som en VELA Tango 700EL. Fremdriftshjelpen assisterer brukeren slik at man kan opprettholde sin mobilitet når kreftene blir borte.

Fremdriftshjelp påvirker ikke størrelsen på stolen, verken i bredde eller dybde. Når fremdriftshjulene er felt ned, kan stolen ikke kjøre sidelengs. Dette gir god retningsstabilitet, slik at det ikke brukes energi på å korrigere stolen mens man "går rundt med den". - hvis sidelengs bevegelse er nødvendig, må brukeren manuelt vippe fremdriftshjulene opp og ned ved bruk.

Bedst egnet underlag?

Arbeidsstolen med fremdrift har best forhold på harde gulv som tre- eller linoleumsgulv men glatt overflate kan påvirke hjulenes grep. Bruk av elektrisk fremdrift på teppe kan begrense mobiliteten.

Bruk av fremdriftshjelp på teppe øker friksjonen og forkorter batteriets levetid. Derfor frarådes all bruk på teppe og myke gulv. Hvis brukeren veier rundt 100 kg eller mer, kan dette påvirke batteriets kapasitet og dermed driftstiden.

Se manualen her:

v1935.dk/driftmanual



Tekniske spesifikasjoner for fremdriftshjelp

Hastighet	0-4 km/t. Kan justeres slik at fremdriftshjelpen passer til brukeren
Effekt	200 W
Batterilevetid	1 dags bruk (avhengig av bruksmønster)
Lading	Lades gjennom stolen normale lademodus
Stolens bredde	Stolens bredde forblir uendret (som på VELA Tango 700EL)
Sikkerhet vedrørende løft og fremdrift	Fremdriften avbrytes hvis løftet heves mer enn 10 cm
Kan ikke kombineres med	Tilbehør: doble lettrullende hjul og seterotasjon
Vekt av tilbehør	6 kg
Fremdriftshjul, funksjon	Hjulene må være nedfelt og i kontakt med gulvet for å gi fremdrift.
Artikkelnummer / HMS-nr.	J929339 / (HMS-nr.) 323586

Merk: Fremdriftshjelp er et tilbehør til VELA Tango 700E og 600ES som gir brukeren ekstra assistanse og dermed forlenger muligheten for selvstendig å utføre daglige innendørs aktiviteter. Det er ikke en erstatning for en elektrisk rullestol, men en støtte til brukere som trenger hjelp til å skape fremdrift i stolen.



Fremdriftshjelp for VELA-stoler

Fremdriftshjelp gjør det mulig å bruke en VELA-stol, selv om man ikke har styrke i beina til å "gå stolen rundt" gjennom en hel dag.

Elektrisk fremdrift kan hjelpe borgeren til

- ✓ Selvstendighet i eget hjem
- ✓ Å styrke evnen til å opprettholde uavhengighet
- ✓ Å være aktiv i en lengre periode

Forlenger borgers aktive liv

For de borgerne som blir trette og har nedsatt funksjonsevne i beina, kan fremdriftshjelp aktiveres for å sikre muligheten for mobilitet og aktivitet gjennom hele dagen.

Skaper selvstendig mobilitet

Borgere som ikke har krefter til, på egen hånd, å trille stolen rundt og utføre aktiviteter, kan spare krefter ved hjelp av den fremdriftshjelpen - og bruke energien på aktiviteten.

Forbedrer livskvaliteten

Økt mobilitet i hjemmet gir mulighet for å klare mer på egen hånd - og selvstendighet og selvbestemmelse forbedrer borgers livskvalitet.

Se videoen her:
v1935.dk/drift



Passer til
VELA Tango 700EL