



VELA & VELA Medical

MODELLER: VELA Latin & VELA Samba

VELA Latin



VELA Samba



INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0 TEKNISK SERVICE	3
1.1 REKLAMASJONSRETT	3
2.0 RENGJØRING	4
2.0.1 Rengjøring av Gassfjær	4
3.0 VEDLIKEHOLD	4
3.1 SJEKKLISTE TIL TEST OG KONTROLL	4
3.2 GENERELT	5
3.2.1 Hjul	5
3.2.2 Smøring av indre og ytre rør	5
3.2.3 Seteplater	5
3.2.4 Sete og rygg	5
3.2.5 Armlener	5
3.2.6 Tilbehør	5
3.3 JUSTERING	6
3.3.1 Justering av armlene og andre funksjoner	6
3.3.2 Justering av lameller	6
3.4 MONTERINGSANVISNING	7
3.4.1 Hjulskifte	7
3.4.2 Skifte av gasspatron	8
3.4.3 skifte av sete - standard	9
3.4.4 skifte av sete - krakk	10
3.4.5 skifte av sete - Sadel	11
3.4.6 skifte av Armlenesett	12
3.4.7 skifte av ryggbøyle	13
3.4.8 skifte av rygg	14

MERK: Denne manualen er kun tiltenkt ansatte ved hjelpemiddellager og teknisk personale, som arbeider med VELA-stoler. Ikke gjør forsøk på å bygge om, justere eller reparere stolen selv.

KJÆRE KUNDE

Denne servicemanualen hører til samtlige modeller og varianter av; VELA Latin og VELA Samba. Her vil du finne nyttige opplysninger og tekniske beskrivelser i forbindelse med service av stolene.

1.0 TEKNISK SERVICE

VELA/VELA Medical tilbyr egne servicetjenester og teknisk support i vår åpningstid via kundeservice, hvor teknisk personale bistår med feilsøking, teknisk dokumentasjon og spørsmål vedrørende reparasjoner. Man kan også finne mye informasjon på våre hjemmesider: www.vermundlarsen.no/
www.vela-medical.dk

For ytterligere hjelp kontakt:

VELA kundeservice på tlf. 69 67 60 18 eller

mail@vermundlarsen.no


VELA Medical kundeservice på

tlf. +45 96 34 76 00 eller mail@vela-medical.dk

1.1 REKLAMASJONSRETT

Vi gir reklamasjonsrett etter gjeldende lovgivning. Reklamasjonsretten gjelder kun ved bruk av originale reservedeler og tilbehør, samt tilpasninger utført av fagpersoner, forutsatt normal bruk i henhold til brukermanualen. Disse er alltid tilgjengelige på vermundlarsen.no/
www.vela-medical.dk.

Ved reklamasjon eller andre henvendelser om produktet skal stolens identifikasjonsnummer oppgis. Dette sekssifrede nummeret kan finnes under stolen på en 6 x 2 cm sølvfarget etikett:

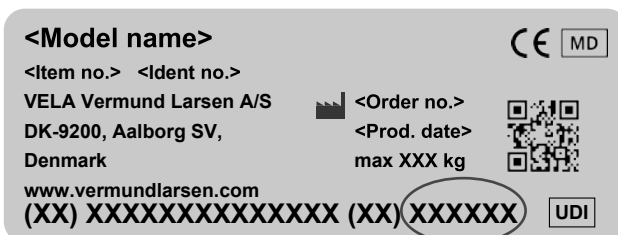

2.0 RENGJØRING

VELA-/VELA Medical-stoler kan gjenbrukes og tåler grundig rengjøring. Gjenbruk og gjenvinning inkluderer ikke bare forsvarlig avhending, men også gjenbruk av hele stolen til en annen bruker. Vi anbefaler at fagpersoner gjennomgår stolen ut fra på sjekklisten nedenfor (avsnitt 3.1). Mange av elementene i sjekklisten blir utdypet under avsnitt 3.2.

For generell veiledning om rengjøring henviser vi til stolens brukermanual, som du finner vermundlarsen.no/vela-medical.dk.

2.0.1 RENGJØRING AV GASSFJÆR

Stoler med gassfjær kan rengjøres med en godt vridd klut eller med godkjente desinfeksjonsmidler. Vi anbefaler også regelmessig vedlikehold etter rengjøring. Dette inkluderer smøring av indre og ytre rør, se avsnitt 3.2.2.

3.0 VEDLIKEHOLD

Hensikten med en vedlikeholdskontroll av stolen er å identifisere for eksempel defekte og slitte deler. Vi anbefaler et årlig ettersyn av stolen, samt hvis stolen skifter bruker. Følgende avsnitt er utdypinger av sjekklisten (avsnitt 3.1).

3.1 SJEKKLISTE TIL TEST OG KONTROLL

1. Understell

- ☐ Undersøk for brudd
- ☐ Etterstram skruer

2. Løftesøyle, gasspatron

- ☐ Sjekk funksjon
- ☐ Smøring av bevegelige deler
- ☐ Sjekk for slitasje
- ☐ Etterstram skruer

3. Hjul

- ☐ Sjekk rullemotstand
- ☐ Undersøk eventuelt sluring i lagere
- ☐ Etterstram skruer
- ☐ Fjern skitt/hår ved hjul
- ☐ Rengjør hjulspor

4. Setemekanisme/bæreplate

- ☐ Sjekk alle funksjoner
- ☐ Lytt etter mislyder
- ☐ Etterstram skruer
- ☐ Smøring av bevegelige deler

5. Armlene

- ☐ Sjekk funksjon
- ☐ Sjekk sveisinger
- ☐ Undersøk for brudd
- ☐ Etterstram skruer
- ☐ Sjekk overflate/varetrekk

6. Polstring/varetrekk

- ☐ Sjekk varetrekk på sete
- ☐ Sjekk varetrekk på ryggstøtte
- ☐ Sjekk varetrekk på nakkestøtte
- ☐ Sjekk varetrekk på sidestøtter
- ☐ Sjekk løse trekk

7. Rengjøring

- ☐ Varetrekk
- ☐ Understell
- ☐ Armlene
- ☐ Annet tilbehør

3.2 GENERELT

Plasser stolen på et plant underlag. Sjekk at alle hjulene er i kontakt med underlaget. Hvis dette ikke er tilfellet, må enten ett eller flere feilmonterte hjul, defekte hjul eller en defekt ramme byttes ut. Alle komponenter som er sveiset sammen må kontrolleres visuelt for sprekker eller brudd. Deler med tydelig slitasje bør byttes.

3.2.1 HJUL

Det anbefales å inspisere hjulene med jevne mellomrom og rengjøre for eventuelle trådrester og lignende. Visse gulvtyper og gulvaskemidler har en større tendens til å samle seg på hjulene og danne et lag med skitt. Skitt på hjulene kan overføres tilbake til gulvene. Sørg derfor for å rengjøre hjulene eller skifte dem ut. I tillegg må alle hjul sjekkes for slark i både hjullager og svinglager. Det må ikke være noe merkbar slark i noen av dem. I dette tilfellet må hjulet skiftes. Det anbefales å bytte ut alle hjul samtidig, slik at stolen ruller optimalt.

3.2.2 SMØRING AV INDRE OG YTRE RØR

Det anbefales jevnlig smøring av indre og ytre rør på stoler med gassfjær, for å sikre at stolen lett kan løftes og senkes

- Hev stolen til topposisjonen
- Rengjør det indre røret/gassfjæren med avfettingsmiddel
- Smør det indre røret/gassfjæren på alle overflater med smøremiddel (f.eks. HHS2000) i et jevnt lag
- Når stolen beveges opp og ned umiddelbart etterpå, fordeles også smøremidlet på det ytre røret

Stoler med elektrisk heving er smurt innvendig ved fabrikken og skal ikke tørkes eller smøres i løpet av stolens levetid.

3.2.3 SETEPLATER

Seteplaten er mekanismen som sitter under setet og gir stolen funksjoner som setetilt. Stolens innstillingshåndtak er også montert på denne.

Kontroller om seteplaten har mye slark eller lager støy. Støy er ikke farlig, men kan være en indikator på noe annet som trenger oppmerksomhet. Bevegelige deler skal smøres, bortsett fra lameller (se avsnitt **3.3.2**). Lameller bør renses for fett og støv, og smøres forsiktig ved den ene enden for å unngå støy. Det er viktig å kun smøre i den ene enden, da lamellene ellers kan miste funksjonen. Vær oppmerksom på at smøremiddelet ikke renner ned i motsatt ende etterpå. Løse skruer må oppdages og strammes.

Merk: Unngå å stramme mutrene som beskrives i avsnitt **3.3.2**, med mindre man opplever utfordringer med at sete- eller ryggvinkel glir ned.

3.2.4 SETE OG RYGG

Sete og rygg kontrolleres for slitte polstringsdeler. Hvis det er et hull i polstringen, anbefales det å skifte hele setet eller ryggen. Forsikre deg om at setet er godt festet ved å tilte det, og bevege det fra side til side. Hvis setet er løst, er det viktig å kontrollere og stramme skruene som setet festes med.

3.2.5 ARMLENER

Kontroller armlenets tilstand og bytt hvis det er sprekker i det.

Kontroller at eventuelle sveiser er intakte og at håndskruene er tilstrekkelig stramme slik at armlenet er sikkert og stabilt.

3.2.6 TILBEHØR

Kontroller at tilbehøret er i god stand og er forsvarlig montert på stolen.

3.3 JUSTERING

3.3.1 JUSTERING AV ARMLENE OG ANDRE FUNKSJONER


Flere av stolens justeringsmuligheter holdes med håndsskruer slik at brukeren kan justere funksjonen uten bruk av verktøy.

Hvis brukeren ikke har mulighet til å justere funksjonen, kan håndsskruen byttes ut med skruer og muttere. Pass imidlertid på å bruke riktige størrelser og lengder.

3.3.2 JUSTERING AV LAMELLER

Sete- og ryggvinkelen justeres i utgangspunktet av lameller som består av en stabel med tynne plater som holder vinkelen ved hjelp av friksjon. En fjær trykker på platene og skaper friksjonen. Denne fjæren kan strammes hvis det oppleves at vinkelen på sete eller rygg glir ut selv om utløserbryter ikke er aktivert.

Stram mutteren som vist på figuren nedenfor for å stramme lamellene. Merk: hvis mutteren strammes for mye, vil ikke funksjonen lenger kunne justeres ved å aktivere utløserspaken. Løsne deretter mutteren igjen.

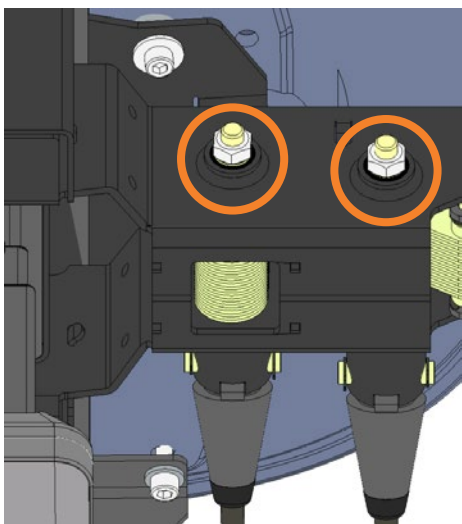


Mutteren kan være gjemt bak en propp som fjernes enten med hånden eller forsiktig med en flat skrutrekker.

3.4 MONTERINGSANVISNING

3.4.1 HJULSKIFTE


No. 105870

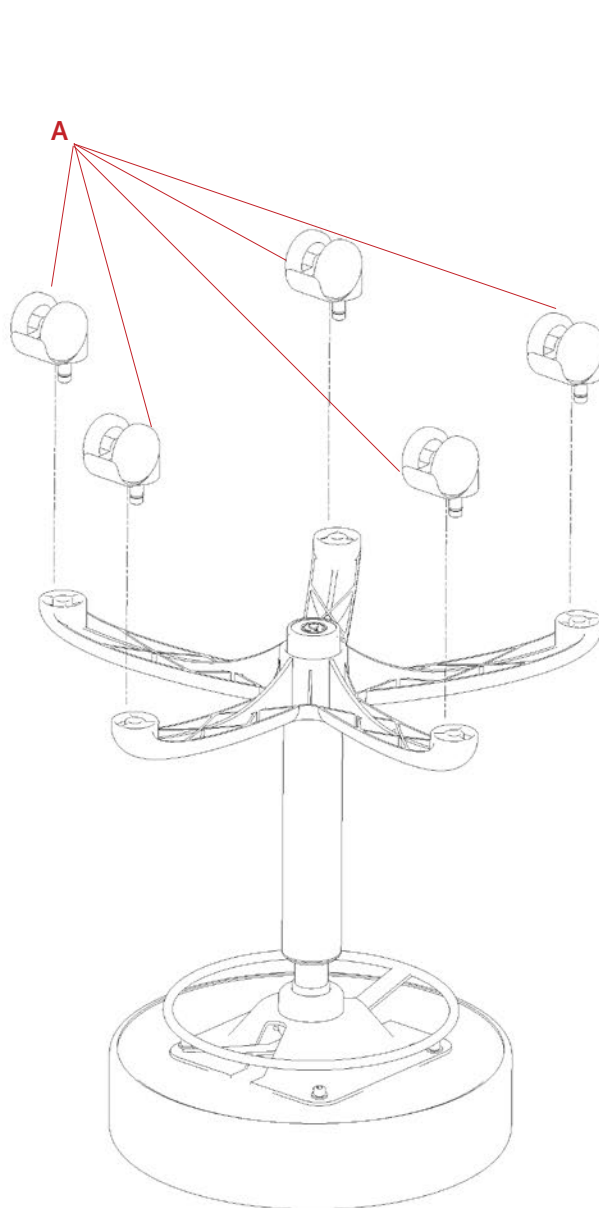


1. Snu stolen opp-ned og trekk av hjulene (A). Rengjør eventuelt monteringshullene.
2. Trykk de nye hjulene ned i hullene til et lite klikk høres.
3. Kontroller at alle hjulene kan dreies uhindret.

3.4.2 SKIFTE AV GASSPATRON

No. 105879

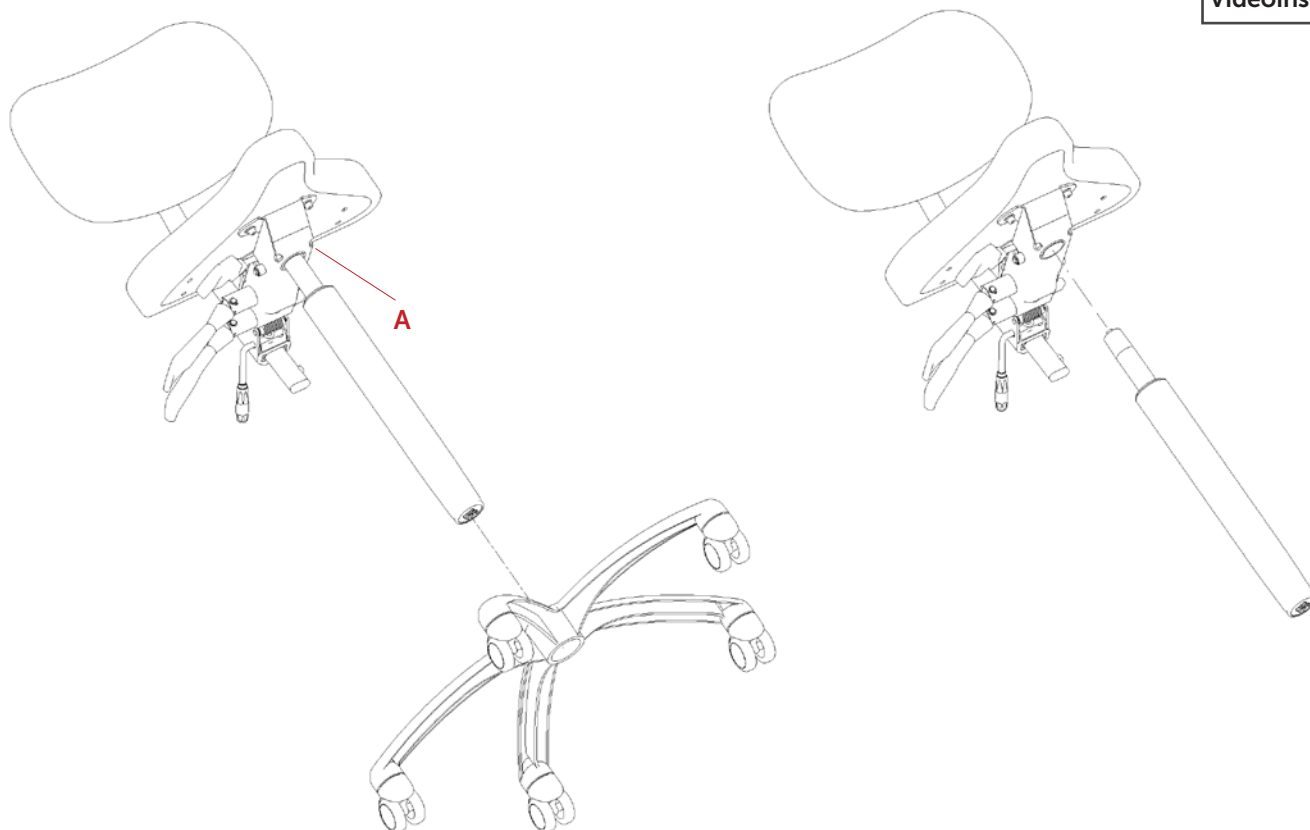


1. Slå av understellet med en gummihammer. Bank så tett på det ytre røret som mulig (A).
2. Hold rundt gasspatronen, og slå med en gummihammer på bæreplaten der gasspatronen er festet, til gasspatronen går ut av bæreplaten.
3. Sett den nye gassfjæren opp i bæreplaten.
4. Sett understellet på igjen.
5. Sett et kne i setet og bruk kroppsvekten til å presse overdelen godt på plass.
6. Kontroller at gasspatronen kan løses ut.

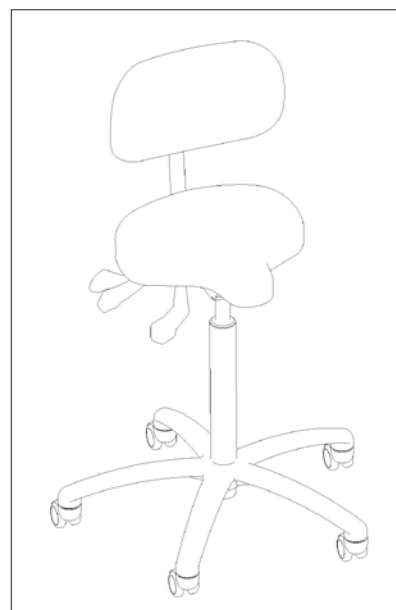

3.4.3 SKIFTE AV SETE - STANDARD


No. 105912

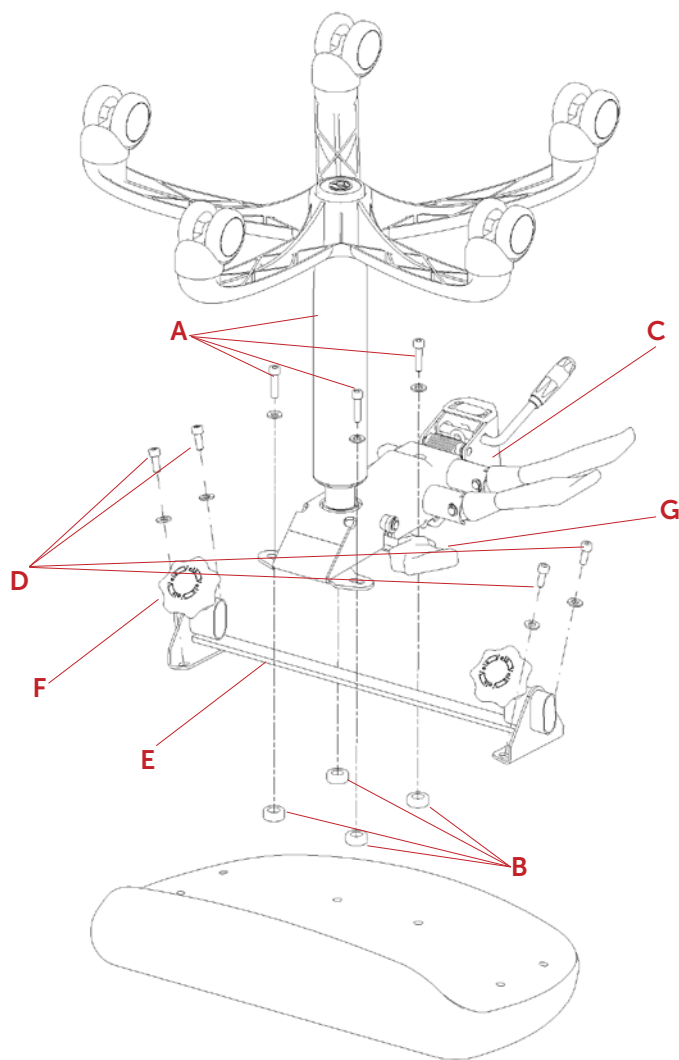

1. Demonter de 4 skruene og skivene (A) og avstandsstykkene (B) som holder bæreplaten (C), og fjern bæreplaten.
2. Demonter de 4 skruene og skivene (D) som holder armlenebunnen (E), og fjern armlenebunnen.
3. Ta det nye setet, og skru på armlenebunnen igjen. Sørg for at håndskruene (F) vender forover.
4. Plasser de 4 avstandsstykkene på setet, og skru bæreplaten fast med de 4 skruene og skivene, og stram dem godt.
5. Test utløserhåndtaket (G). Hvis det er konflikt med håndskruen (F), trekk forsiktig håndtaket litt forover og nedad

3.4.4 SKIFTE AV SETE - KRAKK


No. 105865

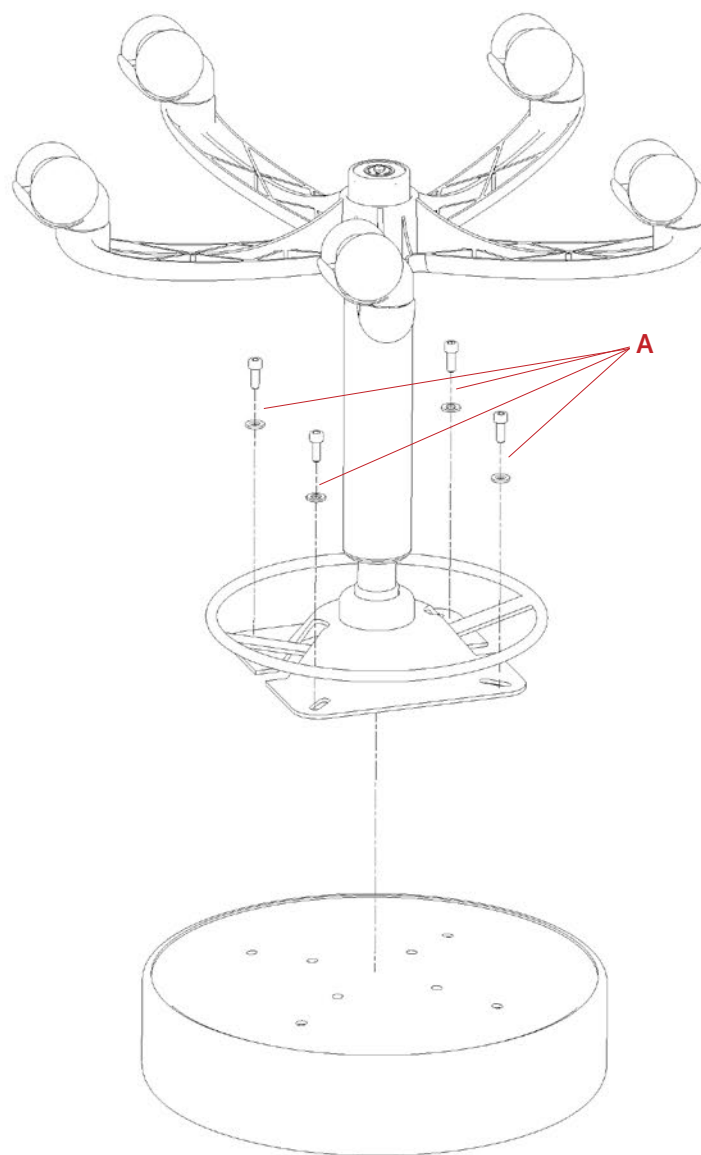

1. Snu stolen opp-ned og skru inn de 4 skruene og skivene (A) med en unbrakonøkkel.
2. Legg det nye setet under bæreplaten og skru fast de 4 skruene og skivene (A) igjen.

3.4.5 SKIFTE AV SETE - SADEL

No. 105866


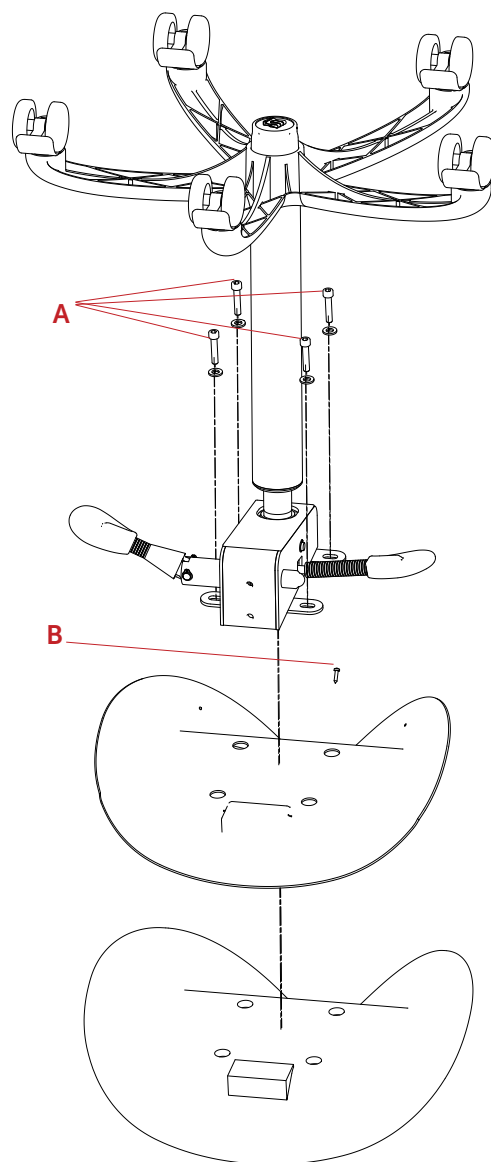


1. Snu stolen opp-ned og skru ut alle de 4 skruene med skiver (A).
2. Skru de to treskruene (B) ut av plastdekselet, og fjern plastdekselet.
3. Legg det nye setet med bunnen opp, legg plastdekselet på igjen, og plasser resten av stolen.
4. Skru de 4 skruene med skiver (A) på igjen, og stram godt.
5. Skru treskruen inn i plastdekselet igjen slik at det sitter tett mot setet.

Merk: Sadelsete small monteres uten treskruen og plastdekselet under setet.

3.4.6 SKIFTE AV ARMLENESETT

No. 105880

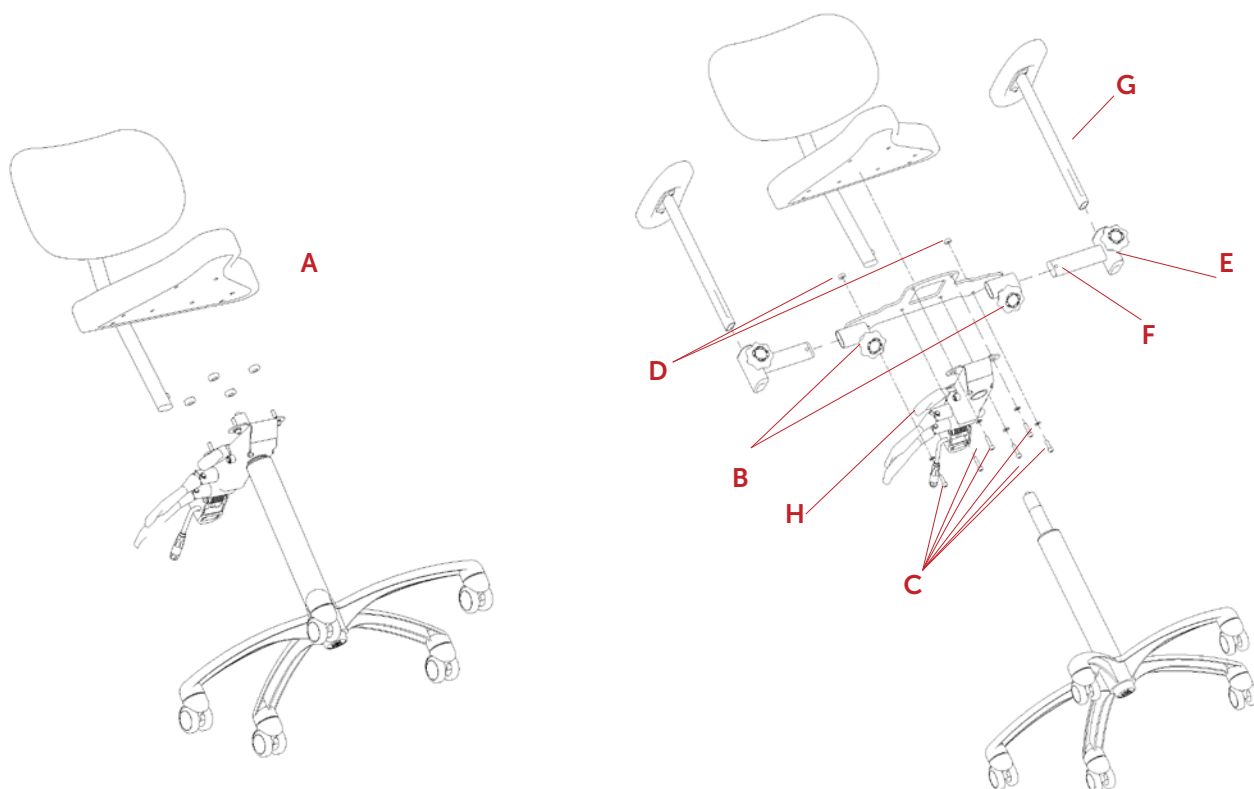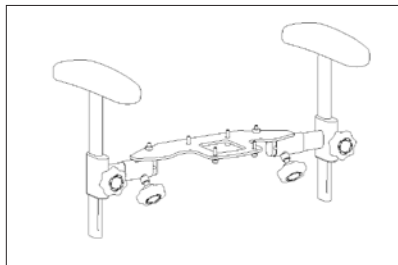


1. Skru hele underdelen av setet (A) som vist på bildet til venstre.
2. Plasser armlenebunnen (B) på setet, og bruk de medfølgende skruene og skivene (C) til å montere underdelen fast igjen.
3. Sett de to avstandsstykkene (D) på bakerst, som vist på bildet til høyre. Stram alle skruene godt.
4. Sett sidestykkene (E) i armlenebunnen på hver side. Håndskruen skal vende forover. Trykk inn fjærknappen (F) for å sette sidestykkene inn i armlenebunnen. Stram håndskruen på armlenebunnen.
5. Sett armlenestengene (G) inn i sidestykkene. Still inn høyden på armlenene og stram håndskruen godt.
6. Still inn avstanden mellom armlenene ved å løsne håndskruen på armlenebunnen under setet. Stram håndskruen godt igjen.
7. Test utløserhåndtaket (H). Hvis det er konflikt med håndskruen (B), trekk forsiktig håndtaket litt forover og nedad.




3.4.7 SKIFTE AV RYGGBØYLE


No. 105894

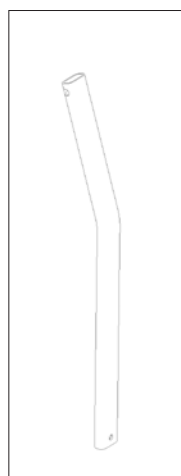

42 cm

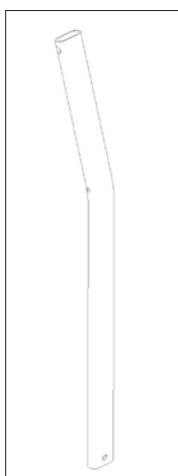


52 cm

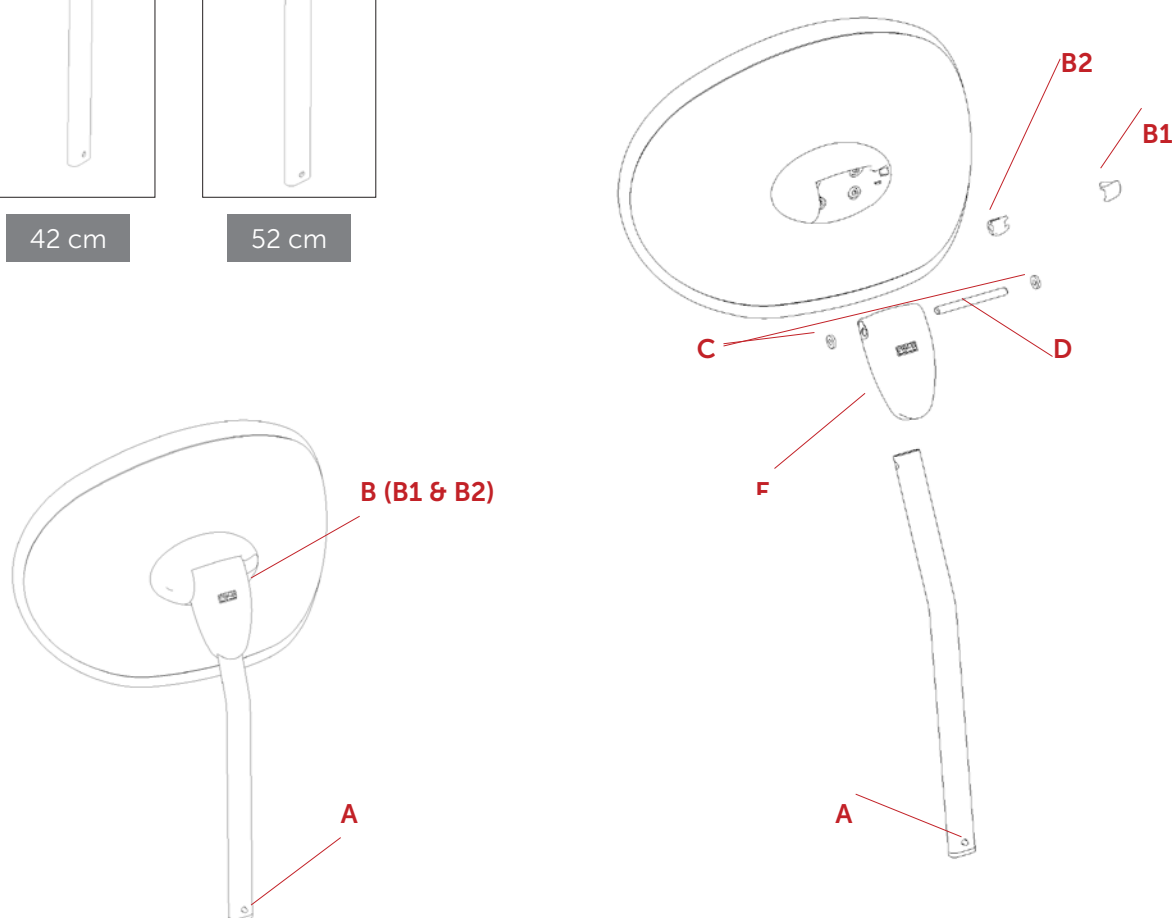

1. Låsetapp (A) på ryggbøyle trykkes inn for å ta ryggbøylen opp fra bæreplaten.
2. Fjern låsedelen (B (B1 og B2)) på ryggbeslaget (B1 lirkes ut med en skrutrekker, B2 skyves ut mot høyre).
3. Ryggbøylen kan nå fjernes. Ta av akselen (C) og gummiskivene (D), og trekk plastdelen (E) av ryggbøylen.
4. Sett den nye ryggbøylen i plastdelen (E).
5. Sett akselen (C) gjennom plastdelen (E) og ryggbøylen.
6. Gummiskivene (D) settes på akselen – én på hver side.
7. Sett ryggbøylen i holderen på ryggen, og sett deretter inn de to låsedelene – først låsedel (B2) og deretter låsedel (B1).
8. Låsetapp (A) på ryggbøyle trykkes inn for å sette ryggbøylen i bæreplaten.

3.4.8 SKIFTE AV RYGG

No. 105865

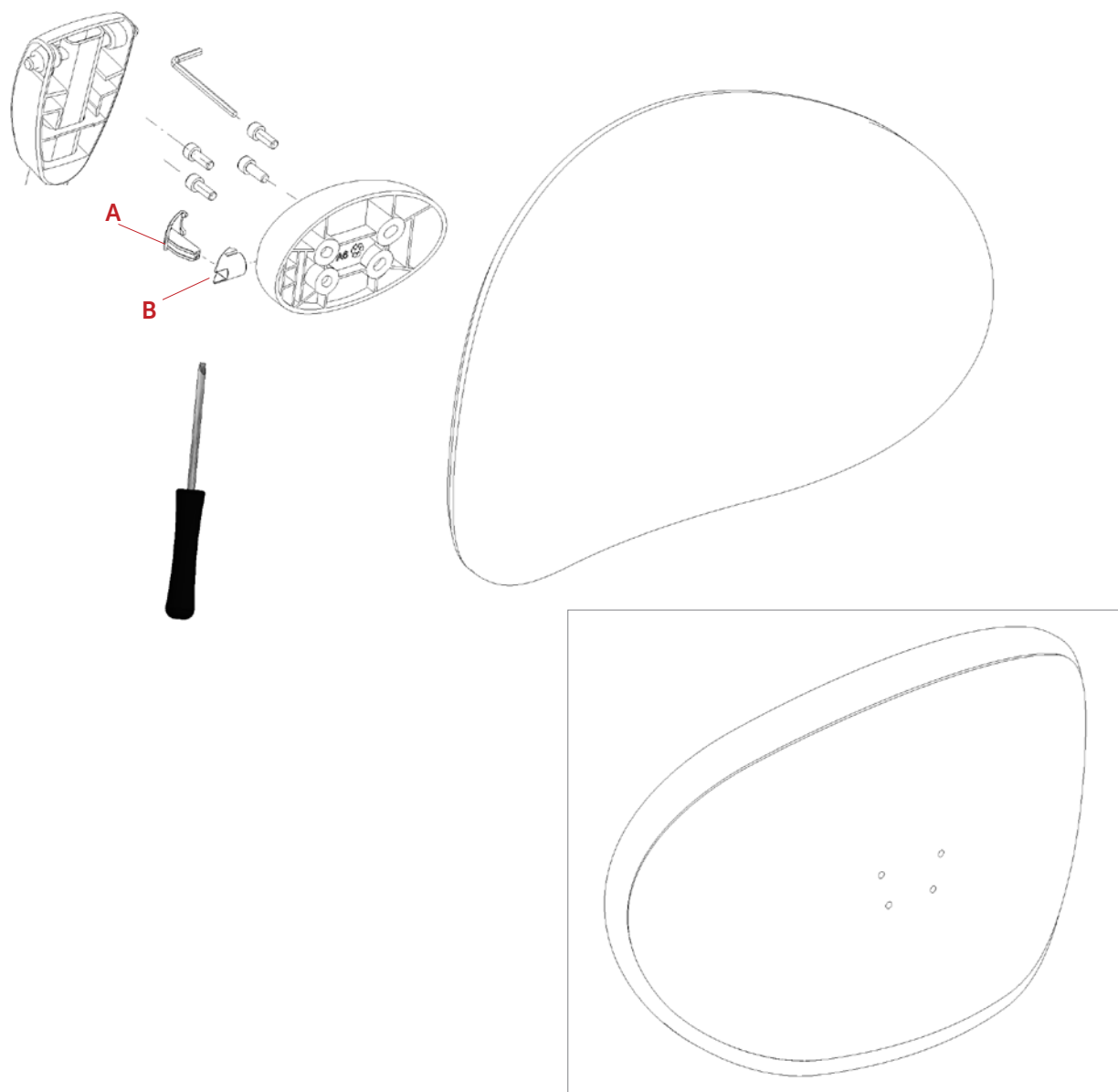

1. Bruk en skrutrekker til å vippe ut låsetappene (A) og (B).
2. Ryggbøylen kan nå fjernes.
3. Bruk en unbrakonøkkel str. 6 til å demontere rygghengslet.
4. Ryggen kan nå skiftes. Føl deg frem til hullene, og bruk en spiss gjenstand til å stikke ut hullene.
5. Monter de 4 skruene i den nye ryggen.
6. Ryggbøylen monteres på rygghengslet.
7. Låsetappene (A) og (B) monteres i omvendt rekkefølge av hvordan de ble demontert.
8. Monter ryggen i holderen.

